

Drivhjul 22"

HD Motion har som standard drivhjul i storlek 22" (A). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 22"-modellen används för brukare som helt eller delvis kan köra rullstolen själv. Denna modell går något lättare över hinder som t ex. trottoarkanter.


Alternativt kan rullstolen förses med drivhjul i storlek 20", främst för att sänka sitthöjden. Länkhjulen flyttas då i länkhjulsgafflarna, se Teknisk Information, dokument nummer 96720.

DÄCK - EGENSKAPER

Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan) i dimension 22x1-3/8". PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet. 20"-hjul har dimension 20x1-3/8". Även dessa är i PUR (polyuretan).

DÄCK - ALTERNATIV

Som alternativ till PUR finns luftpumpade däck. Luftpumpade däck är lättrullade och ger bra stötdämpning men kräver underhåll i form av pumpning. Om rullstolen är utrustad med luftpumpade däck är rekommenderat lufttryck angivet på däcken.

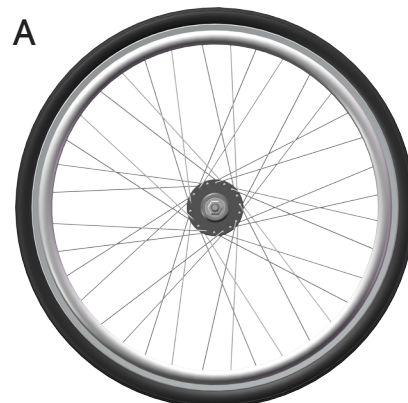

Transporthjul 16"


HD Motions transportmodell har drivhjul i storlek 16" (B). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 16"-modellen är för brukare som inte kör själv. Denna modell möjliggör för vårdaren att komma närmare brukaren i vård situationen. Sidoflyttningar, t ex. från säng till rullstol underlättas också med ett mindre drivhjul.

DÄCK - EGENSKAPER

Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan) i dimension 16x1,75". PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet.


DÄCK - ALTERNATIV

Även 16"-hjul kan utrustas med luftpumpade däck. För egenskaper hos dessa däck, se ovan under Drivhjul 22".

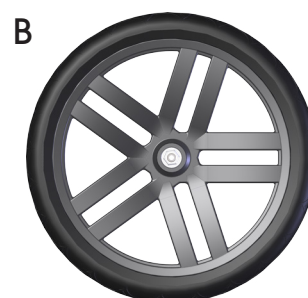

Tabell 1 - Varianter drivhjul


	a	a
	HD Motion 22	HD Motion 16
PUR	1-3/8"	1,75"
Luftpumpade	1"	1,75"

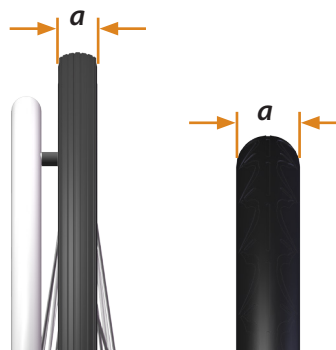

Länkhjul


Både HD Motion modell 22 och 16 är utrustade med pump- och punkteringsfria länkhjul i storlek 150x30 mm (C). Länkhjulen är av PUR (polyuretan).

Länkhjulsgaffeln har 5 hål, olika hål används beroende på vilket drivhjul som används, se Teknisk Information, dokument nummer 96720.

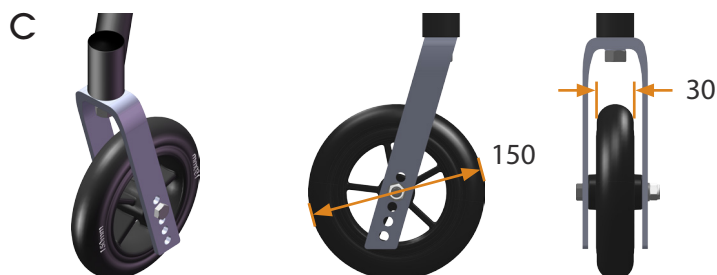


Drivringar

Drivringar till HD Motion 22 finns i två material, rostfritt stål som är slitstarkt (D) eller soft grip (plastbeklätt), om ett bättre grepp behövs (E).

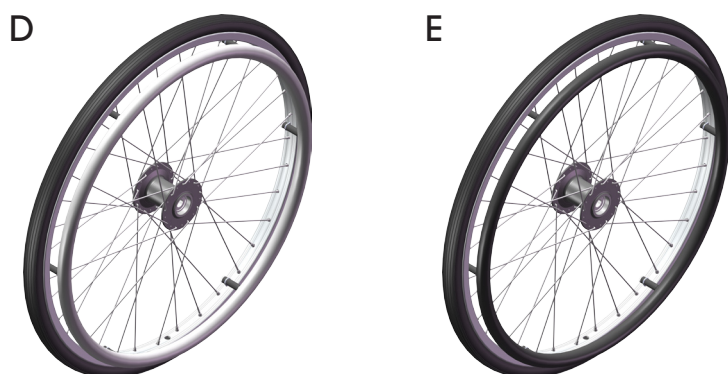

Ekerskydd

Ekerskydd finns att montera på drivhjul 22" och 20" (F). Avståndet mellan navet och ekerskyddet är ca 2,5 cm (G).

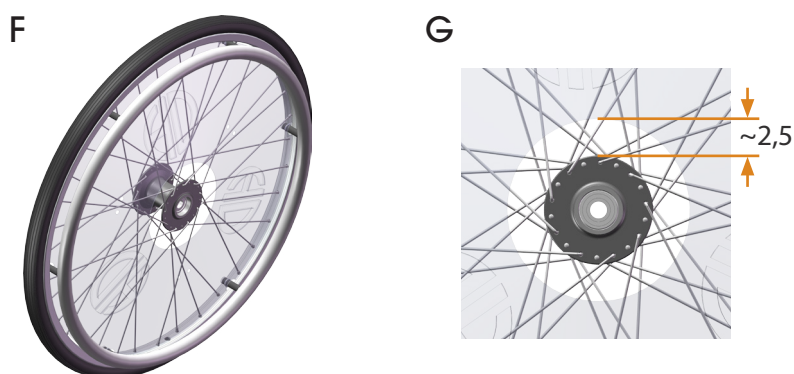

Tänk på

- Luftpumpade hjul rullar ofta bra men denna egenskap förändras om inte hjulet pumpas optimalt.
- Drivringarna får ej tas bort eftersom hjulkonstruktionen då försvagas.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.