


Drivhjul 22"

HD Motion har som standard drivhjul i storlek 22" (A). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 22"-modellen används för brukare som helt eller delvis kan köra rullstolen själv. Denna modell går något lättare över hinder som t ex. trottoarkanter.

Alternativt kan rullstolen förses med drivhjul i storlek 20" eller 24". 20" drivhjul används främst för att sänka sitthöjden och kombineras med flytt av länkhjul i länkhjulsgafflarna. 24" används främst för att höja sitthöjden eller för att lättare nå drivringar om man kör själv. Kombineras med flytt av länkhjul. Se Teknisk Information, dok.nr. 96720.

Vidare information om sitthöjd finns i Infoblad *Sitthöjd*, dok.nr. 96911.

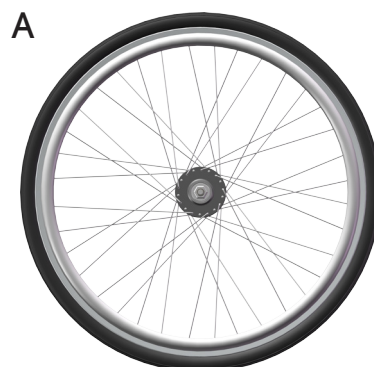

Däck - Egenskaper

Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan). PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet.

Däck - Alternativ


Som alternativ till PUR finns luftpumpade däck. Luftpumpade däck är lättrullade och ger bra stötdämpning men kräver underhåll i form av pumpning. Om rullstolen är utrustad med luftpumpade däck är rekommenderat lufttryck angivet på däcken.

Cambring

HD Motion med drivhjul 22" har som standard 6° cambring. Möjlighet finns att välja rullstolen utan cambring. Detsamma gäller för 20" och 24" drivhjul. Om 24" drivhjul används med cambring 6° kan viss konflikt uppstå. 0° cambring rekommenderas.

Transporthjul 16"

HD Motions transportmodell har drivhjul i storlek 16" (B). Dessa är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quick-release). 16"-modellen är för brukare som inte kör själv. Denna modell möjliggör för vårdaren att komma närmare brukaren i vårdssituationen. Sidoförflyttningar, t ex. från säng till rullstol underlättas också med ett mindre drivhjul.

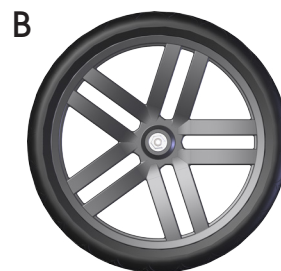

Däck - Egenskaper


Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan). PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet.

Däck - Alternativ

Även 16"-hjul kan utrustas med luftpumpade däck. För egenskaper hos dessa däck, se ovan under Drivhjul 22".

Tabell 1 - Varianter drivhjul

	a	a
	20", 22", 24" hjul	16" hjul
PUR	1-3/8"	1,75"
Luftpumpade	1"	1,75"

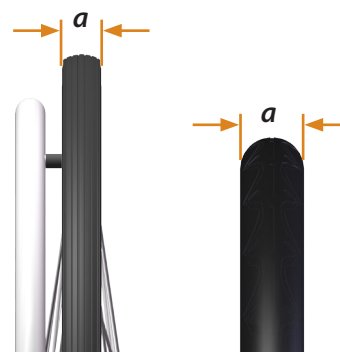


Länkhjul

Både HD Motion modell 22 och 16 är utrustade med pump- och punkteringsfria länkhjul i storlek 150 x 30 mm (C). Hjulbanan är av PUR (polyuretan). Alternativt kan rullstolarna utrustas med smalare länkhjul i storlek 125x27 mm, med hjulbana av gummi.

Länkhjulsgaffeln har 5 hål och vilket hål som används beror på vilken typ eller storlek på drivhjul som används, se Teknisk Information, dok.nr. 96720.


Tabell 2 - Varianter länkhjul [mm]

<i>b x c</i>	Material
150 x 30	PUR
125 x 27	Gummi

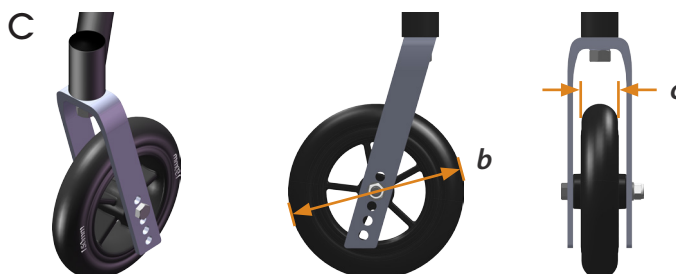

Drivringar


Drivringar till HD Motion 22 finns i två material, rostfritt stål (D) som är slitstarkt eller soft grip (plastbeklätt) (E), om ett bättre grepp behövs.

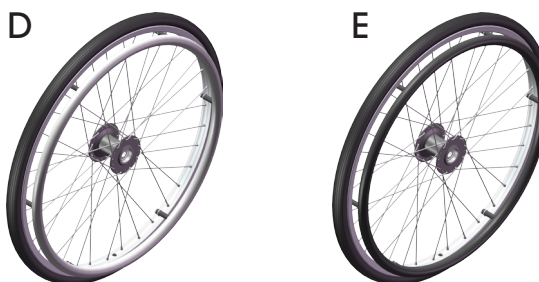

Ekerskydd och Hjulåpor

Ekerskydd finns att montera på drivhjul 22" och 20" (F). Avståndet mellan navet och ekerskyddet är ca 2,5 cm (G).

Till 16" drivhjul finns hjulåpor (H) som täcker den övre halvan av hjulet.

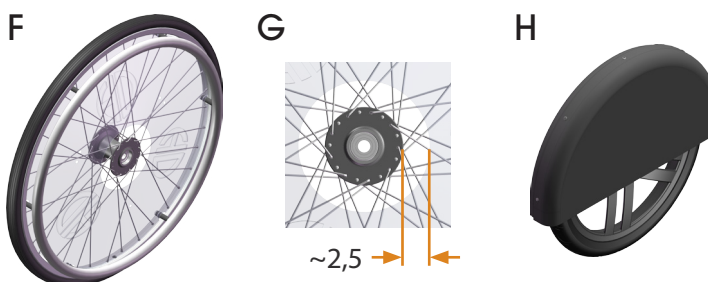

Tänk på

- Luftpumpade hjul rullar ofta bra men denna egenskap förändras om inte hjulet pumpas optimalt.
- Drivringarna får ej tas bort eftersom hjulkonstruktionen då försvagas.
- Om 24" drivhjul används med cambring 6° kan viss konflikt uppstå. 0° cambring rekommenderas. Kontakta HD Rehab för vidare information.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.