



HD Motion finns med två typer av ryggsystem, Flexirygg (A) och Planrygg (B). Ryggsystemen finns i tre olika höjder, extra kort, kort och lång. Flexirygg och Planrygg kan båda kompletteras med ryggdyna med Vingar eller ryggdyna Plan.

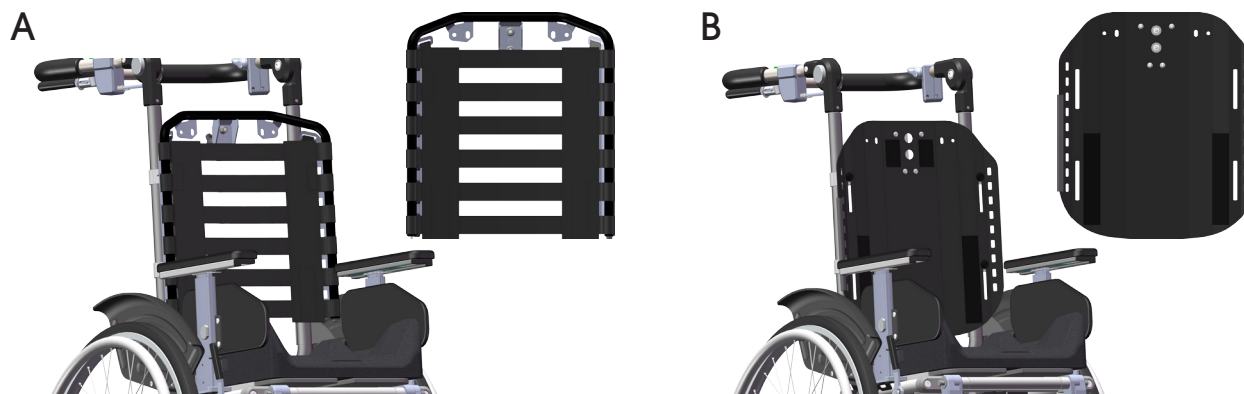


## Flexirygg

Flexirygg ger ett anpassningsbart stöd för de flesta brukare. Det passar såväl ryggar utan deformiteter som ryggar med t ex skolios. Flexirygg består av en Flexiram med remmar (5 st på den extra korta, 6 st på den korta, 7 st på den långa). Remmarna gör det möjligt att kunna reglera brukarens bäckenställning och ge ett stöd för ländryggen och även främja ventilationen i ryggdynan. Ryggdynan fästs mot ryggsystemet med ett kardborrfäste (C).

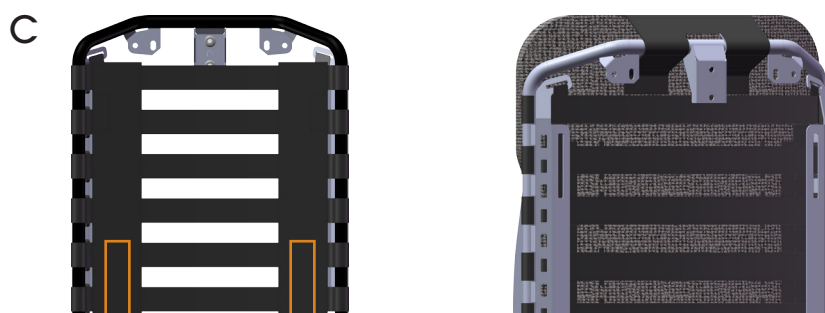


## Planrygg

Planrygg används när brukaren har behov av ett fastare ryggstöd. Den kan också användas som bas då det finns ett behov av att bygga upp ett individanpassat ryggstöd. Planryggen består av en ryggplatta av lackad aluminiumplåt. Ryggdynan fästs mot ryggplattan med ett kardborrfäste (D).

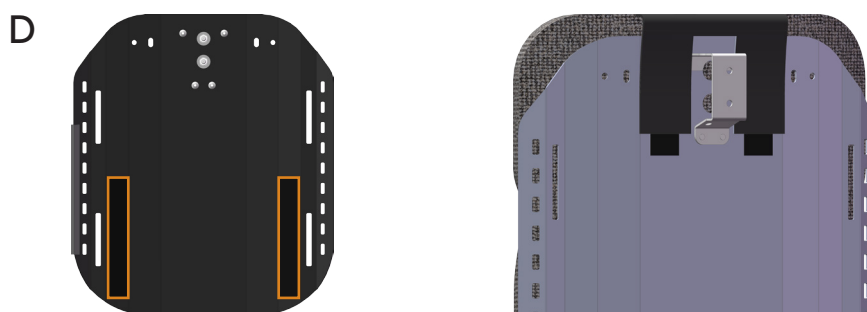

## Inställningar


Ryggstödshöjden kan regleras steglöst 6 cm i ett inbyggt spår i ryggsystemet (E). Detta gäller både Flexirygg och Planrygg.

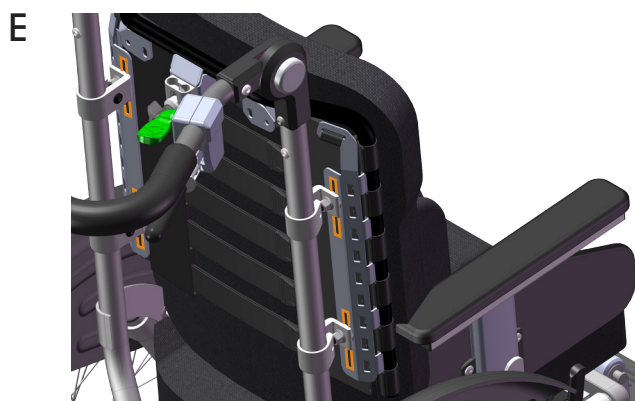

## Ryggdynor

Det finns två typer av ryggdynor, med sidostödsvingar (F) eller utan (G).

Sidostödsvingarna ger ett fast men mjukt stöd för brukaren i sidled. Den plana ryggdynan används för den mer aktiva brukaren med god bålstabilitet eller då sidostödsvingarna är i vägen för bålstödens placering. Båda ryggdynorna finns i extra kort, kort och lång för att passa ryggsystemens tre höjder.

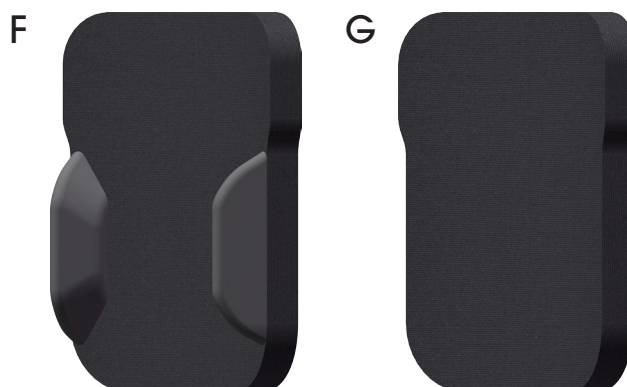


## Ryggstödshöjd

Ryggstödshöjden, utan sitt- och ryggdynor, mäts från sittplattan till överkanten på ryggsystemet (Flexiram alternativ Planrygg) (H).

Med HD Motions originalryggdyna ökar ryggstödshöjden ca. 2 cm, men den faktiska stödytan ökar inte. Med HD Motions originalsittdyna minskar ryggstödshöjden med 4,5 cm (obelastad sittdyna) (I).

Tabell 1 - Ryggstödshöjd utan dynor [cm]


| Ryggsystem<br>Flexi/Plan | a<br>min | a<br>max |
|--------------------------|----------|----------|
| Extra-kort               | 42       | 48       |
| Kort                     | 48       | 54       |
| Lång                     | 54       | 60       |

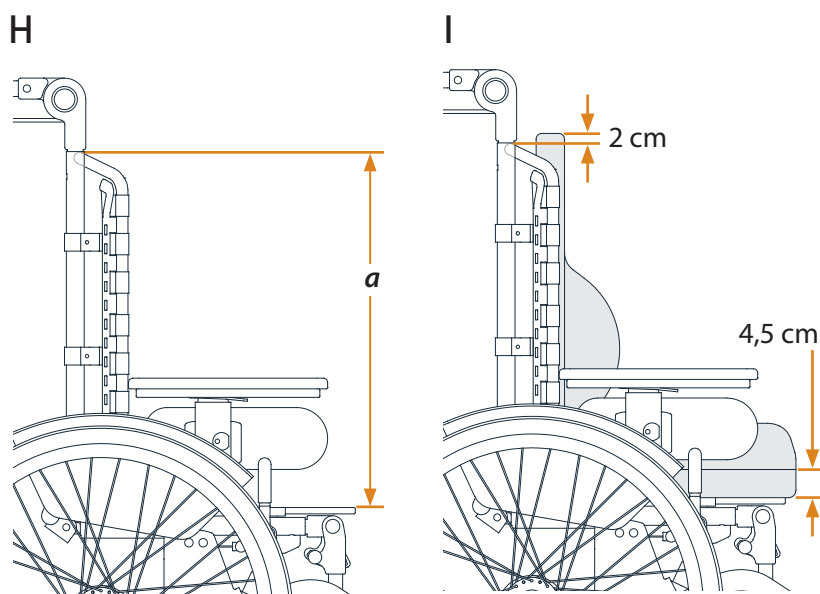

## Mått ryggdynor

Tabell 2 - Mått ryggdynor [cm]

| Modell                | Bredd sb30 |          | Bredd sb34 |          | Höjd     | Tjocklek | Djup     |
|-----------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                       | <i>b</i>   | <i>c</i> | <i>b</i>   | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |
| Med Vingar Extra Kort | 30         | 32       | 34         | 36       | 38       | 4        | 12       |
| Med Vingar Kort       | 30         | 32       | 34         | 36       | 44       | 4        | 12       |
| Med Vingar Lång       | 30         | 32       | 34         | 36       | 50       | 4        | 12       |
| Plan Extra Kort       | 30         | 32       | 34         | 36       | 38       | 4        | -        |
| Plan Kort             | 30         | 32       | 34         | 36       | 44       | 4        | -        |
| Plan Lång             | 30         | 32       | 34         | 36       | 50       | 4        | -        |

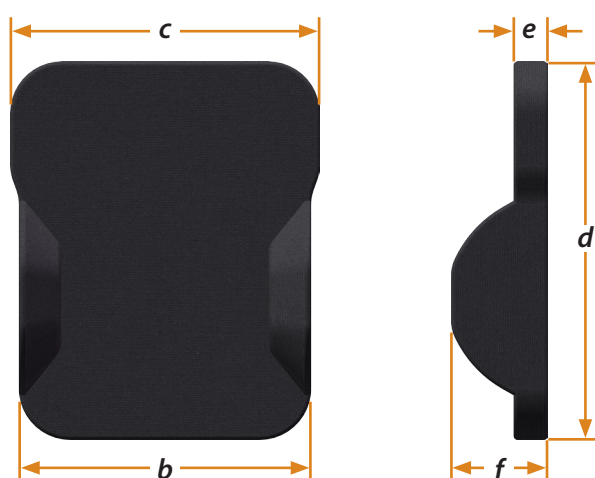

## Klädsel

Ryggdynorna har en heltäckande klädsel av svart stretchig velour. Klädslarna är avtagbara och tvättbara i 60°. Klädsel finns även att beställas separat.

## Tänk på

- Ett för högt ryggssystem kan trycka mot skulderbladen och hindra armrörelser när brukaren kör själv.

## Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.