





HD Motion är utrustad med en vinkelställbar körbygel med stort omfång både uppåt och neråt (A). Körbygeln är klädd med ett mjukt körbygelskydd i ett avtorkbart latexfritt material.

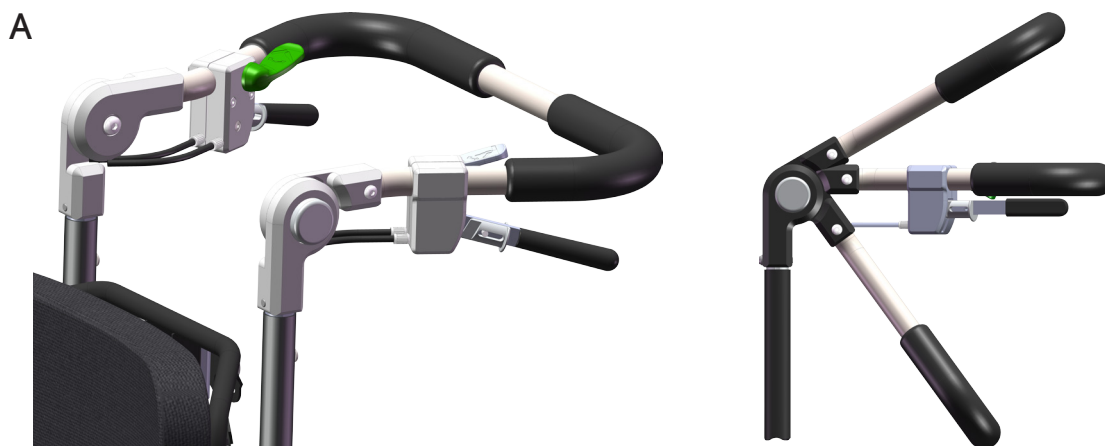


Körbygeln vinkeljustering görs enkelt med hjälp av två knappar (B).

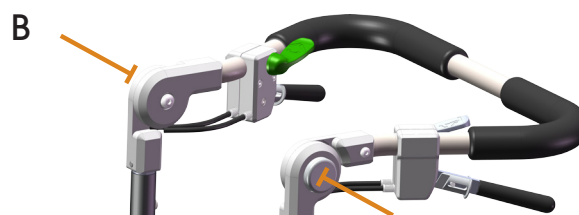

Justering uppåt gör det möjligt att anpassa körbygeln höjd efter vårdarens längd och även nå en bra position om rullstolen ska köras med sits och rygg i tiltat läge (C). Justering nedåt gör det möjligt för vårdaren att komma nära brukaren bakifrån i en vårdssituation (D).

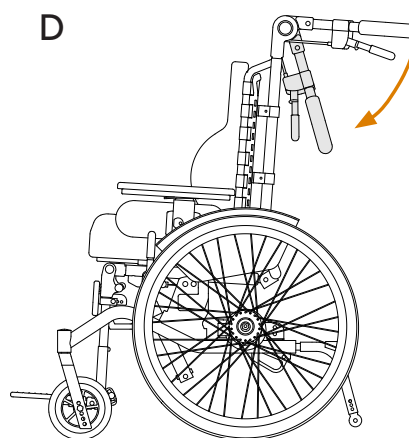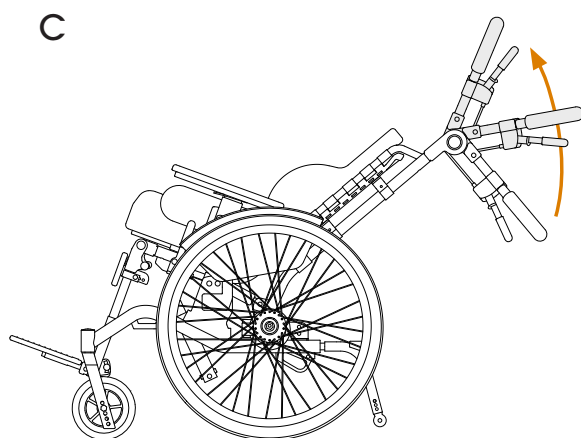

Tilt- och ryggfällningsreglage (E) är lättillgängligt placerade på körbygel. Vårdarbromsens handtag (E) sitter under körbygel. Se *Bruksanvisning HD Motion*, dokument nummer 96701.

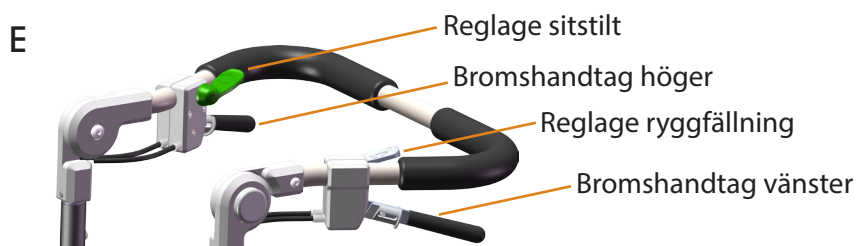


Mått

Tabell 1 - Höjd körbygel, upprätt stol [cm]

	<i>a</i> min	<i>b</i> max
Körbygel höjd	75*	130*

* Vårdaren ska aldrig köra rullstolen med körbygel i min eller max läge. Vid körning ska vårdarens händerna lätt kunna fatta runt körbygel och hantera broms-, tilt- och ryggfällningsreglage.

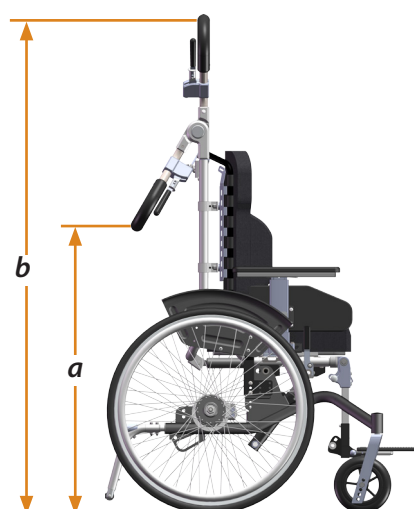

Tänk på

- Iaktta försiktighet när körbygel vinklas uppåt eller nedåt så att vajrar för tilt, ryggfällning och broms löper fritt och inte skadas. Vajrarna ska ligga utmed ryggrören.
- Vårdaren ska aldrig köra rullstolen med körbygel i en obekvämt läge. Händerna ska lätt kunna fatta runt körbygel och hantera broms-, tilt- och ryggfällningsreglage.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.