

Bord används som avställningsyta för brukare som inte kan använda vanligt bord. Bord kan även i vissa fall användas som stödyta.


Till HD Motion finns tre olika bord:

- Brickbord i plast (A), med uttag för bålen. Brickbord används som avställningsyta för tallrik och glas i matsituation eller som stödyta för kommunikations- /aktivitets hjälpmedel. Bordet är försett med en liten sarg som förhindrar föremål att glida av.
- Brickbord i trä (B) används också som avställningsyta/stödyta och är försett med en liten sarg.
- Stödbord (C) är mjukt polstrat och kan användas för att med underarmarna aktivt ta stöd, t ex för att stabilisera överkroppen eller för att skapa trygghet.




Bordsfästen

Borden sätts på plats i bordsfästen (D) som monteras i befintliga skenor i armstöden.

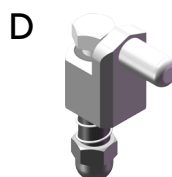

Vid placering av bordet (E) låses detta fast i fästet. Bordet lossas med ett enkelt handgrepp (F) och bordsfästet kan därefter vinklas in under armstödsplattan (G).

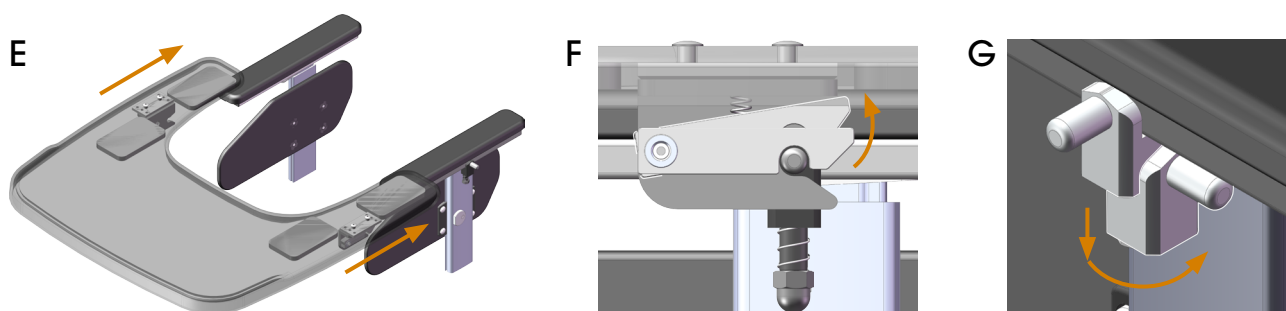

Justering

Borden kan ställas i djup på två olika sätt:

1. Justering av bordsfästernas placering i armstödsskenan (nyckel).
2. Justering av armstödsplattorna i djup genom att föra dessa framåt/bakåt.


Mer information om hur inställningar görs finns i Bruksanvisning/ Monteringsanvisning *Bord och Stödbord*, dokument nummer 96805.

Mått

Tabell 1 - Mått [cm]

	<i>a</i> bredd	<i>b</i> djup total	<i>c</i> djup fram	<i>d</i> max avstånd ryggdyna-bordskant*
Brickbord plast sb30	50	44	25	27
Brickbord plast sb34	54	49	25	32
Brickbord trä sb30	50	41	22	27
Brickbord trä sb34	54	46	22	32
Stödbord sb30	50	37	18	27
Stödbord sb34	54	42	18	32

* **OBS:** Måtten är ca-mått med Planrygg eller lätt slackad Flexirygg.

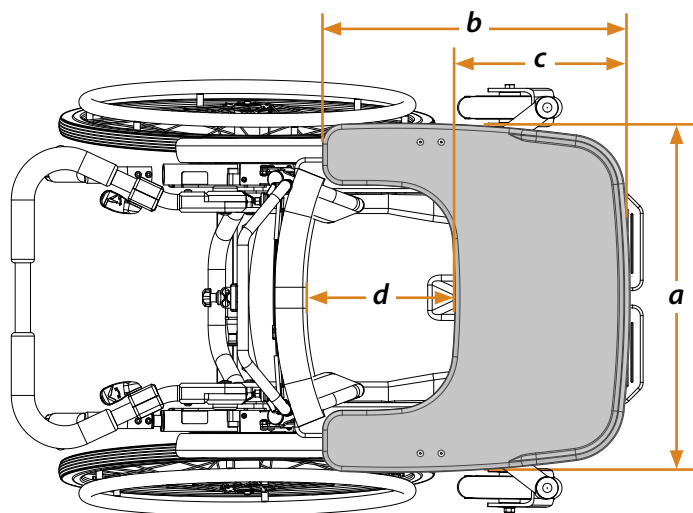

Tänk på

- **OBS:** Det kan finnas restriktioner om att låsa fast brukare i rullstolen mot dennes vilja. Det är upp till förskrivaren att hålla sig informerad om vilka regler som gäller i det enskilda fallet.
- Klämrisk kan finnas om brukaren har ofrivilliga rörelser och armarna kommer emellan bord och kropp.
- Vid användning av bord finns risk för klämning när ryggen vinklas upp från tillbakalutad läge. Var uppmärksam på detta.
- Bord är inte avsett för stora laster.
- Bord bör ej användas som stöd för överkroppen om risk för axelluxation finns.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.