

Vid positionering kan bålstöd användas för att stötta bålen och förbättra brukarens hållning/balans och förhindra att brukaren lutar åt något håll.

Bålstöd till HD Motion finns i två varianter, Bålstöd Standard (A) och Bålstöd Ställbart (B).

Bålstöd standard finns med två olika byglar, fast eller swing. Bålstöd Ställbart finns endast med swingbygel. Swingbygel används för att lätt kunna svänga bort bålstödet, se nedan.



Bålstöd Standard

Bålstöd Standard används som stöd till brukare som lutar åt sidan. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att motverka att denna förvärras.

Bålstöd Ställbart

Bålstöd Ställbart används till brukare som lutar åt sidan och/eller snett framåt. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att fördela trycket över en större yta av bålen.

Inställningar

Höjd

Bålstöden, båda varianterna, regleras i höjd genom att bålstödsfästet monteras i olika hål i ryggstödet (C). Fästet kan sedan finjusteras steglöst 2 cm i höjd (D).

Bredd

Bålstödsudden på båda bålstödsvarianterna ställs i bredd mot brukarens kropp genom att reglera bålstödsbygelns inåt/utåt i bålstödsfästet (E).

Vinkel



På de bålstöd som har swingbygel kan bålstödsudden steglöst anpassas i vinkel in mot brukarens kropp (F). Denna inställning låser swingfunktionen i valt läge.

Kudde (Bålstöd Ställbart)

Kudden kan ställas i djup (G) och steglöst vikas/formas (H) mot brukarens kropp.


Swingbygel

Swingfunktionen tillåter att man med en knapptryckning lätt svänger bort bålstödsudden t ex i en förflyttningssituation (I).

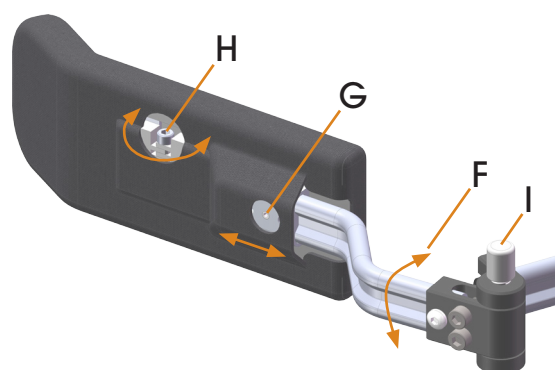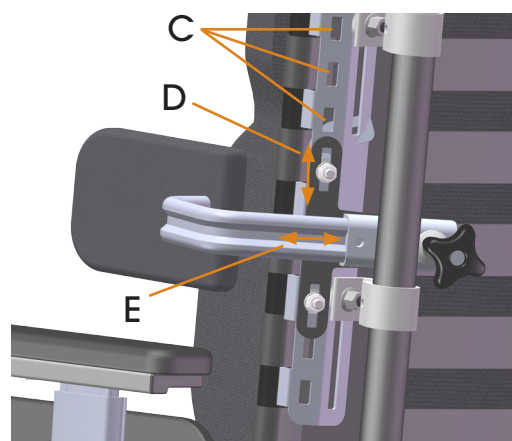

Fästen


Fäste (J) till bålstöd beställs separat.

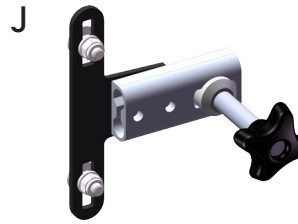

Mått - Bålstödsuddar

Tabell 1 - Mått - Bålstödsuddar [cm]

Modell	a höjd	b djup	tjocklek
Bålstöd Standard	8,5	13	2,5
Bålstöd Ställbart	8,5	22	2,5

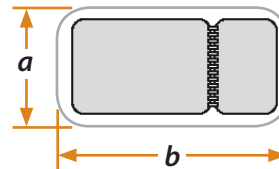


Inställningsmått

Tabell 2 - Inställningsmått för bålstöd [cm]

Chassi- bredd	c min	c max	d min * (lägsta möjliga inställning begränsas av armstödetets höjd)	d max ** (mätt med ryggen i högsta möjliga läge)
sb 30	22	28	26 / 30	38 / 44 / 50
sb 34	26	32	26 / 30	38 / 44 / 50

* Armstöd Låg / Standard.

** Ryggssystem Extra-kort / Kort / Lång.

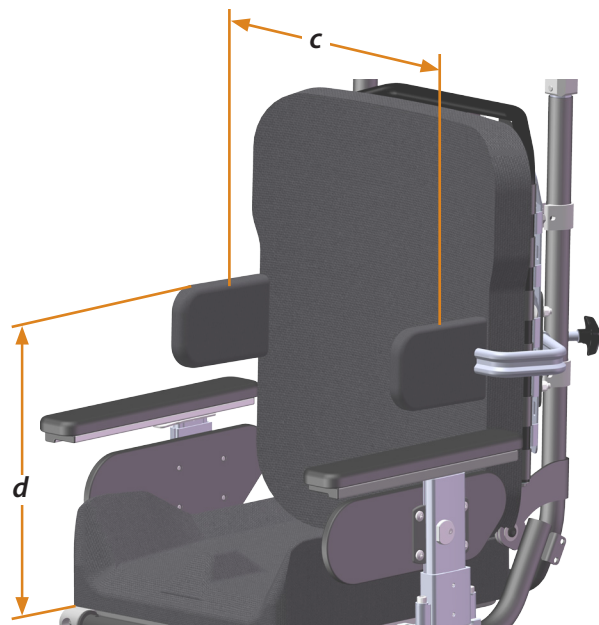

Klädsel

Båda bålstödvarianterna har klädsel i svart Trevira. Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60°. Klädsel finns även att beställa separat.

Tänk på

- Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få ett bra stöd och att bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada.
- Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla då området är tryckkänsligt.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsblankett, dokument nummer 96755.