

Vid positionering kan bålstöd användas för att stötta bålen och förbättra brukarens hållning/balans och förhindra att brukaren lutar åt något håll.


Bålstöd till HD Motion finns i tre varianter, Bålstöd Rak (A), Bålstöd Form (B) och Bålstöd Ställbart (C).

De flesta bålstöd går att få i två modeller, Fast eller med Swing-away.

Bålstöd Rak

Bålstöd Rak används som stöd till brukare som lutar åt sidan. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att motverka att denna förvärras.


Bålstödet finns i en storlek.

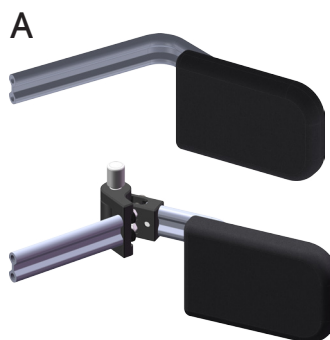

Bålstöd Form

Bålstöd Form används till brukare som lutar åt sidan och/eller snett framåt. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att fördela trycket över en större yta av bålen. Kudden till Bålstöd Form har en lätt böjning och kan formas ytterligare för att bättre passa brukaren.


Bålstödet finns i två storlekar.

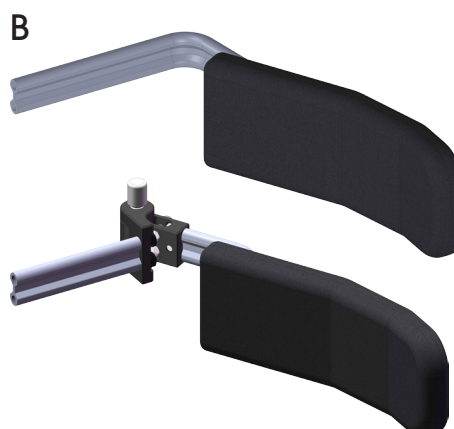

Bålstöd Ställbart

Bålstöd Ställbart används till brukare som lutar åt sidan och/eller snett framåt. Det kan också användas för att kontrollera en flexibel skolios eller för att fördela trycket över en större yta av bålen. Kudden till Bålstöd Ställbart kan ställas i olika lägen.


Bålstödet finns i en storlek.

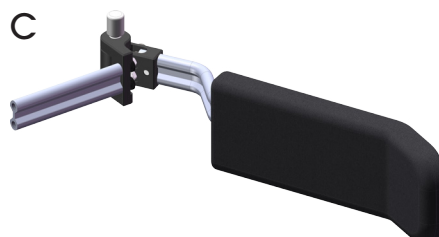


Smal och Bred position

De flesta bålstöd finns med två olika bygglar, smal och bred position (D och E).
Se inställningsmått i Tabell 2.

D

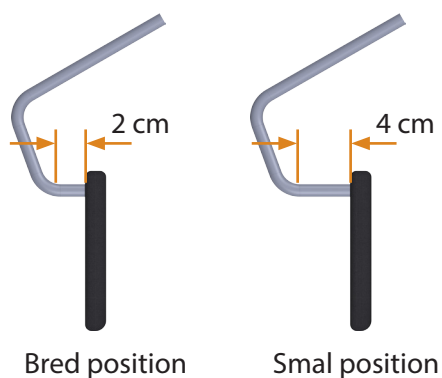

E

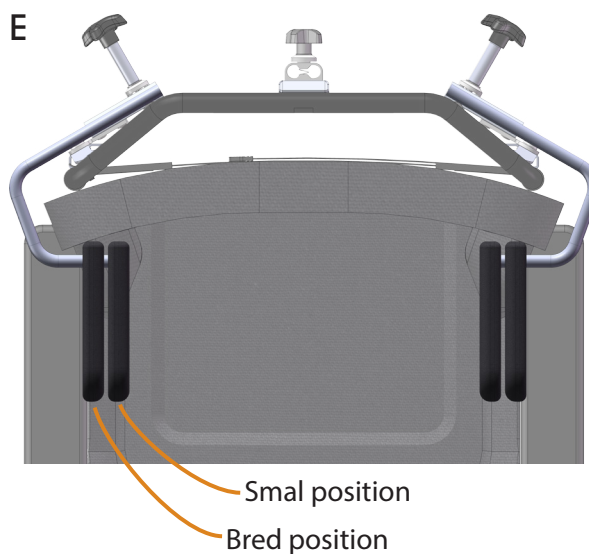


Modell

Bålstöd Rak och Form finns i två modeller, Fast eller med Swing-away. Bålstöd Ställbart finns endast med Swing-away funktion.

Swingfunktionen tillåter att man med en knapptryckning lätt svänger bort bålstödsudden t ex i en förflyttningssituation (F).

F

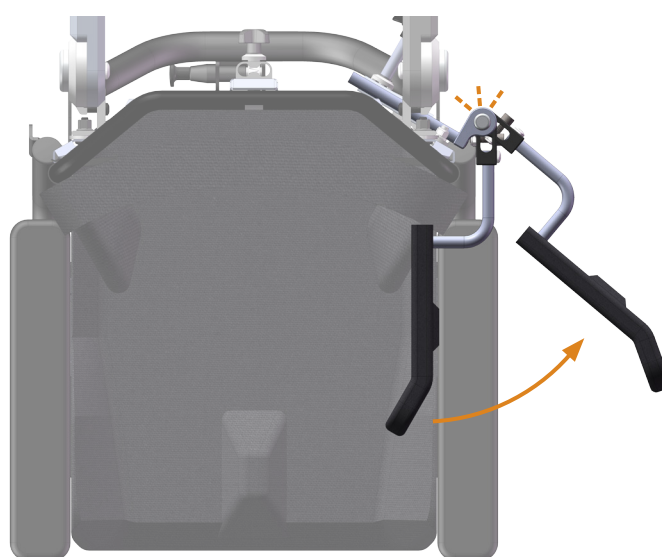

Fästen

Fästen (G) till bålstöd beställs separat.

G



Inställningar

Höjd

Bålstöden, alla varianter, regleras i höjd genom att bålstödsfästet monteras i olika hål i ryggstödet (H). Fästet kan sedan finjusteras steglöst 2 cm i höjd (I).

Bredd

Bålstödsudden på alla bålstödsvarianter ställs i bredd mot brukarens kropp genom att reglera bålstödsbygeln inåt/utåt i bålstödsfästet (J).

Vinkel




På de bålstöd som har swingbygeln kan bålstödsudden steglöst anpassas i vinkel in mot brukarens kropp (M). Denna inställning låser swingfunktionen i valt läge.

Kudde (Bålstöd Form)

Kudden kan vikas/formas (K och L) mot brukarens kropp. Se Monteringsanvisning, dok.nr. 96812.

Kudde (Bålstöd Ställbart)


Kudden kan ställas i djup (O) och steglöst vikas/formas (N) mot brukarens kropp. Se Monteringsanvisning, dok.nr. 96807.

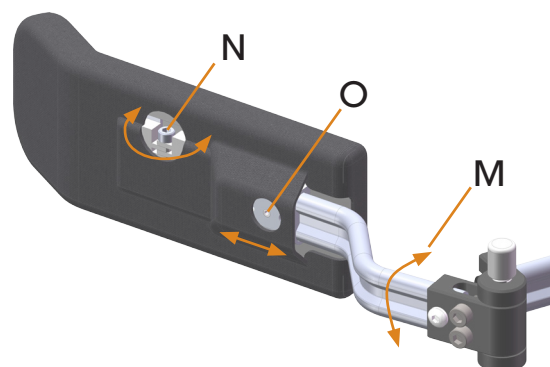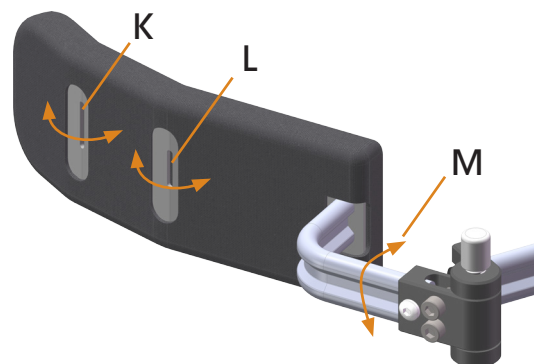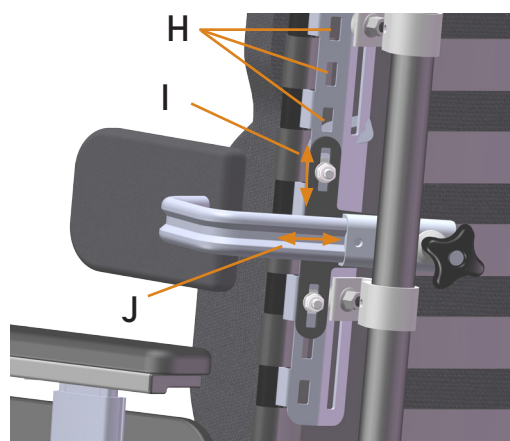

Mått - Bålstödsuddar

Tabell 1 - Mått - Bålstödsuddar [cm]


Modell	a höjd	b djup	tjocklek
Bålstöd Rakt 80	8	13	2,5
Bålstöd Form 60	6	17	2,5
Bålstöd Form 80	8	22	2,5
Bålstöd Ställbart 80	8	22	2,5

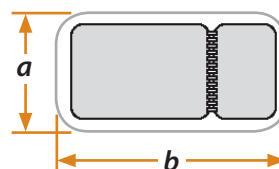

Inställningsmått

Tabell 2 - Bredinställningsmått för bålstöd [cm]

Modell	Chassi- bredd	Bred position		Smal position	
		c min	c max	c min	c max
Rak, Fast	sb 30	22	26	18	22
	sb34	26	30	22	26
Rak, Swing	sb 30	22	28	18	24
	sb 34	26	32	22	28
Form, Fast	sb 30	22	26	18	22
	sb 34	26	30	22	26
Form, Swing	sb 30	22	28	18	24
	sb 34	26	32	22	28
Ställbart, Swing	sb 30	24	30	-	-
	sb 34	28	34	-	-

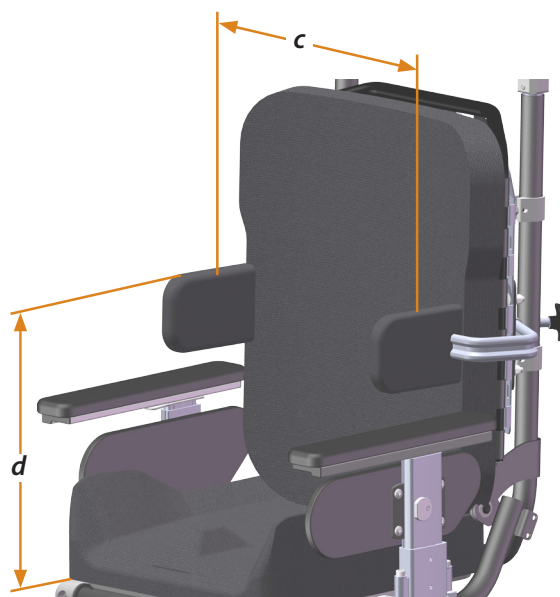

Tabell 3 - Höjdinställningsmått för bålstöd [cm]

Modell	d min (lägsta möjliga inställning begränsas av armstödet höjd)	d max (mätt med ryggen i högsta möjliga läge)
Form 60	24 / 28 *	37 / 43 / 49 **
Form 80, Rak 80, Ställbart 80	26 / 30 *	38 / 44 / 50 **

* Armstöd Låg / Standard.

** Ryggssystem Extra-kort / Kort / Lång.

Klädsel

Alla bålstödvarianter har klädsel i svart Trevira. Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60°. Klädsel finns även att beställa separat.

Tänk på

- Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få ett bra stöd och att bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada.
- Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla då området är tryckkänsligt.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsblankett, dokument nummer 96755.