

Alla positioneringsbälten är avsedda att användas med bältesfästen. Bältesfästen till HD Motion finns i en sats med främre och bakre fästen. Det främre fästet (A) består av en skena med flera fästpunkter där själva fästet för bältesbandet placeras. Det bakre fästet (B) har två spår för olika bandbredd.




Fästena monteras i specifika lägen på rullstolens sitsram, se 1 och 2 i bild C samt Monteringsanvisning *Bältesbeslag sätts*, dok.nr. 96802.

#### 2-punktsbälte

Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av bältesfästen, antingen med en främre placering (1 i bild C) eller en bakre placering (2 i bild C).

#### 4-punktsbälte

Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av två bältesfästen på varje sida, en främre och en bakre placering. Se 1 och 2 i bild C.

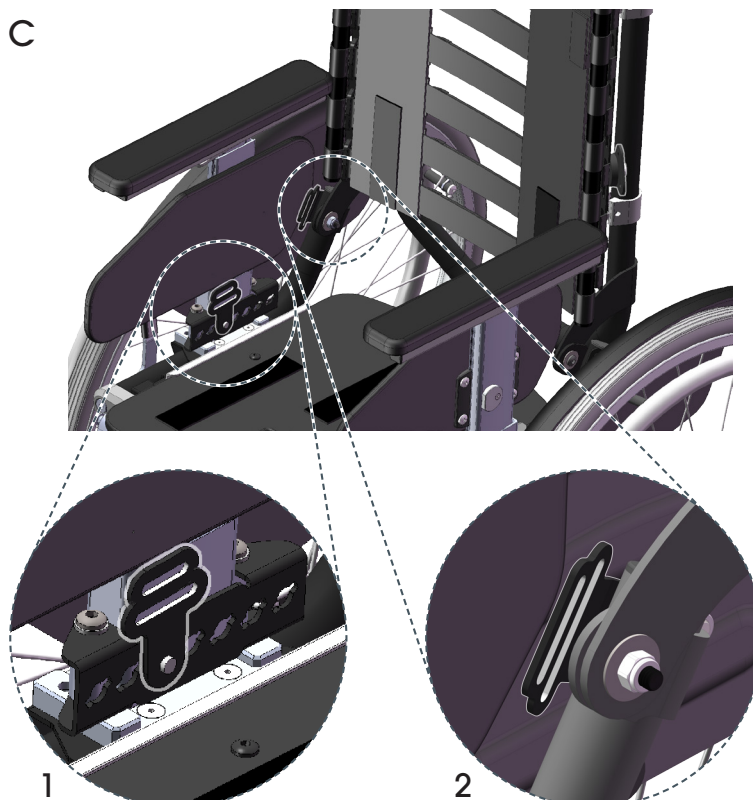

#### Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dok.nr. 96750. Bälten och bältesfästen beställs separat.

Läs även *Tillåtna ändringar inom CE-märkning*, dok.nr. 96724 samt *Förteckning över kombinationsavtal*, dok.nr. 95232.