

HD Motion sittdyna (A) finns i fyra varianter för att passa de fyra chassin som finns. Sittdynan placeras normalt centrerad över sittplattan, så att sittplattan täcks. Dynan fästs på sitsen med kardborrband.



Sittdyna

HD Motions sittdyna är uppbyggd av skum i olika fasthet. Sittdynan har en mjuk sittgrop och en lätt uppbyggnad i mitten fram, för att separera brukarens ben. Dynan är även försedd med lateralstöd för att ge stöd längs med lårbenen.

Klädsel

Sittdynan har ett heltäckande klädsel av svart stretchig velour. Sittytan har motsatt luggriktning som förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Det är även möjligt att få sittdynan med inkontinensklädsel. Då tillkommer ett inkontinensskikt på undersidan av sittytans klädsel.

Båda typer av klädsel är avtagbar och kan tvättas i 60°. Klädsel finns även att beställas separat.

Tänk på

- Sittdynor har en begränsad livslängd beroende på användning. Dynorna ska kontrolleras regelbundet för brukarens komfort och säkerhet. Vid behov byts nedsuttna och uttjänta dynor ut.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.