


Väskkrok monteras runt ryggrörsrör och används för att hänga lättare väskor eller dylikt på. För att inte hindra hjulens rörelser bör väskan placeras centrerat bakom ryggstödet med ett handtag på varje väskkrok.

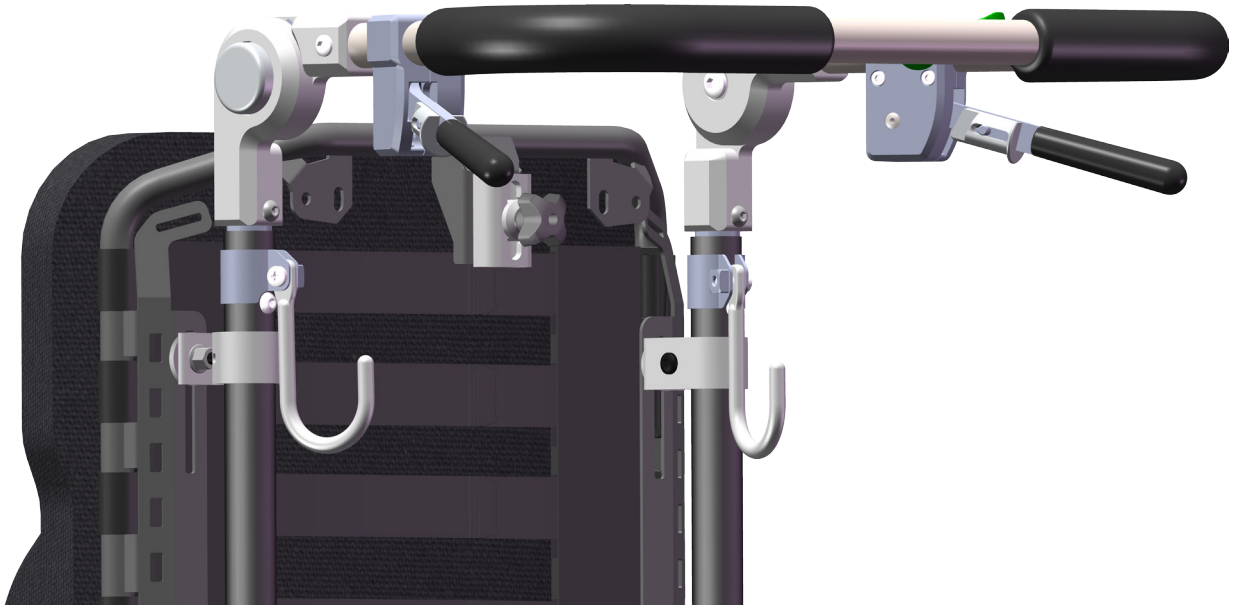

Tänk på

- Tipprisken ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas bakåt och väskkrokarna belastas.
- Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.
- Rullstol med utökad sits och ryggvinkling bör inte utrustas med väskkrokar.
- Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att de är utdragna i aktivt läge.
- Det ligger på vårdarens ansvar att kontrollera tipprisken och se till att tippskydd används.
- Se alltid till att delar på rullstolen, speciellt vajrar, inte skadas då väskkrokan används.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.