


HD Motions reglage för tilt och ryggvinkling är placerade vid körbygeln så att de är lätta att nå. De är även färgmarkerade, grön för tilt samt grå för ryggfällning. Både tilt och ryggfällning styrs av gasfjäder.

Sitstilt

HD Motion har som standard 0-30 graders sitstilt (A).


Möjligheten finns även att ändra till framåttilt, -5 grader, för att t.ex. underlätta uppresning ur rullstolen (B). Tiltbanan går då från -5° - 25°. Information om hur framåttilt uppnås finns i *Teknisk Information*, dok.nr. 96720.

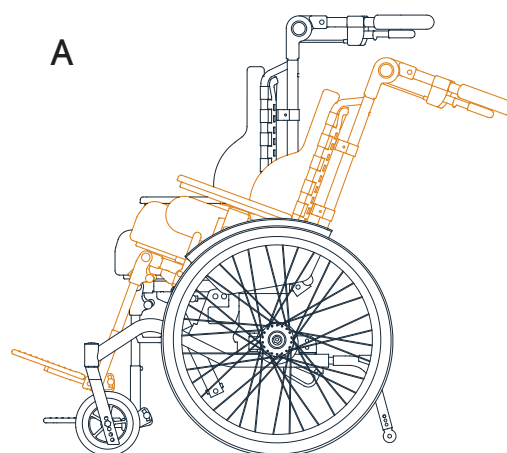

Ryggvinkling


HD Motion har som standard 90-120 graders ryggvinkling (B).

Vid behov kan fast ryggvinkel väljas, t.ex. efter operation, då brukaren har behov av en speciell position i rygg/höftleder. Gasfjädern byts då ut mot en stång. Stången är justerbar i lägen mellan 90-105 grader (verktyg behövs). Information om hur byte mellan gasfjäder och stång görs finns i *Teknisk Information*, dok.nr. 96720.

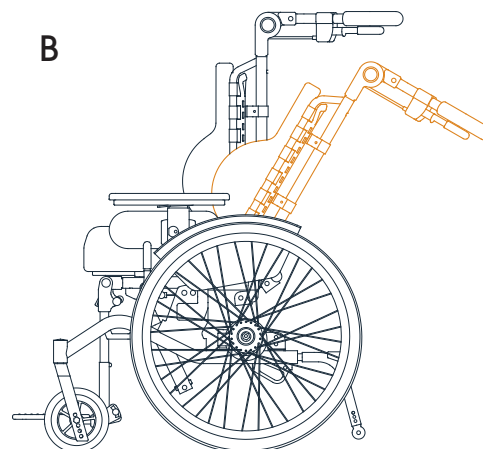

Möjlighet finns även att låsa ryggvinklingen i ett bestämt läge med en spärr som monteras vid reglaget (C).

Befintlig rullstol kan kompletteras med spärr av ryggvinkling. Se Monteringsanvisning *Ryggspärr*, dok.nr. 96816.

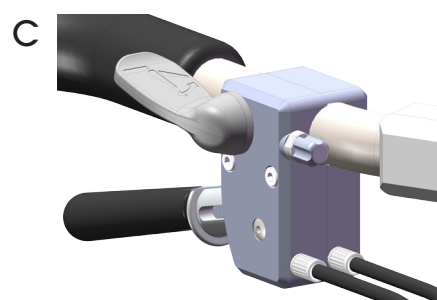

Tänk på

- Utökad framåttilt ökar risken för framåtglijning i rullstolen.