


Bröstselefäste är avsett att användas med bröstselar, sternumstöd och övriga selar för bålen som har fyra fästremmar.

Det består av två ställbara fästen (A) för de övre remmarna, samt två fästögglor (B) för de nedre remmarna.

De övre fästena är inställbara i höjd och vinkel. Vinkeljusteringen används för att justera avståndet mellan fästena.

De nedre fästena fästs i något av de nedre hålen på ryggsystemets sidor.

Bröstselefästet passar till selar med en bandbredd på max 25 mm

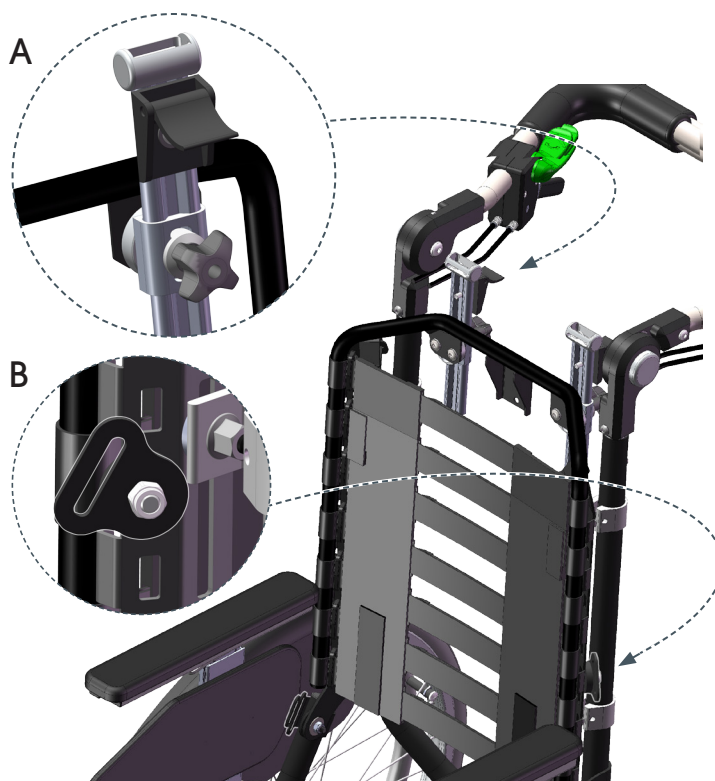


## Mått

De övre fästernas höjdställning påverkar hur brett isär de kan sitta. Ju högre fästena sitter desto större blir det möjliga spannet. Höjden är mätt från ryggsystemets övre kant. Se Infoblad *Ryggsystem* (dok.nr. 96905) för mått på ryggstödets höjd.

Måtten i Tabell 1 gäller både Flexirygg och Planrygg.

Tabell 1 - Mått [cm]

Modell	Sittbredd 30	Sittbredd 34
<b>a</b> max mått högsta läge	17	21
<b>b</b> min mått högsta läge	10	14
<b>c</b> max mått lägsta läge	15	19
<b>d</b> min mått lägsta läge	12	16
<b>e</b> max höjd	10	10
<b>f</b> min höjd	3	3

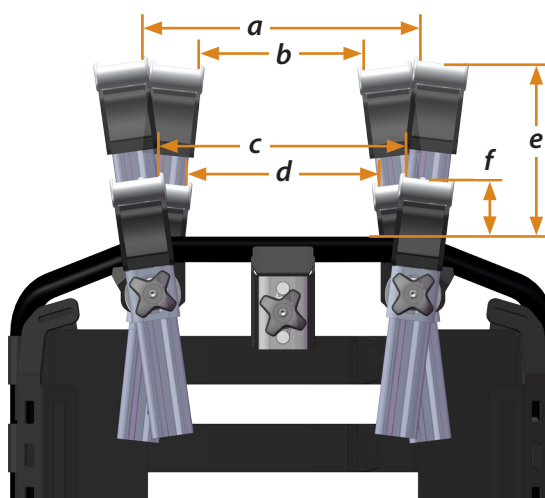

## Tänk på

- Bröstsele skall alltid användas tillsammans med positioneringsbälte för bäckenet.
- Bröstsele används vid positionering och skall inte förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter.
- Speciella restriktioner för användande av bröstsele kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen, [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se).
- Riskbedömning vid användning av bröstsele i enskilda brukares fall skall göras av förskrivare.
- Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för att bröstselen är säkra att använda. Se bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska positioneras i förhållande till brukaren.

## Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.

Läs även *Förteckning över kombinationsavtal*, dok.nr. 95232.