



► Reservdelsslista | Svenska



Innehållsförteckning

0. SAMMANSTÄLLNING




Sammanställning sida 1
Sammanställning sida 2
Sammanställning sida 3

Blad	Sida
------	------

0.1	4
0.2	6
0.3	8

A. UNDERREDE

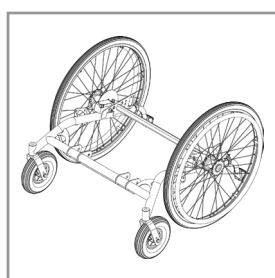


Hjulram 24"
Hjulram 16"
Hjulfäste skivbroms
Länkhjul
Drivhjul 24"
Drivhjul 16"
Tippskydd och styrning
Utlösarenhet tilt
Gasfjäder tilt
Brukarbroms
Tiltplåtar
Ekerskydd

Blad	Sida
------	------

A1.1	10
A1.2	12
A2.1	14
A3.1	16
A4.1	18
A4.2	20
A5.1	22
A6.1	24
A6.2	26
A7.1	28
A8.1	30
A9.1	32

B. SITS

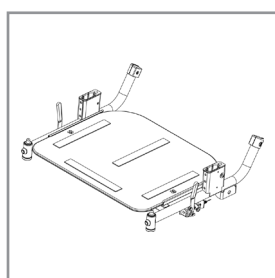


Sitsram
Sittbricka
Gasfjäder rygg

Blad	Sida
------	------

B1.1	34
B2.1	36
B3.1	38

C. RYGG

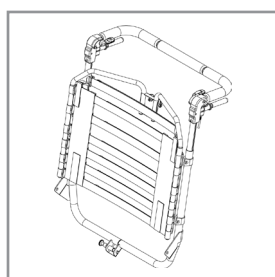


Ryggram
Flexiram och huvudstödsfäste
Körbygel
Körhandtagssida
Vajerreglage
Vajersatser
Bålstödsfäste

Blad	Sida
------	------


C1.1	40
C2.1	42
C3.1	44
C4.1	46
C5.1	48
C5.2	50
C6.1	52

D. BENSTÖD

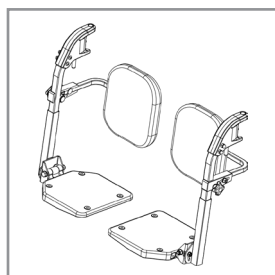


	Blad	Sida
Benstöd sammanställning	D1.1	54
Benstöd vinkelställbart	D1.2	56
Benstöd fast vinkel	D1.3	58
Knäled vinkelställbar	D1.4	60
Knäled frikopplingsbar	D1.5	62
Vadstöd helt	D2.1	64
Vadstöd delat	D2.2	66
Fotstöd helt	D3.1	68
Fotstöd delat	D3.2	70

E. ARMSTÖD

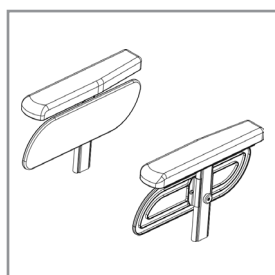


	Blad	Sida
Armstöd	E1.1	72
Armstödsenhet standard	E2.1	74
Armstödenhet bred standard	E2.2	76
Sidostödsenhet standard	E3.1	78

F. TILLBEHÖR

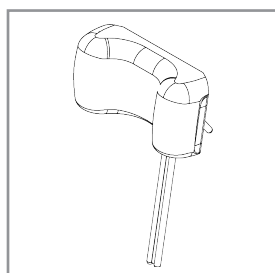

	Blad	Sida
Bålstöd standard litet bred position	F1.1	80
Bålstöd ställbart långt & kort	F1.2	82
Bålstöd Swing standard bred position	F1.3	84
Bålstöd Swing ställbart kort smal & bred position	F1.4	86
Bålstöd Swing ställbart lång smal & bred position	F1.5	88
Led bålstöd Swing	F1.6	90
Bord	F2.1	92
Nackstöd	F3.1	94
Sidostöd och fäste till nackstöd	F3.2	96
Huvudstöd Side & Side+	F3.3	98
Sidostöd och fäste till huvudstöd	F3.4	100
Huvudstöd Basic	F3.5	102
Ställrör huvudstöd/nackstöd	F3.6	104
Fäste bälte, Väskkrok, Profilstopp	F4.1	106

G. DYNOR

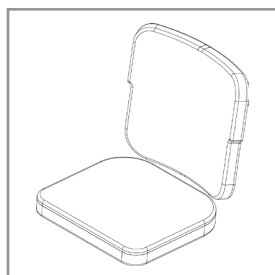

	Blad	Sida
Sittdynor	G1.1	108
Ryggdynor	G2.1	110

Reservdelslista**HD Force****Blad 0.1**

Avser sprängskiss: 0.1


Sammanställning sida 1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		Sittram	Se blad B1.1
2		Ryggram	Se blad C1.1
3		Ryggsystem	Se blad C2.1
4	62194	Ledtapp ramled	
5	81603	Bricka BRB 8,4x16x1,5	
6	81528	Mutter DIN 968 M8 FZ	
7		Gasfjäder rygg	Se blad B3.1
8	81210	Bult M6S M8x45	
9	67859	Ledhylsa gasfjäder	
10	81523	Låsmutter M8 FZ	
11	81256	Bult MVBF M6x20 svart	
12	81671	Bricka pl. 26x3x6.5	
13	81545	Mutter DIN 6926 M6 Flänslåsmutter	

Sammanställning sida 1

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

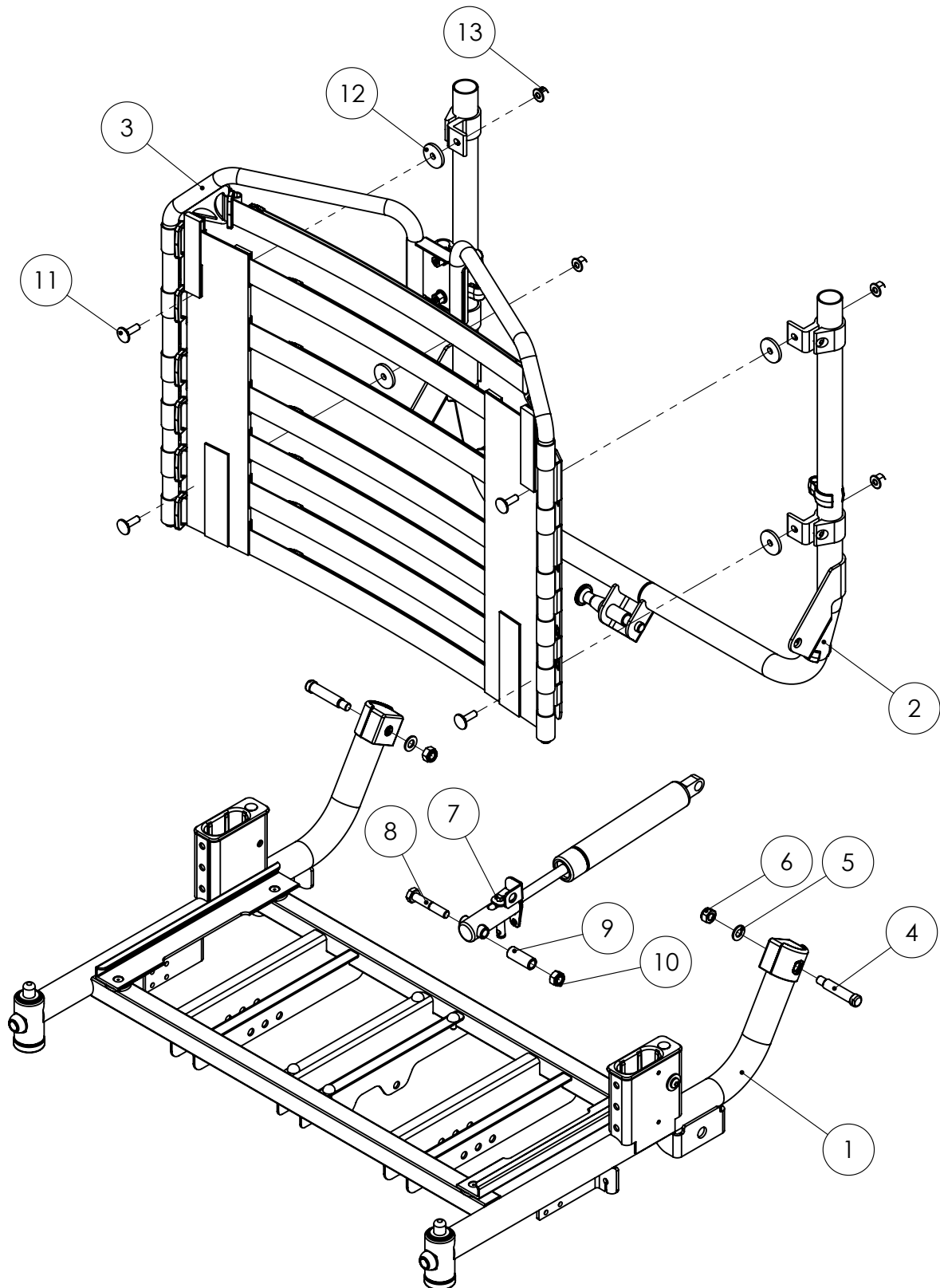

Reservdelslista**HD Force****Blad 0.2**

Avser sprängskiss: 0.2


Sammanställning sida 2

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		Sittram	Se blad B1.1
14		Hjulram 24	Se blad A1.1
		Hjulram 16	Se blad A1.2
15		Tiltplåt	Se blad A8.1
16	81350	Skruv K6S M8x16 SV	
17	81603	Bricka BRB8,4x16x1,5	
18	81523	Låsmutter M8 FZ	
19	81355	Skruv K6S M6x20 SV	
20	81655	Bricka M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 SV	
21	67061	Ledbricka tiltplåt	
22	81522	Låsmutter M6 FZ	
23		Utlösarenhet tilt	Se blad A6.1
24		Gasfjäder tilt kpl	Se blad A6.2
25	81210	Bult M6S M6x20	
26	67859	Ledhylsa gasfjäder	
27	81523	Låsmutter M8 FZ	
28	81287	Skruv MC6S M6x20	
29	81623	Bricka kupad 6x15	
30	67864	Ledbricka	

Sammanställning sida 2

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

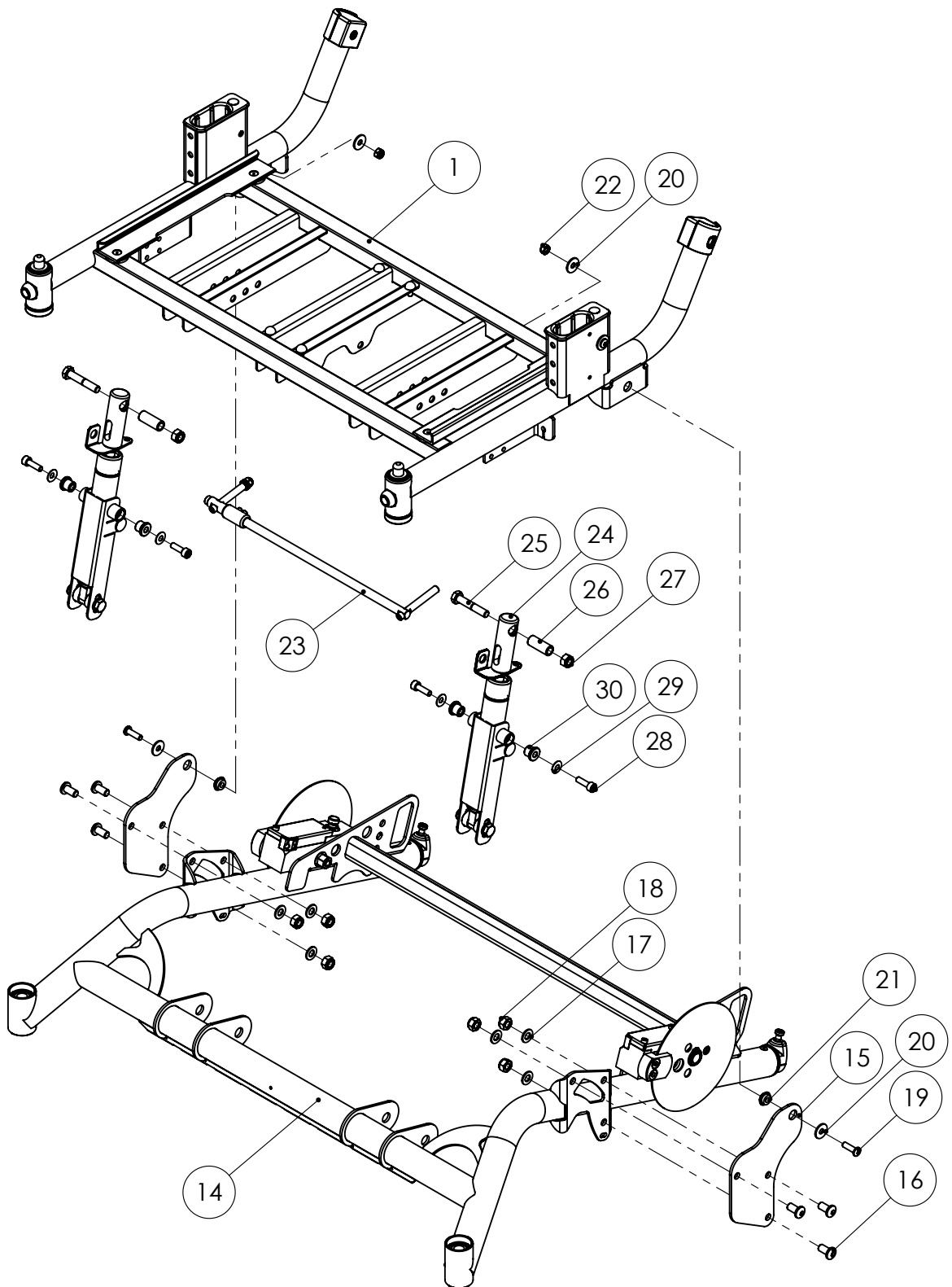

Reservdelslista**HD Force****Blad 0.3**

Avser sprängskiss: 0.3


Sammanställning sida 3

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
31		Hjul 24" Hjul 16"	Se blad A4.1 Se blad A4.2
32		Länkhjul	Se blad A3.1
33	81665	Bricka PS 12x18x1.2	
34	81735	Spårring SGA 12	
35	82102	Täckplugg hjul	
36		Brukarbroms	Se blad A7.1
37	81365	Skruv MC6S M5x12	
38	81621	Bricka KBB 5,3x10	
39		Sittbricka	Se blad B2.1
40		Körbygel	Se blad C3.1
41		Körhandtagssida	Se blad C4.1
42		Vajerreglage rygg	Se blad C5.1
43		Vajerreglage tilt	Se blad C5.1
44	81294	Skruv K6S M6x16 FZ	

Sammanställning sida 3

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

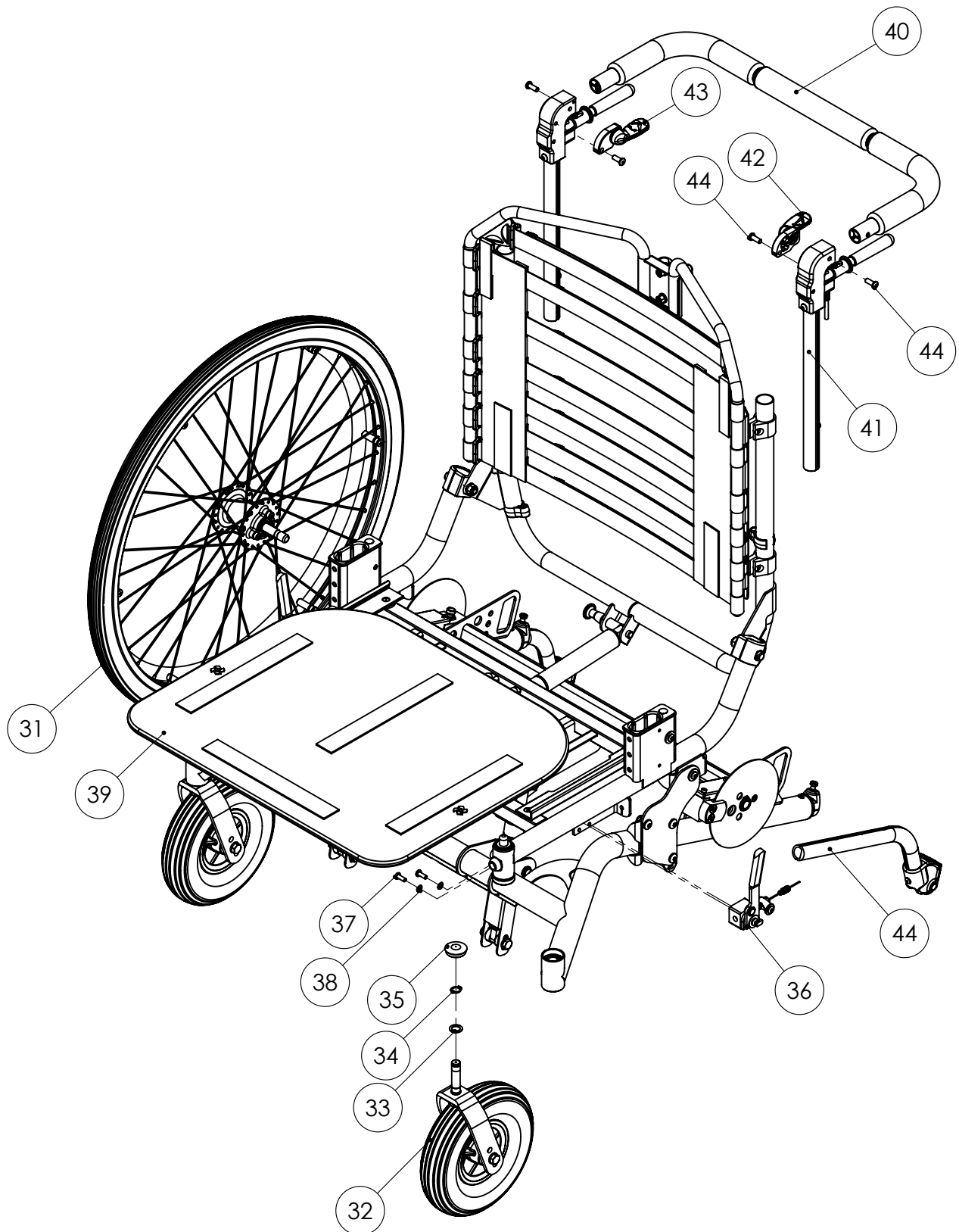

Reservdelslista HD Force**Blad A1.1**


Avser sprängskiss: A1.1 Hjulram 24" kpl

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66501-6	HJULRAM 24 sb54 svart kpl	1-10
	66502-6	HJULRAM 24 sb58 svart kpl	1-10
	66503-6	HJULRAM 24 sb62 svart kpl	1-10
1		HJULRAM 24" sb54 svart	
1		HJULRAM 24" sb58 svart	
1		HJULRAM 24" sb62 svart	
2	82501	KULLAGER 28x12x8	
3	67265	HJULFÄSTE kpl FO	se blad A 2.1
4	67260	HJULFÄSTE kpl FO	se blad A 2.1
5	81247	SKRUV MC6S M8x40 fzb	
6	81395	SKRUV MC6S M8x50 fzb	
7	81543	MUTTER DIN 6926 M8 Flänslåsmutter svart	
8	62530	STYRNING tippskydd kpl	Se blad A 5.1
9	81444	BLINDNIT 4.0x8 AI	
10	66541	TVÄRRÖR sb54 Alum.	
	66542	TVÄRRÖR sb58 Alum.	
	66543	TVÄRRÖR sb62 Alum.	

Hjulram 24"

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

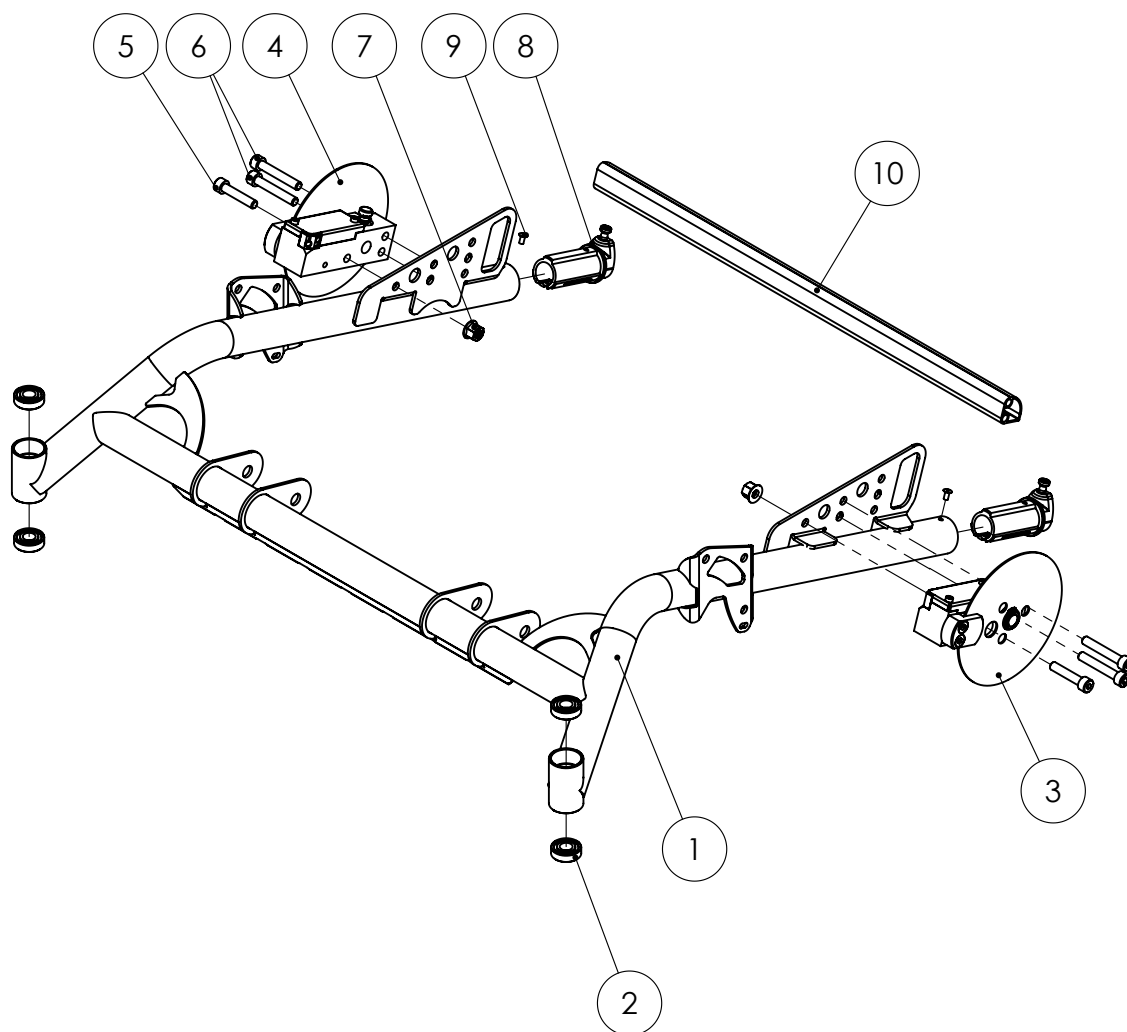

Reservdelslista HD Force**Blad A1.2**


Avser sprängskiss: A1.2 Hjulram 16" kpl

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66551-6	HJULRAM 24 sb54 svart kpl	1-10
	66552-6	HJULRAM 24 sb58 svart kpl	1-10
	66553-6	HJULRAM 24 sb62 svart kpl	1-10
1		HJULRAM 24" sb54 svart	
1		HJULRAM 24" sb58 svart	
1		HJULRAM 24" sb62 svart	
2	82501	KULLAGER 28x12x8	
3	67260	HJULFÄSTE kpl FO	se blad A 2.1
4	67265	HJULFÄSTE kpl FO	se blad A 2.1
5	81247	SKRUV MC6S M8x40 fzb	
6	81395	SKRUV MC6S M8x50 fzb	
7	81543	MUTTER DIN 6926 M8 Flänslåsmutter svart	
8	62530	STYRNING tippskydd kpl	Se blad A 5.1
9	81444	BLINDNIT 4.0x8 AI	
10	66541	TVÄRRÖR sb54 Alum.	
	66542	TVÄRRÖR sb58 Alum.	
	66543	TVÄRRÖR sb62 Alum.	

Hjulram 16"

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

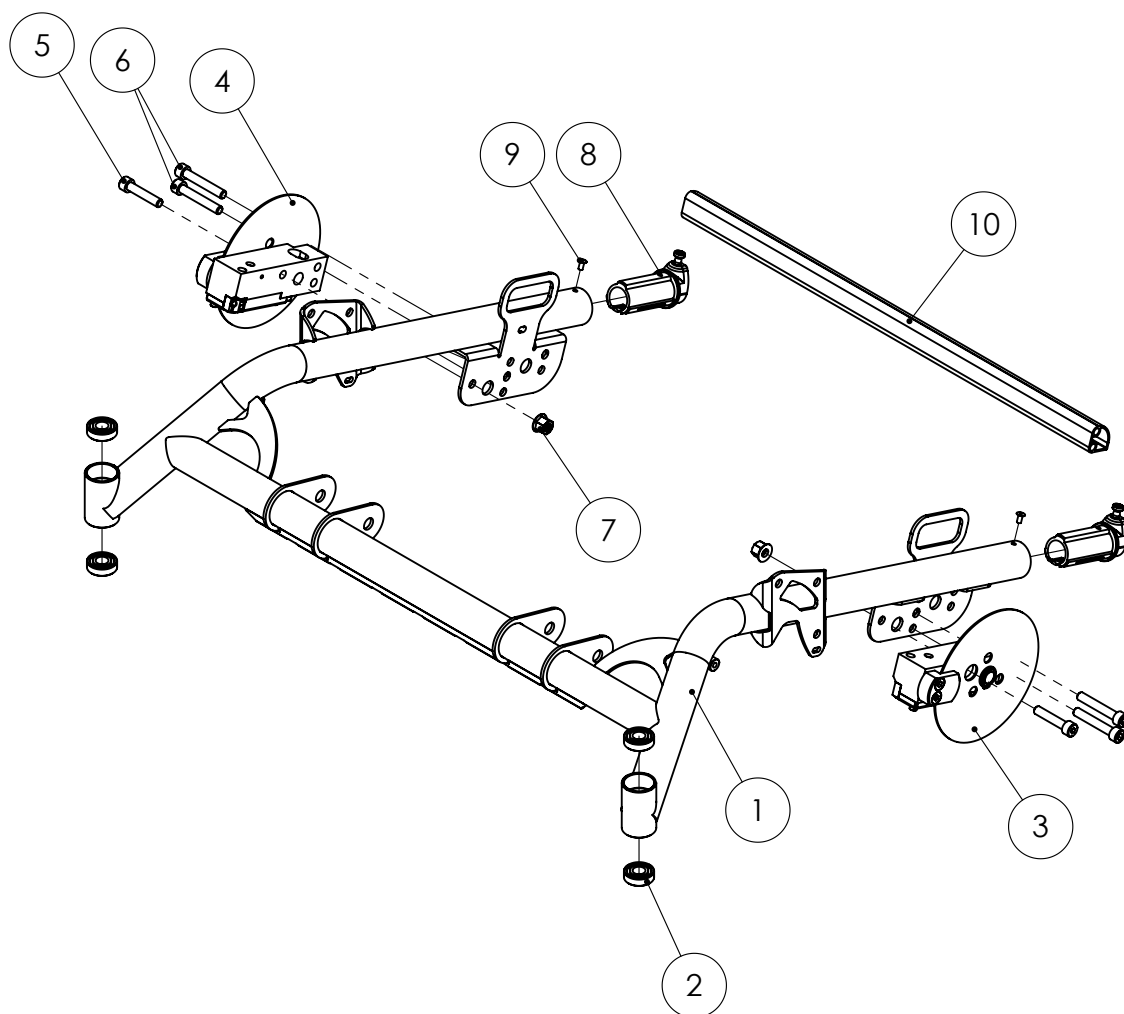

Reservdelslista HD Force**Blad A2.1**


Avser sprängskiss: A2.1 Hjulfäste skivbroms

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67260	HJULFÄSTE kpl FO	1-20
	67265	HJULFÄSTE kpl FO	1-20
1		HJULFÄSTE höger	
1		HJULFÄSTE vänster	
		Vridtapp hö kpl	2-4
		Vridtapp vä kpl	2-4
2		Vridskiva	
3		Vridtapp hö	
3		Vridtapp vä	
4		Skruv P6SS M4x8	
5		Bricka PS 8x14x1 Rostfri	
6		Fjäder skivbroms MO	
7		Skruv MC6S M4x6 fzb	
8		Vajerinfästning hö	
8		Vajerinfästning vä	
9		Skruv MC6S M4x16	
10	37218	Bromskolv med belägg	
11	37217	Bromsok med belägg	
12		Skruv F6S M6x20	
13	67269	Bromsskiva	
14	81644	Bricka PA broms	
15	81736	Spärring SGA 17	
16		Lock hjulfäste hö	
16		Lock hjulfäste vä	
17	81271	SKRUV MC6S M4x12 FZB	
18		LÅSTAPP hjulaxel	
19		FJÄDER snabbaxel	
20	81715	SPÄRRYTTARE RS-6	

Hjulfäste skivbroms

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

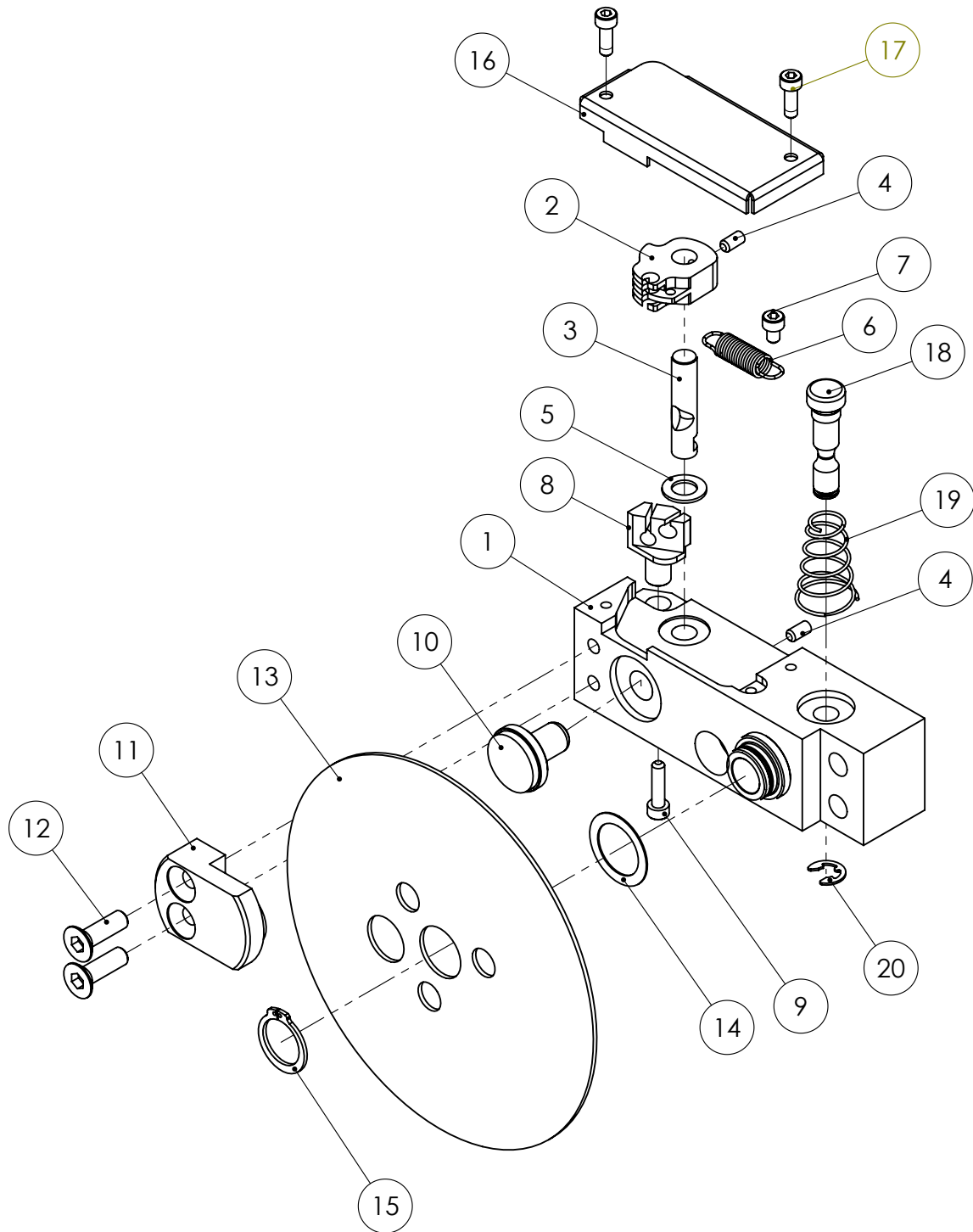

Reservdelslista HD Force**Blad A3.1**


Avser sprängskiss: A3.1 Länkhjul

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		GAFFELTAPP	
2		LÄNKHJULSGAFFEL	
3	81524	MUTTER Låsmutter M10 FZB	
4	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
	67314	LÄNKHJUL 200x50 Flexel kpl med gaffel	5-8
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
5	67338	HJUL 200x50 Flexel navbredd 53mm	
6	81255	BULT M6S M8x75 FZB	
7	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
8	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	

Länkhjul

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

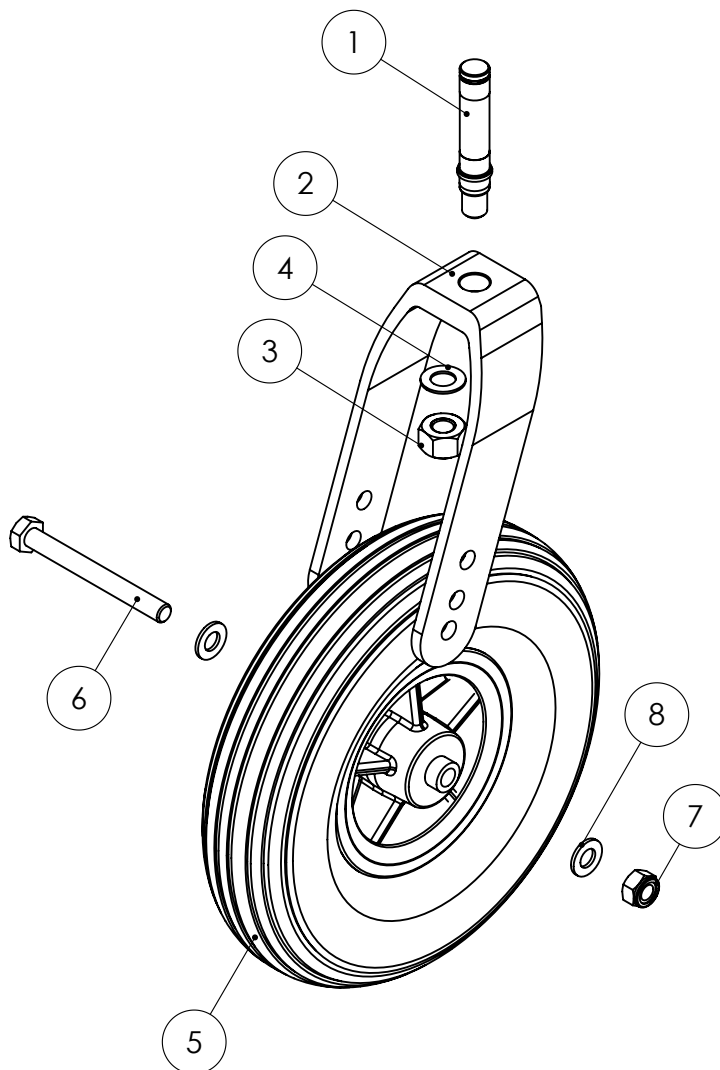

Reservdelslista HD Force**Blad A4.1**


Avser sprängskiss: A4.1 Drivhjul 24"

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67506-2	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring rostfri 6p	1-11
	67506-3	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring plastad 6p	1-11
1	85181	DÄCK 24" (till Flexel)	
1		FLEXELSLANG 24"	
2	15492	DRIVRING 24" Rostfritt 6p	
2	15493	DRIVRING 24" Plastad 6p	
3		DRIVRINGSCLIPS	
4		DISTANS drivring lång	
5		DISTANS drivring kort	
6	81108	SKRUV MRX 5x40 fzb	
7	82501	KULLAGER 28x12x8	
8	67541	HJULAXEL 24-tum	
9	81735	SPÄRRING SGA 12	
10	82102	TÄCKPLUGG hjul	
11		DRIVTAPP 24"-gänga	
	15499-1	DRIVRINGSADAPTER sats till 1st Hjul 6p	12-13
	15499-2	DRIVRINGSADAPTER sats till 2st Hjul 6p	12-13
12		SKRUV MRX 5x25 fzb	
13		DISTANS inflyttad drivring 10x8x5,2 PE Svart	

Drivhjul 24"

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

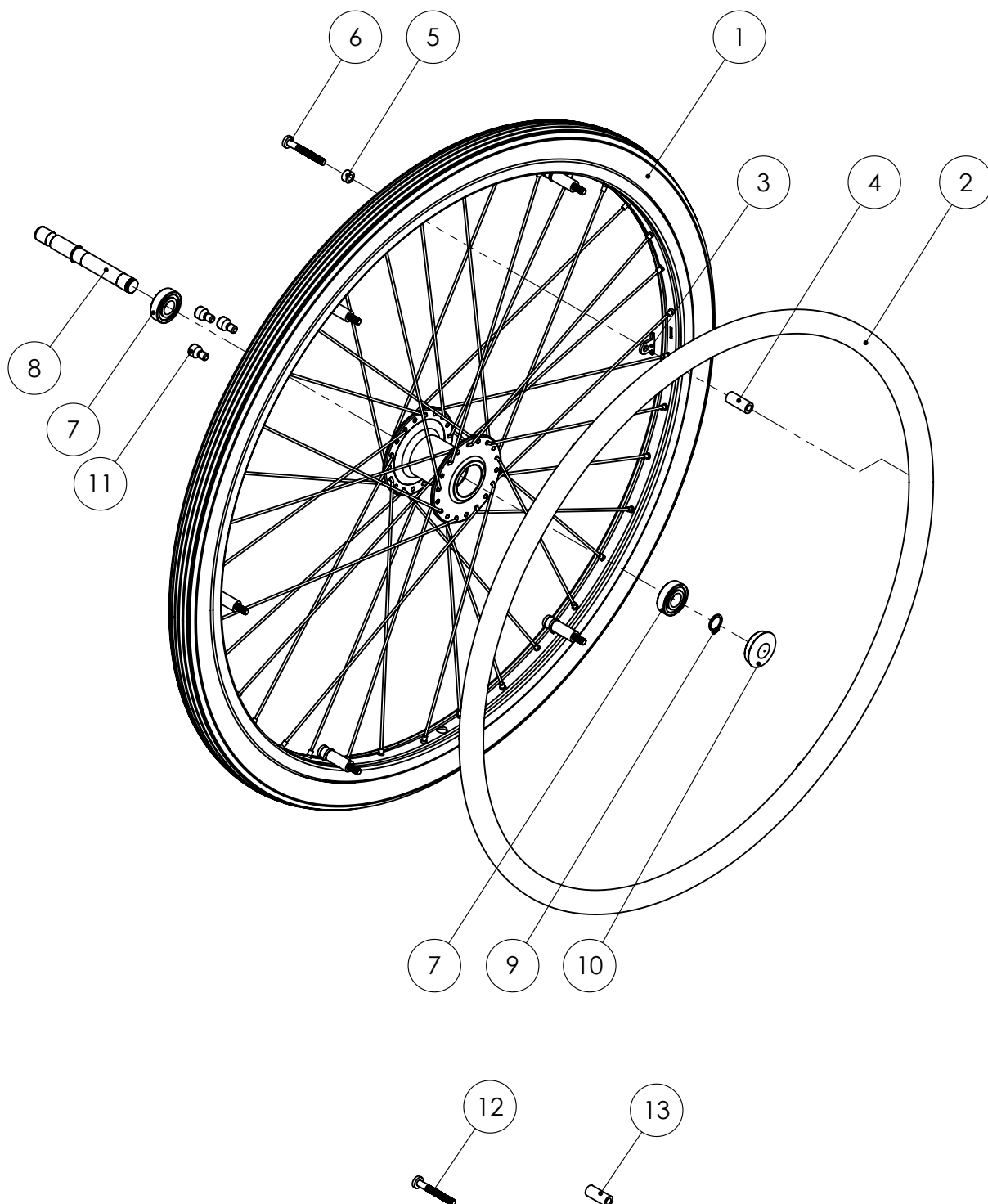

Reservdelslista HD Force**Blad A4.2**


Avser sprängskiss: A4.2 Drivhjul 16"

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67552-1	HJUL 16" FLEXEL med hjulaxel	1-7
		HJUL 16" FLEXEL utan axel	4-7
1	67581	HJULAXEL 16"	
2	81735	SPÅRRING SGA 12	
3	82102	TÄCKPLUGG hjul	
		FÄLG 16" med lager	6-7
4	15652	DÄCK 16" IA 2601 16x1.75 (47-305) (till Flexel)	
4	85161	FLEXISLANG 16"	
5		DRIVTAPP 12"-gänga	
6		FÄLG 16-tum svart	
7	82501	KULLAGER 28x12x8	

Drivhjul 16"

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

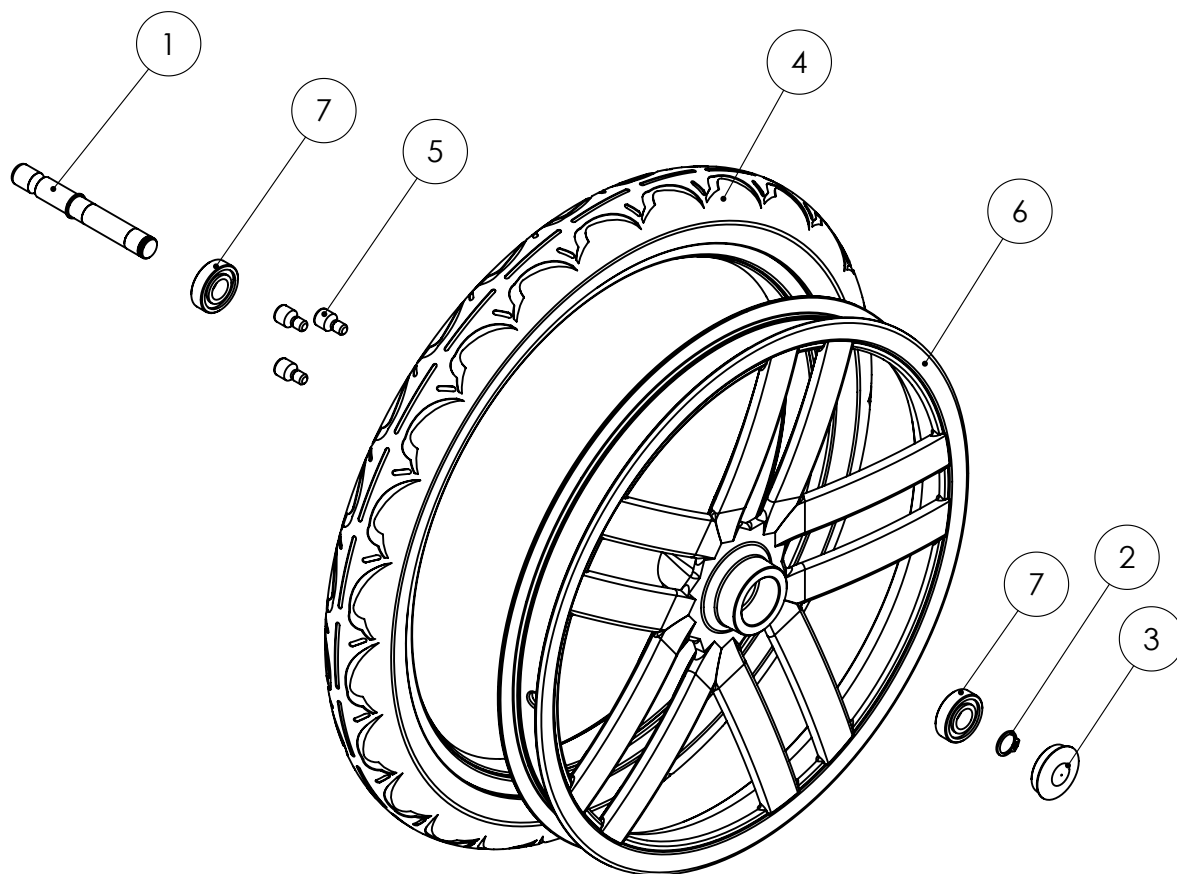

Reservdelslista HD Force**Blad A5.1**


Avser sprängskiss: A5.1 Tippskydd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62681	TIPPSKYDD 16" std	1-5
	62581	TIPPSKYDD 24" std	1-5
		TRAMPKLOSS kpl med rulle	1-3
1		TRAMPKLOSS tippskydd	
2		HÅLNIT KHN 6x28 fzb	
3		MÖBELRULLE	
4		TIPPSKYDDSDOCK 16" Al. profil	
4		TIPPSKYDDSDOCK 24" Al. profil	
5	81449	BLINDNIT 4,8x16ST/S	
	62530	STYRNING tippskydd kpl	6-9
6		STYRNING tippskydd PA svart	
7		LÅSTAPP tippskydd	
8	81710	SPÅRRYTARE RS-4	
9	81871	FJÄDER vred	

Tippskydd och styrning

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

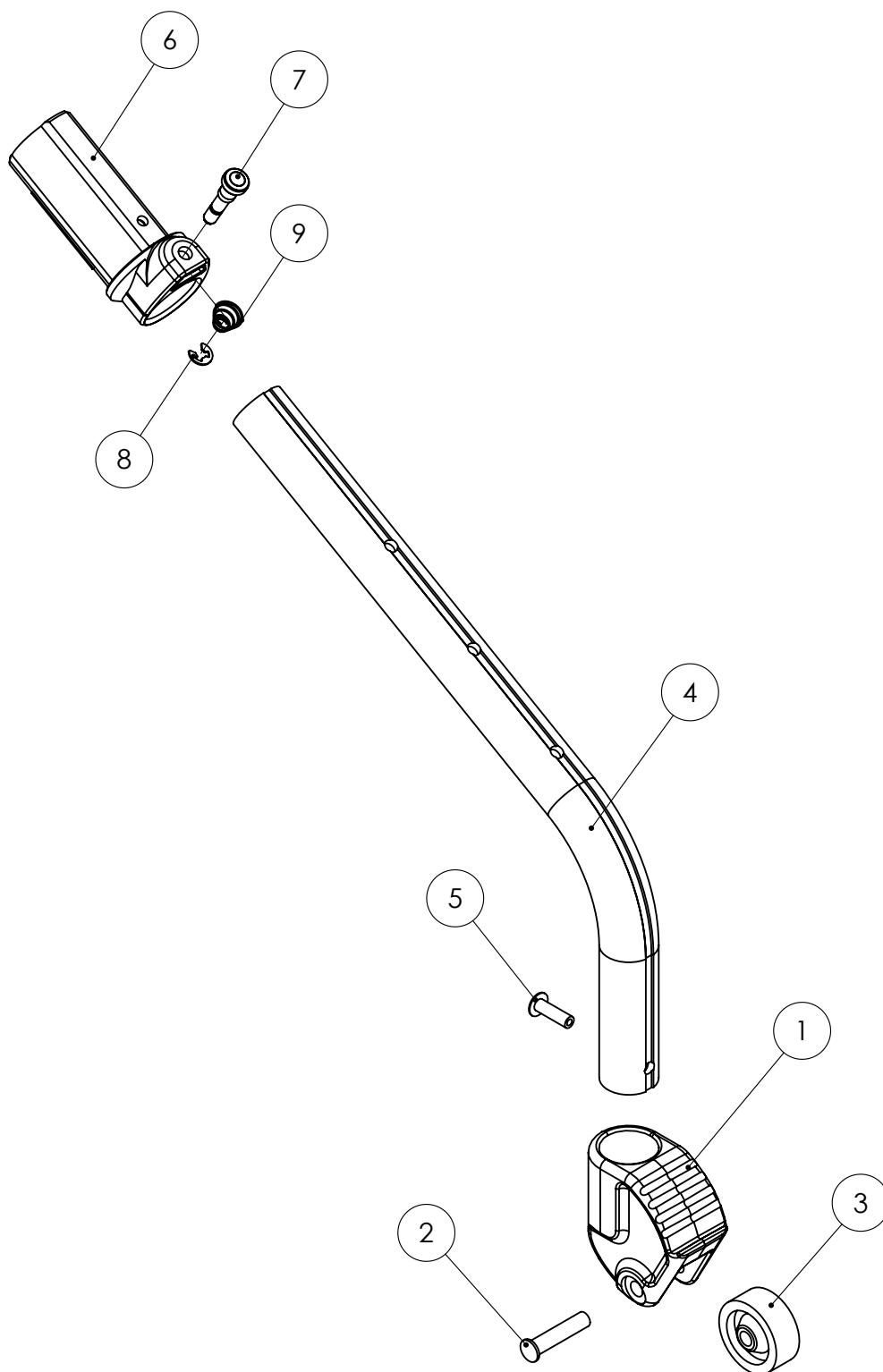

Reservdelslista HD Force**Blad A6.1**


Avser sprängskiss: A6.1 Utlösarenhet tilt

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
		Utlösarenhet tilt	1-8
1		Ledtapp	
2		Stång	
3		Utlösartapp hö	
4		Utlösartapp vä	
5	81315	SKRUV P6SS M6x8	
6	81365	SKRUV MC6S M5x12	
7	81522	LÅSMUTTER M6	
8	81602	BRICKA BRB 6,4x12x1,5	

Utlösarenhet tilt

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

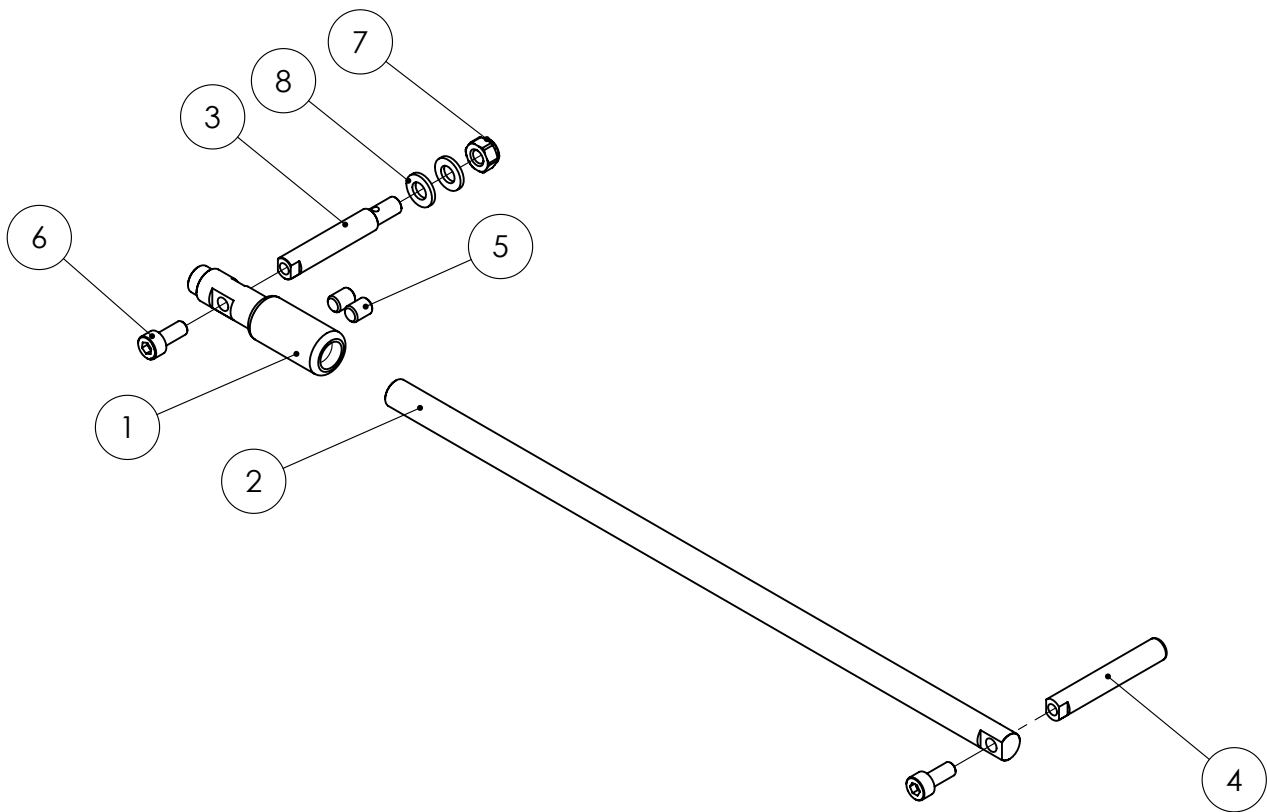


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: A6.2 Gasfjäder tilt
Blad A6.2

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67861	Tiltenhet kpl FO hållare med gasfjäder	1-12
	67851	Gasfjäder Tilt kpl FO	1-5
1	11169	Gasfjäder 200N slow	
2		Stångfäste gasfj kpl	
3		Vinkelplåt gasfjäder	
4	81615	Bricka 10,2x18x1 fzb	
5	81511	Mutter M6M 10x1 mässing	
6		Hållare gasfjäder tilt	
7		Stöd	
8	81210	Bult M6S M8x45	
9	81352	Bult MVBF M6x40 FZB	
10	81522	Låsmutter M6	
11	81523	Låsmutter M8	
12	81603	Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,5	

Gasfjäder tilt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

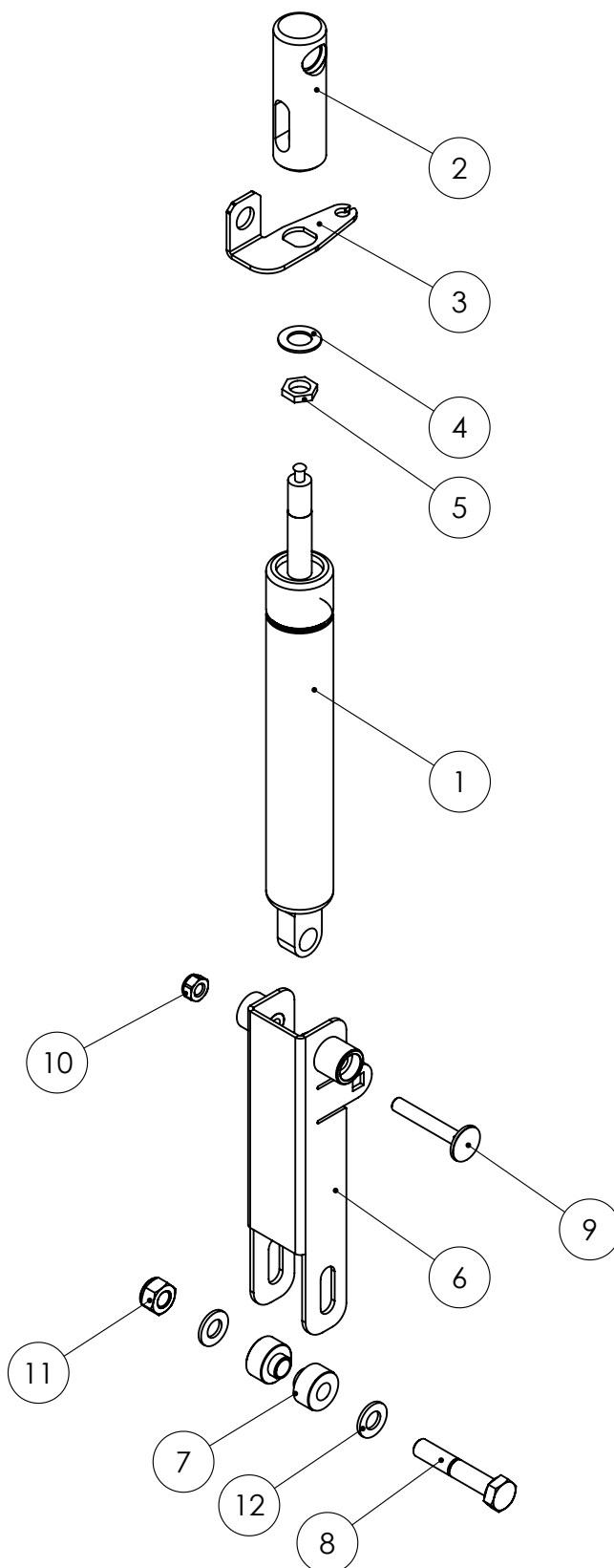


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: A7.1 Brukarbroms
Blad A7.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	37130	Brukarbroms vä kpl	1-14
	37140	Brukarbroms hö kpl	1-14
1		Kloss brukarbroms vä	
1		Kloss brukarbroms hö	
2		Bromsarm brukarbroms	
3		Bromsspak brukarbroms vä	
3		Bromsspak brukarbroms hö	
4		Distansbricka spak brukarbroms	
5		Distansbricka arm brukarbroms	
6		Dragtapp brukarbroms	
7	81355	Skruv K6S M6x20 sv	
8	81363	Skruv K6S M6x22 fzb	
9	81607	Bricka NB 6x16x1 fzb	
10	81627	Bricka vågad 8,4x15	
11	81630	Bricka NB 5x13x1	
12	81645	Bricka PS 8x14x1	
13		Hålnit KHN 5x10 fzb	
14		Handtag Softex 12mm	


Brukarbroms

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

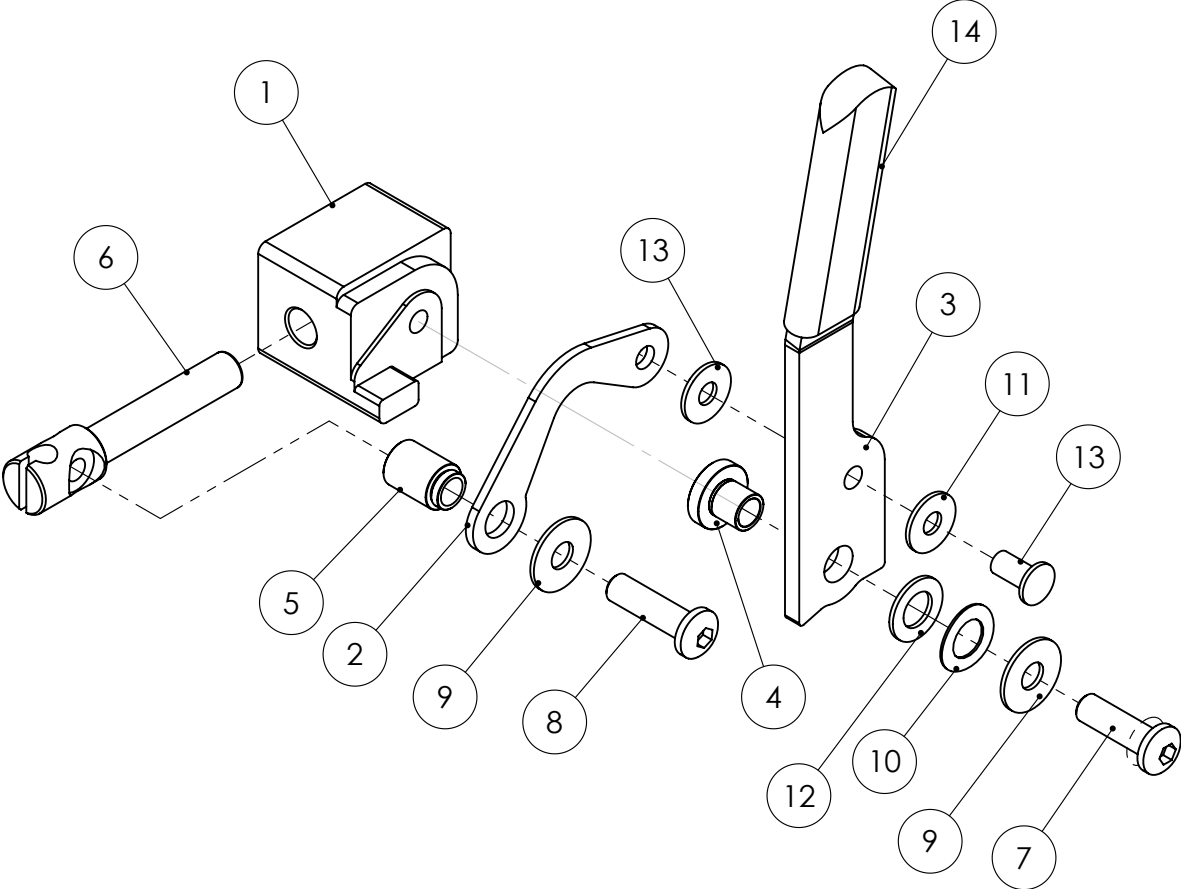

Balansplåtar

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

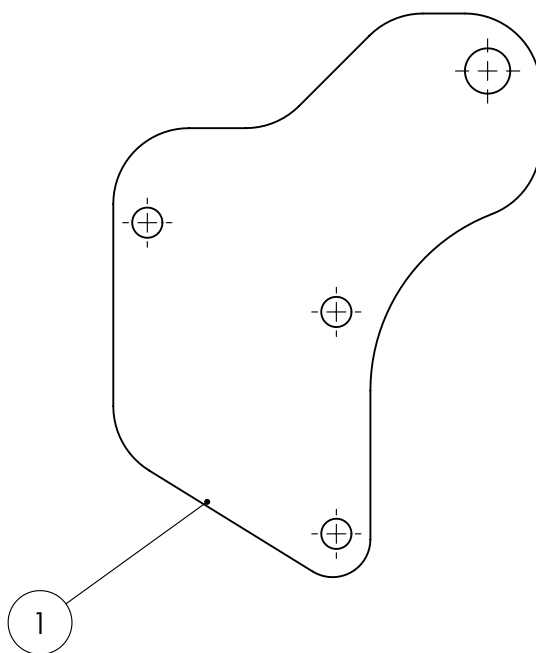

Reservdelslista HD Force**Blad A9.1**


Avser sprängskiss: A9.1 Ekerskydd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1	15471	EKERSKYDD 24tum vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15471)	
2	15472	EKERSKYDD 20tumm vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15472)	

Ekerskydd

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

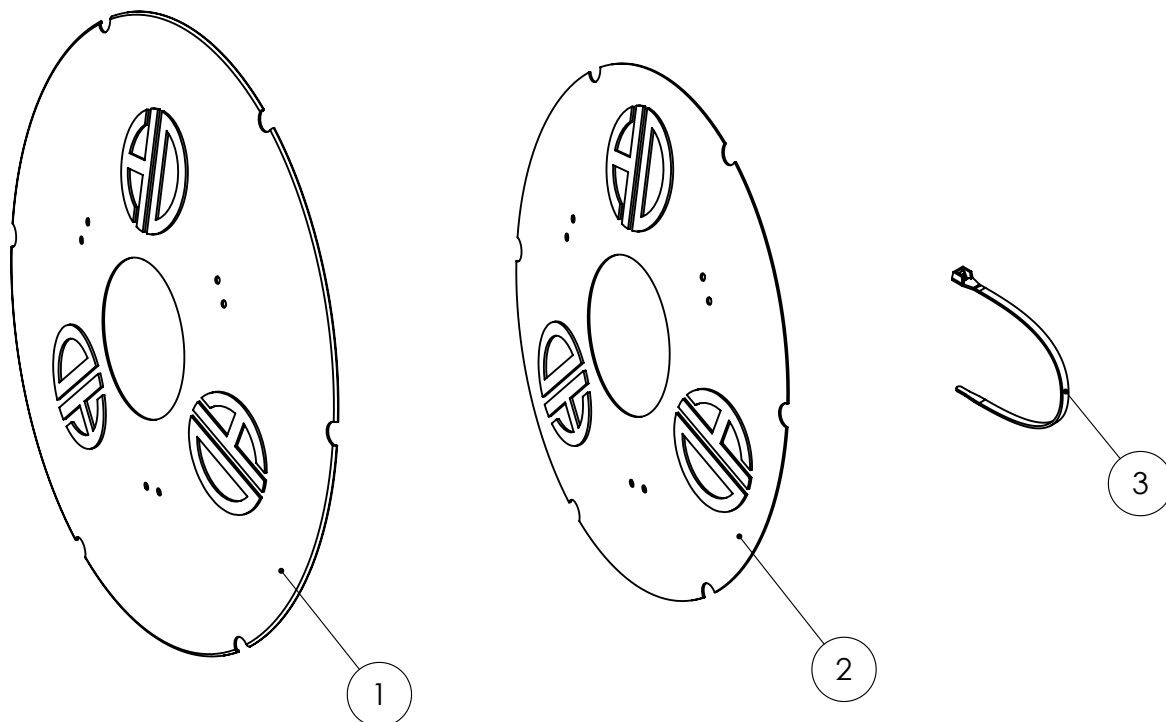

Reservdelslista HD Force**Blad B1.1**


Avser sprängskiss: B1.1 Sitsram standard

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66101-6	SITTRAM sb54 kpl svart utan sittbricka	1-14
	66102-6	SITTRAM sb58 kpl svart utan sittbricka	1-14
	66103-6	SITTRAM sb62 kpl svart utan sittbricka	1-14
1		SITTRAM sb54 svart	
1		SITTRAM sb58 svart	
1		SITTRAM sb62 svart	
2	62181	TAPP benstödsfäste sittram	
3	62182	LEDSCRUV benstödsfäste	
4	62191	LEDKÅPA PA svart	
5	62193	ARMSTÖDSSTYRNING PA svart	
6		SKENA sittram höger	
7		SKENA sittram vänster	
8	81240	SKRUV K6S M6x30 svart	
9	81446	BLINDNIT 4.8x12	
10	81522	MUTTER låsmutter M6	
11	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
12	81671	BRICKA pl. 26x3x6.5	
13	82135	TÄCKPROPP 12,5x5.25	
14	82139	TÄCKPLUGG IKPT 12-10	

Sitsram

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

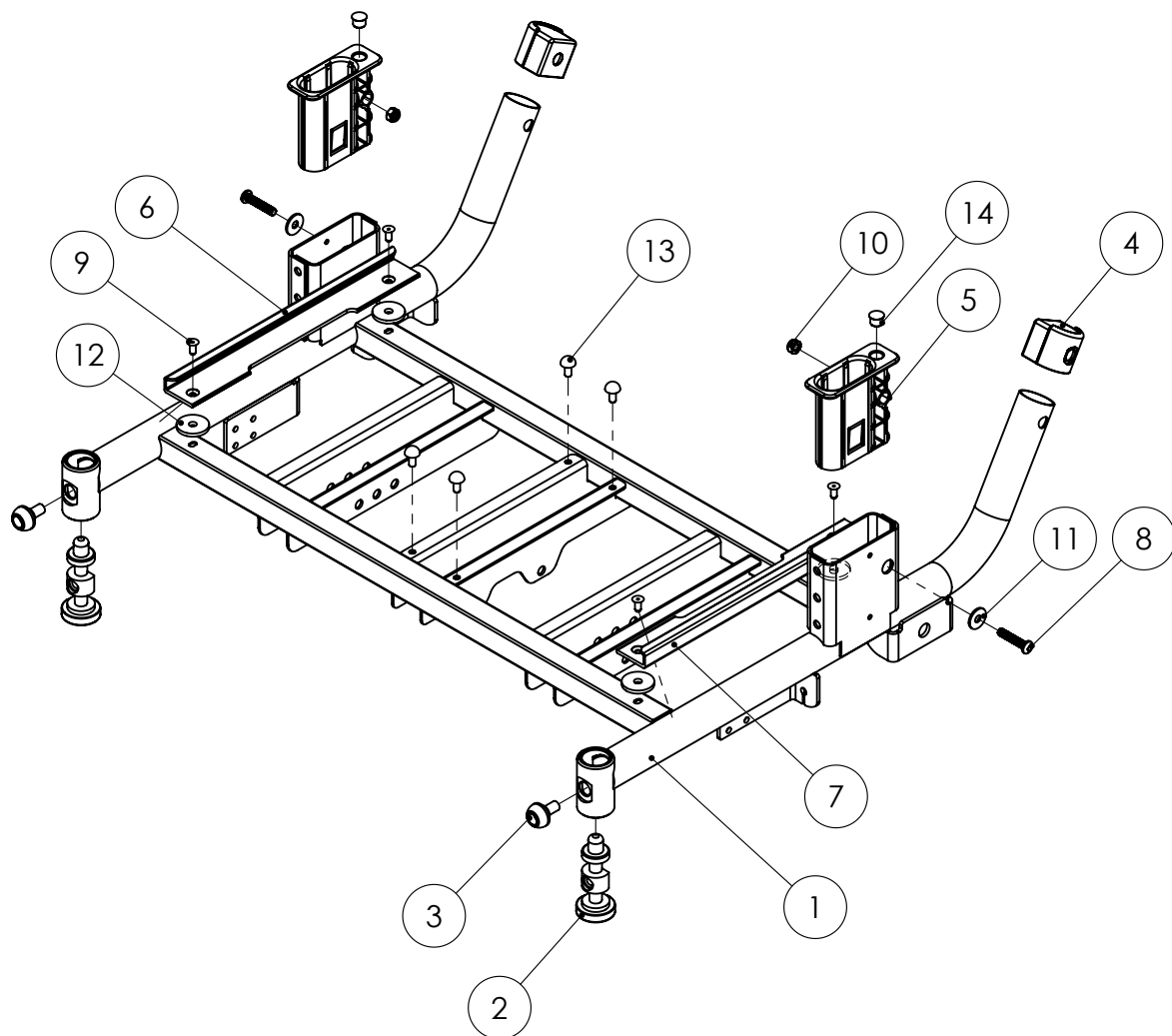

Reservdelslista HD Force**Blad B2.1**


Avser sprängskiss: B2.1 Sittbricka

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68160	Sittbricka sb54 kpl med kardborr	4-7
	68170	Sittbricka sb58 kpl med kardborr	4-7
	68180	Sittbricka sb62 kpl med kardborr	4-7
1	38119	Klämbricka sittbricka	
2	81622	Bricka KBB 6.4x11	
3	81953	Stjärnratt M6x15 Braga 32x21 svart	
4		Sittbricka sb30 lång	
4		Sittbricka sb30 kort	
4		Sittbricka sb34 lång	
6		Islagsmutter M6x9 sv	
7		Kardborrband 30mm	

Sittbricka

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

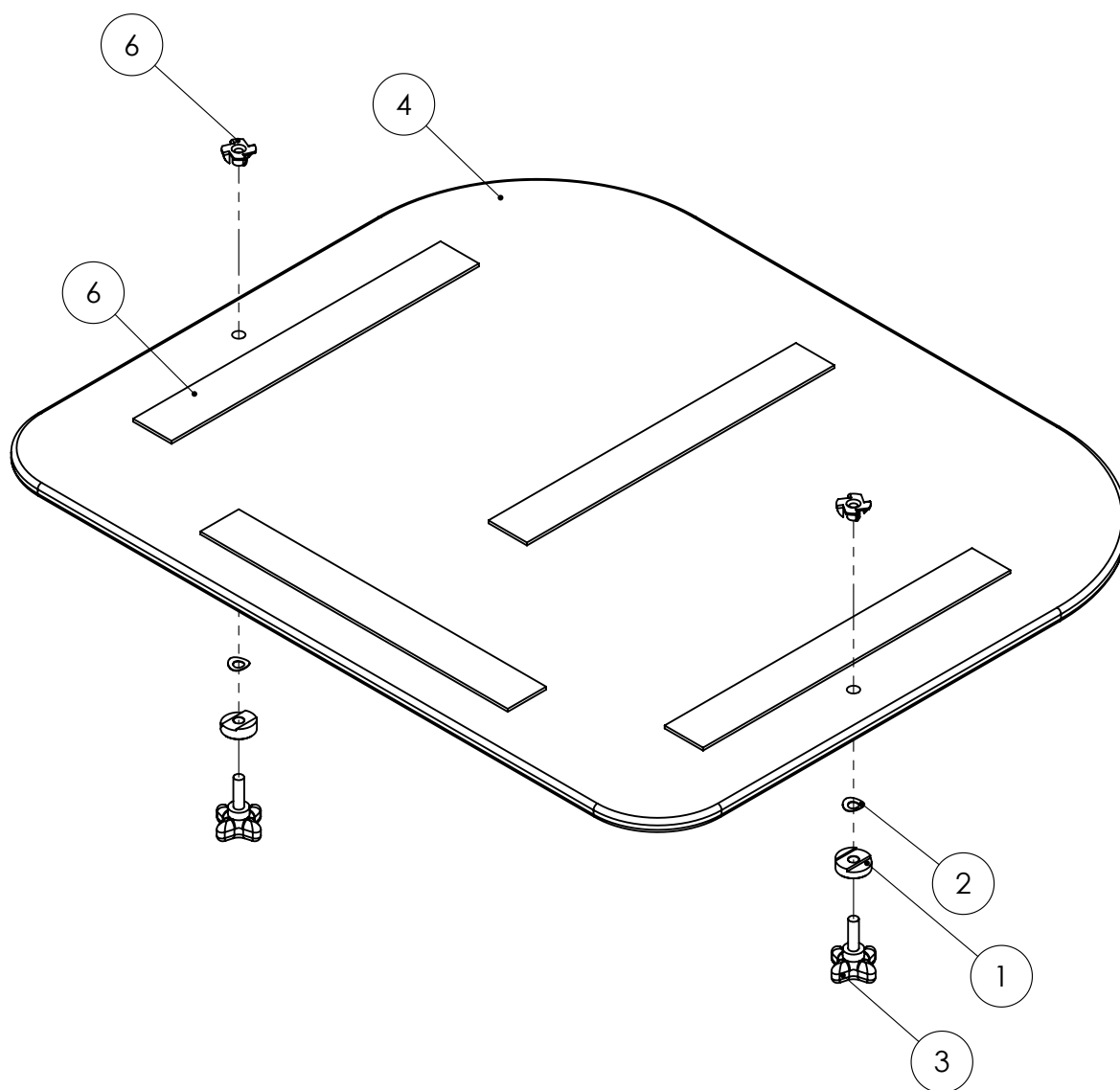


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: B3.1 Gasfjäder rygg
Blad B3.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67731	GASFJÄDER kpl FO-D ryggfällning	1-6
1	11161	GASFJÄDER std	
2		Stångfäste gasfjäder kpl	
3		VINKELPLÅT gasfjäder	
4		UTLÖSARTAPP gasfjäderhållare	
5	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
6	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	

Gasfjäder rygg

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

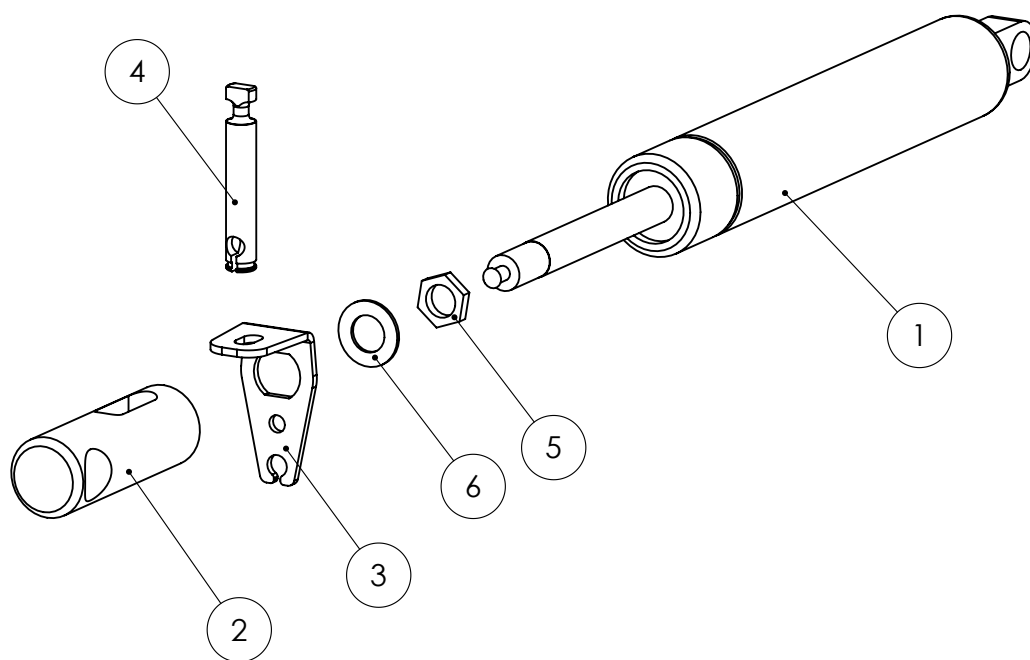


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: C1.1 Ryggram kpl
Blad C1.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66201-6	RYGGRAM sb54 svart kpl med ryggöron	1-6
	66202-6	RYGGRAM sb58 svart kpl med ryggöron	1-6
	66203-6	RYGGRAM sb62 svart kpl med ryggöron	1-6
1		RYGGRAM sb54 Svart	
1		RYGGRAM sb58 Svart	
1		RYGGRAM sb62 Svart	
2	62231-6	RYGGÖRA flexi 2010 svart lackerad	
3	81354	SKRUV K6S M6x12 Svart	
	10225	SPRINT med fjäder och knapp, sats	4-6
4		SPRINT	
5		KNOPP 22-M6	
6		FJÄDER ryggfällningssprint	
7	82470-5	WIRECLIP diam. 25 mm	

Ryggram kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

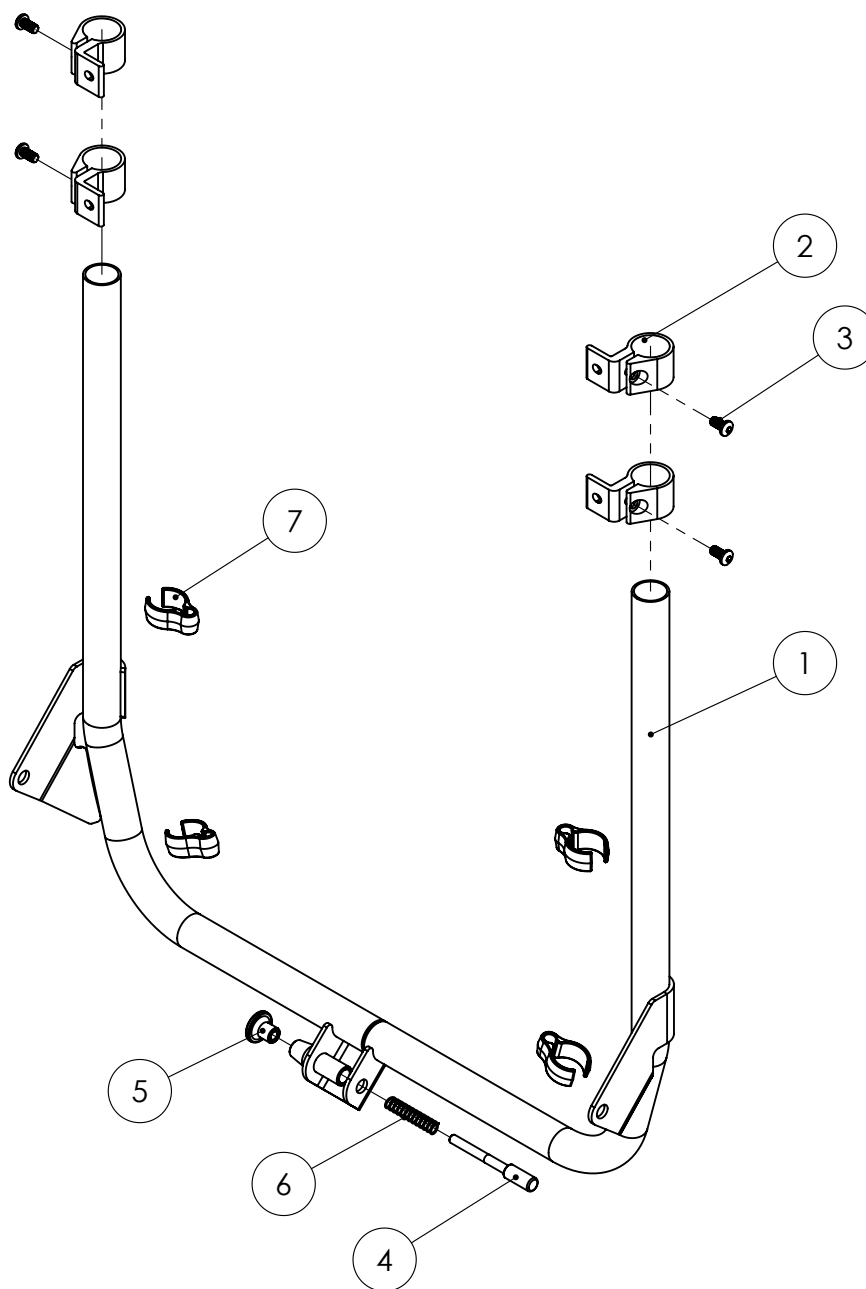

Reservdelslista HD Force**C2.1**


Avser sprängskiss: C2.1 Flexiram och huvudstödsfäste

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66251	Flexiram sb54 kpl med remmar	1-9
	66252	Flexiram sb58 kpl med remmar	1-9
	66253	Flexiram sb62 kpl med remmar	1-9
	66255	Flexiram sb54 kpl Förlängd +10cm med remmar	1-9
	66256	Flexiram sb58 kpl Förlängd +10cm med remmar	1-9
	66257	Flexiram sb62 kpl Förlängd +10cm med remmar	1-9
1		Flexiram sb54 Svart	
1		Flexiram sb58 Svart	
1		Flexiram sb62 Svart	
1		Flexiram sb54 Förlängd +10cm Svart	
1		Flexiram sb58 Förlängd +10cm Svart	
1		Flexiram sb62 Förlängd +10cm Svart	
2	49641-6	RYGGREM kort sb54 Flexirygg	
2	49642-6	RYGGREM kort sb58 Flexirygg	
2	49643-6	RYGGREM kort sb62 Flexirygg	
3	49641-7	RYGGREM lång sb54 Flexirygg	
3	49642-7	RYGGREM lång sb58 Flexirygg	
3	49643-7	RYGGREM lång sb62 Flexirygg	
4	49243-1	Ryggstycke Flexi vä	
4	49244-1	Ryggstycke Flexi vä Förlängd	
5	49243-2	Ryggstycke Flexi hö	
5	49244-2	Ryggstycke Flexi hö Förlängd	
6		Bussning Flexiram	
7		Tryckknapp kula	
8		Blindnit 3,2x9,5	
9	82132	TÄCKPLUGG 16/12.5-14	
	66290	Huvudstödsfäste kpl med mutter	10-11
10		Huvudstödsfäste kpl	
11	81545	Mutter DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	

Flexiram och huvudstödsfäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

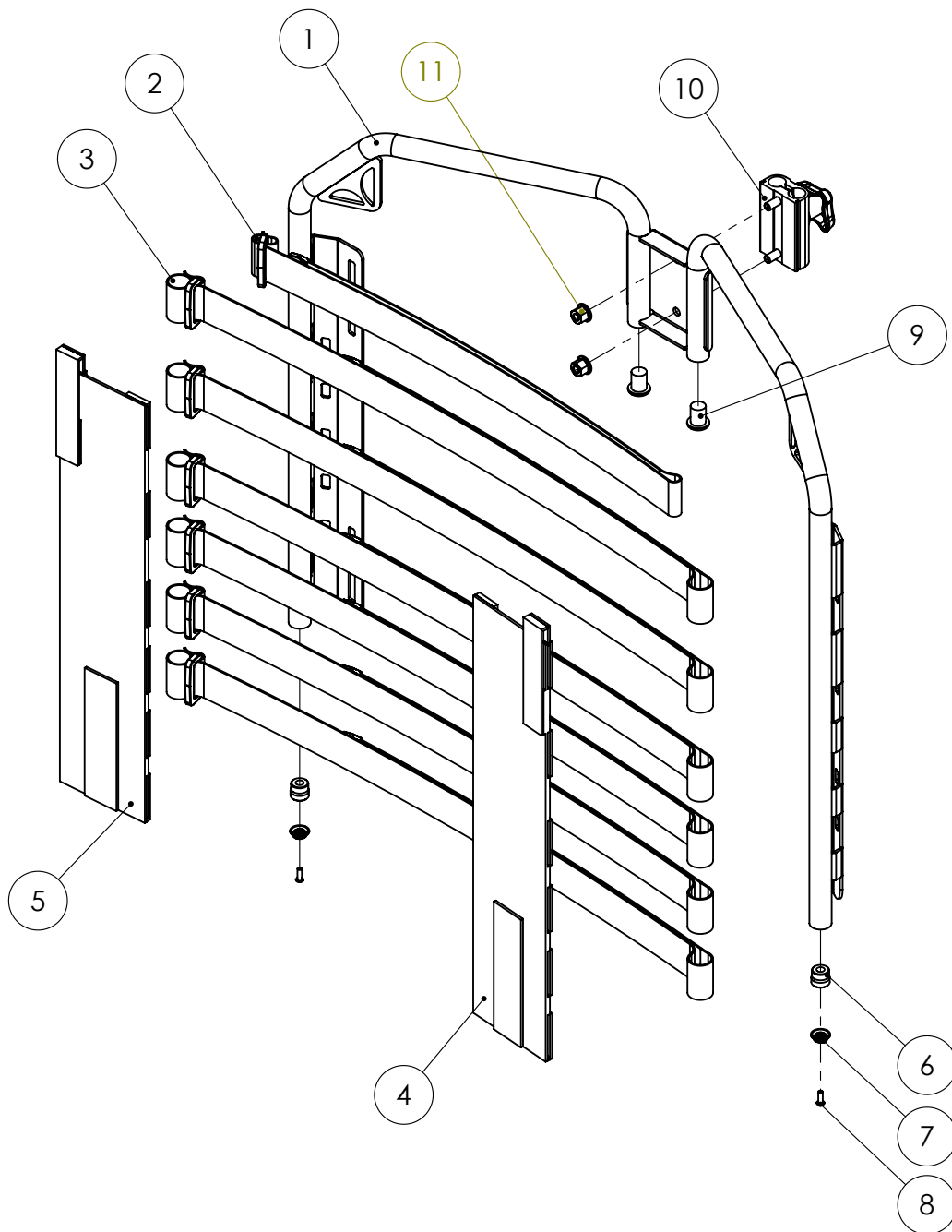

Reservdelslista HD Force**Blad C3.1**


Avser sprängskiss: C3.1 Körbygel

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	13712-5	KÖRBYGELSKYDD HD-FOAM 3st	2
		KÖRBYGEL sb54 kpl med körbygelskydd	1-5
		KÖRBYGEL sb58 kpl med körbygelskydd	1-5
		KÖRBYGEL sb62 kpl med körbygelskydd	1-5
1	66241	KÖRBYGEL sb38 std	
1	66242	KÖRBYGEL sb42 std	
1	66243	KÖRBYGEL sb46 std	
2	82165	HD-FOAM Svart 260mm	
	82219-5	MUTTERHÅLLARE kpl	3-4
3	81546	MUTTER låsm. Hög M6	
4		MUTTERHÅLLARE	
5	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
6	62338-1	KÖRHANDSAGSSIDA standard vänster	se blad C4.1
6	62338-2	KÖRHANDSAGSSIDA standard höger	se blad C4.1

Körbygel

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

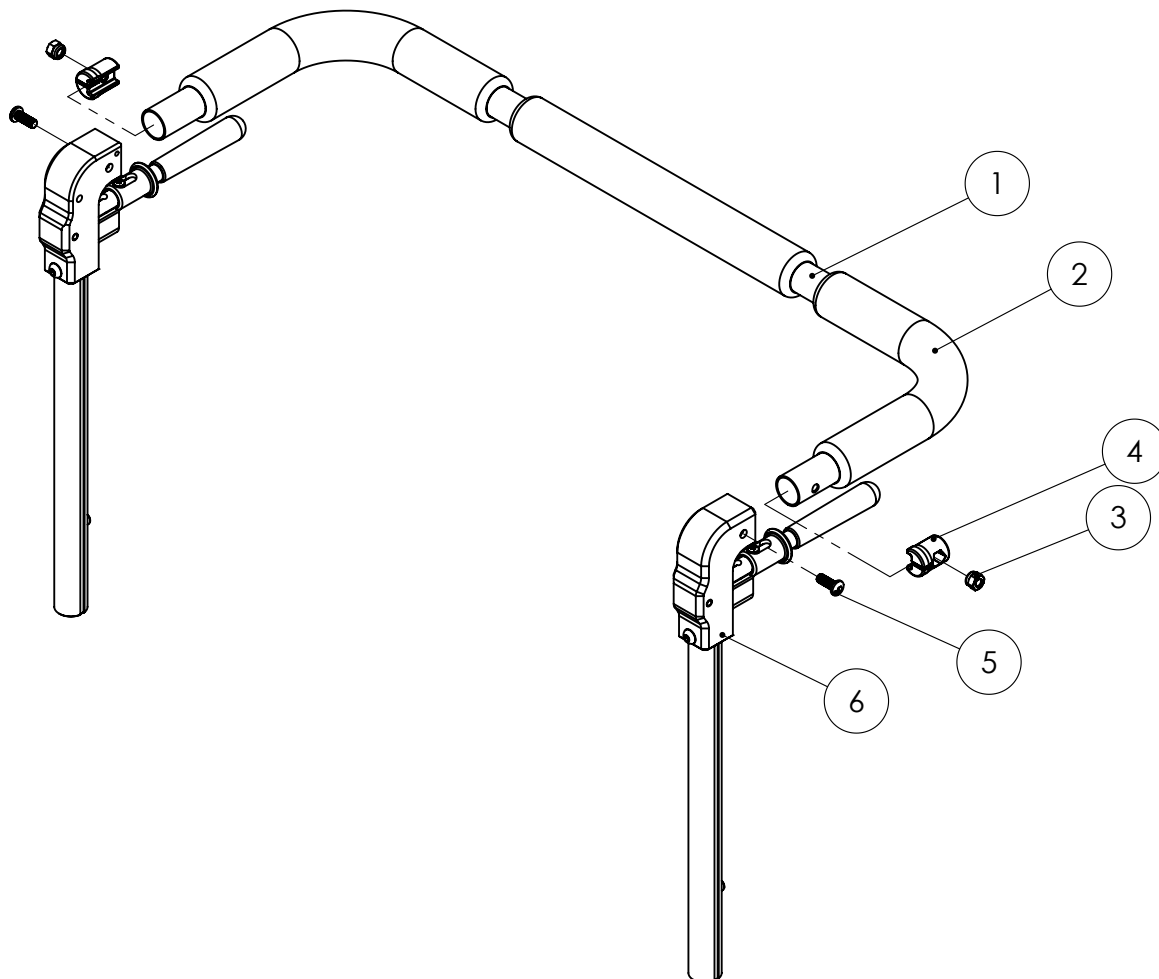

Reservdelslista HD Force**Blad C4.1**


Avser sprängskiss: C4.1 Körhandtagssida

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62338-1	KÖRHANDTAGSSIDA std vänster	1-10
	62338-2	KÖRHANDTAGSSIDA std höger	1-10
1		LEDTAPP bromshandtag	
		KÖRHANDTAGSRÖR std k med snäpp	2-3
2		KÖRHANDTAGSRÖR std	
3	10795	FJÄDERSNÄPP typ 2	
4		KÖRHANDTAGSKNUT vänster	
4		KÖRHANDTAGSKNUT höger	
	62336-5	BROMSHANDTAG kpl	5-9
5		LÅSHYLSA bromshandtag	
6		BROMSHANDTAG	
7		SKRUV MRX 4x8 spiral	
8	82159	HANDTAG Softex 12 mm	
9		O-RING 3.69x1.78 NBR	
10		SKRUV K6S M6x30 FZB	
11		VAJERSATS Broms standard kpl med ändstycken	Se blad C5.2

Körhandtagssida

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

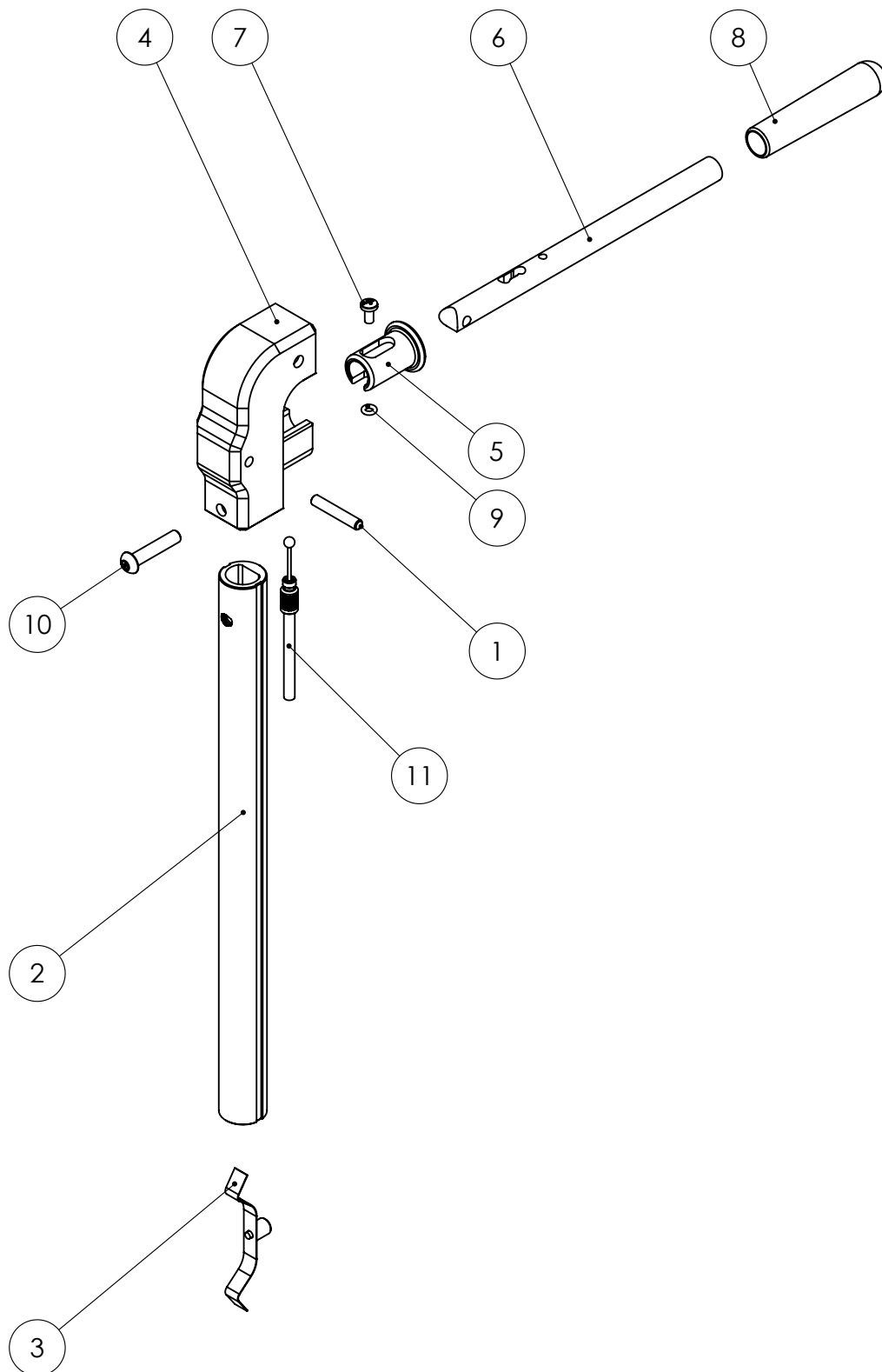


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: C5.1 Vajerreglage
Blad C5.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62372	VAJERREGLAGE. Tilt kpl med vajer/hölje	1-6
1		KÅPA vajerreglage, höger	
2		ARM vajerreglage	
3	62365-2	SPAK Tilt vajerreglage PA Grön	
4		SKRUV TP 3.5x16 försänkt skalle	
5		SPÄNNSTIFT PRYM 3x8	
6	82425	VAJERSATS Tilt	Se blad C5.2
	62371	VAJERREGLAGE. rygg kpl med vajer/hölje	7-12
7		KÅPA vajerreglage, vänster	
8		ARM vajerreglage	
9	62365-1	SPAK Rygg vajerreglage PA Grå	
10		SKRUV TP 3.5x16 försänkt skalle	
11		SPÄNNSTIFT PRYM 3x8	
12	82426	VAJERSATS Rygg	Se blad C5.2

Vajerreglage

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

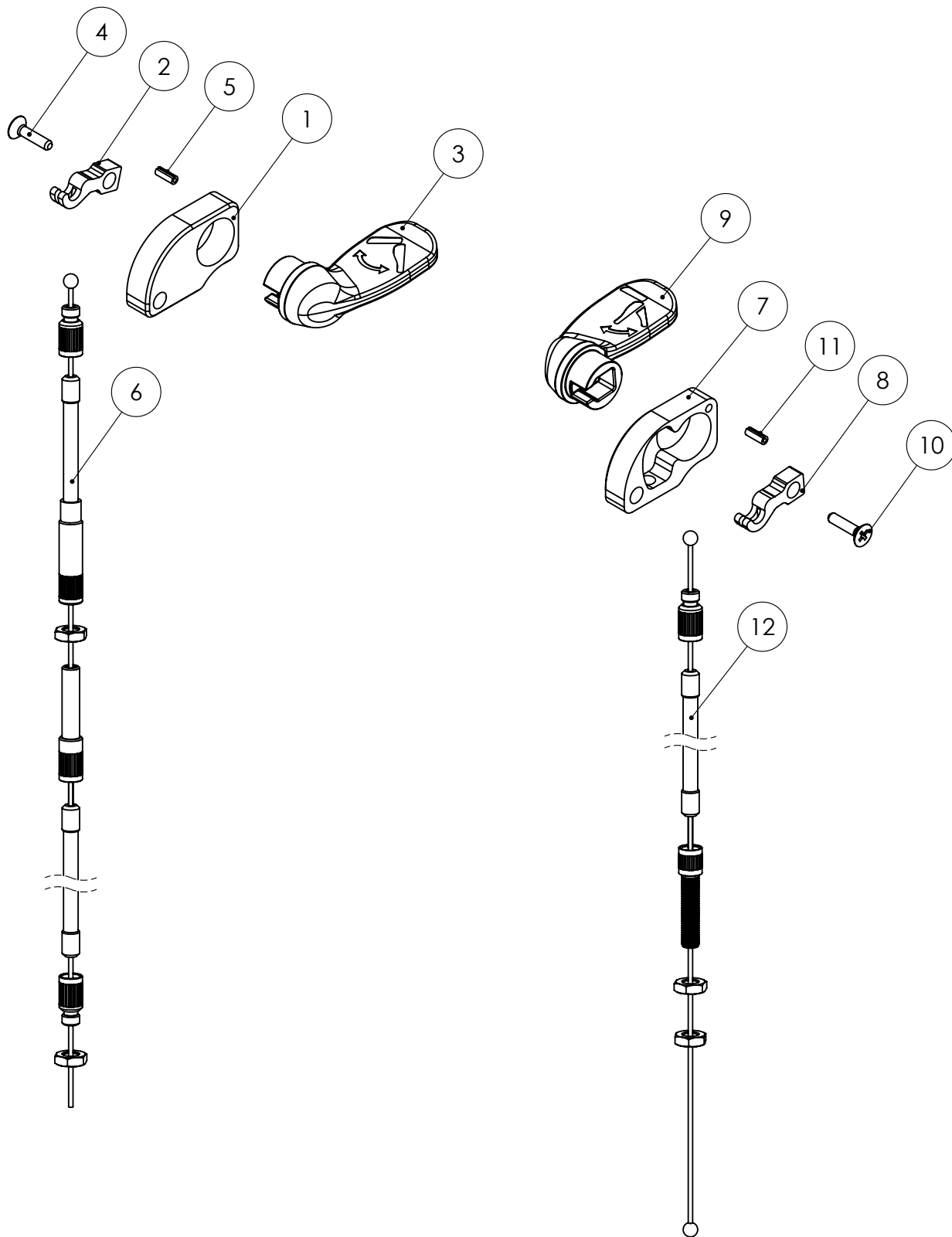

Reservdelslista HD Force**Blad C5.2**


Avser sprängskiss: C5.2 Vajersatser

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1	82425	VAJERSATS Tilt	
2	82426	VAJERSATS Rygg	
3	82427	VAJERSATS Broms	
4	82428	VAJERSATS Brukarbroms 16	
5	82429	VAJERSATS Brukarbroms 24	

Vajersatser

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

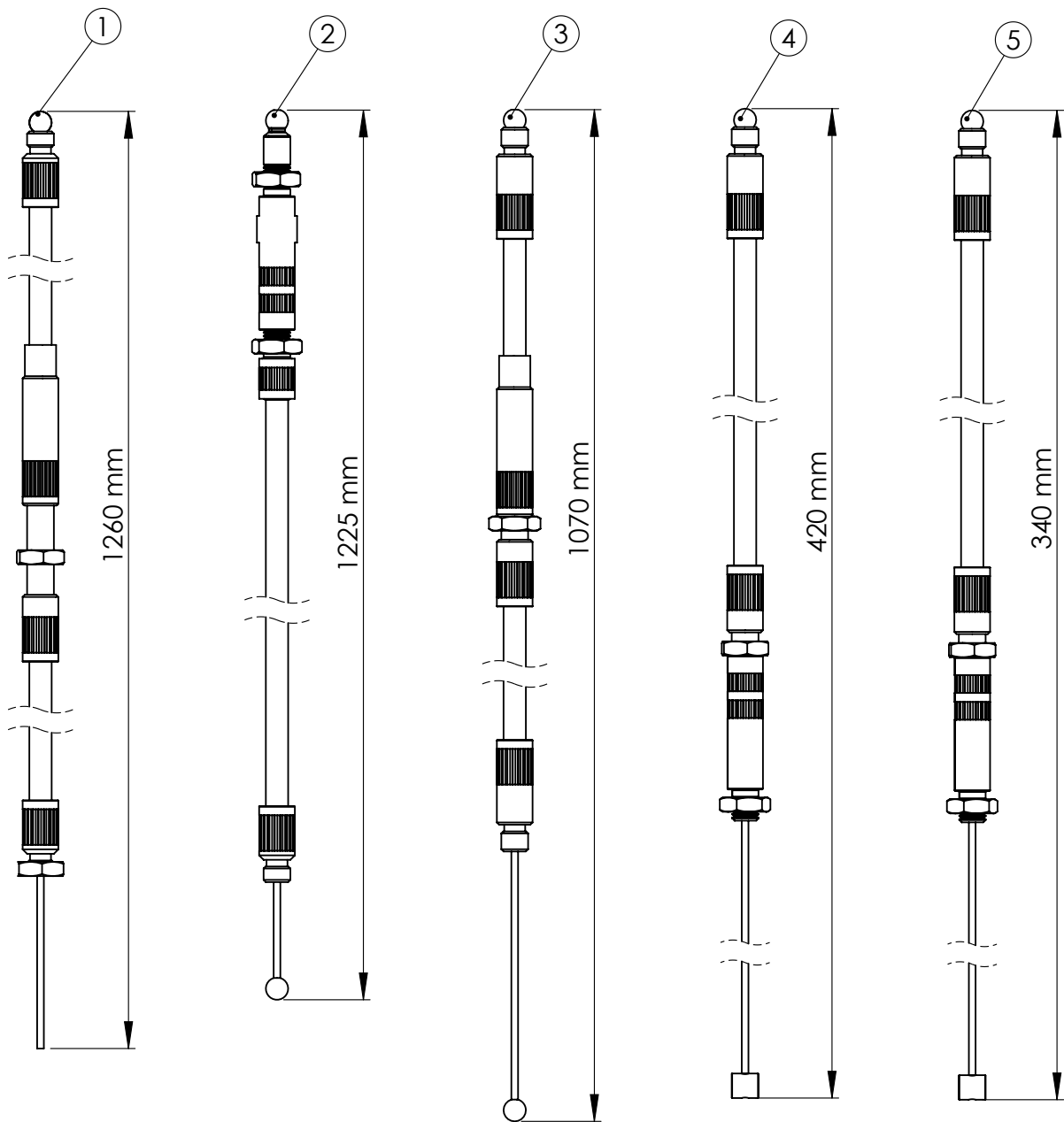


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: C6.1 Bålstödsfäste
Blad C6.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69351-1	BÅLSTÖDSFÄSTE sats kpl med skruv 1st	1-9
		BÅLSTÖDSFÄSTE	
1	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
2	81522	MUTTER låsmutter M6	
3	81602	BRICKA BRB6.4x12x1.5	
4		PLÅT bålstödsfäste	
5		BLINDNITMUTTER M6	
6	81869	FJÄDER benstöd	
7	81954	STJÄRNRATT M6x20	
	82218-5	PROFILSTYRNING med tryckbläck	8-9
8		PROFILSTYRNING	
9		TRYCKBLÄCK	

Bålstödsfäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

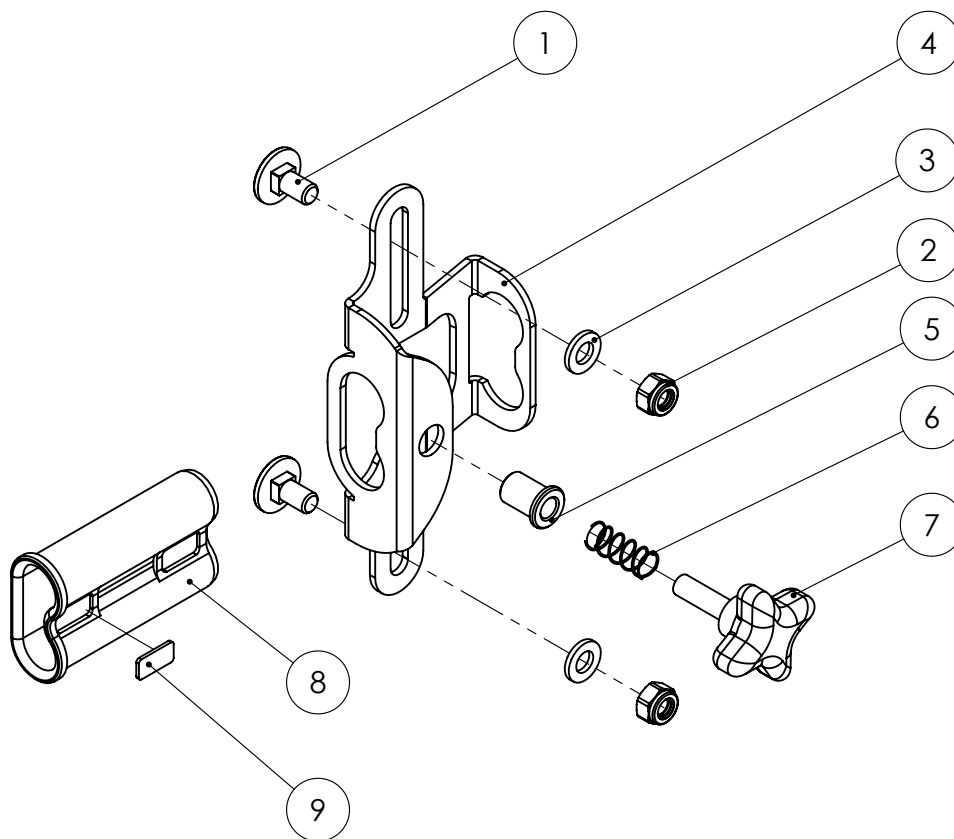

Reservdelslista HD Force**Blad D1.1**


Avser sprängskiss: D1.1 Benstöd std sammanställning

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	
1		BENSTÖD vinkelställbart, höger	Se blad D1.2
2		BENSTÖD vinkelställbart, vänster	Se blad D1.2
3		VADSTÖD helt	Se blad D2.1
4		FOTSTÖD helt	Se blad D3.1
5		BENSTÖD fast vinkel, höger	Se blad D1.3
6		BENSTÖD fast vinkel, vänster	Se blad D1.3
7		VADSTÖD delat, höger	Se blad D2.2
8		VADSTÖD delat, vänster	Se blad D2.2
9		FOTSTÖD delat, höger	Se blad D3.2
10		FOTSTÖD delat, vänster	Se blad D3.2

Benstöd sammanställning

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

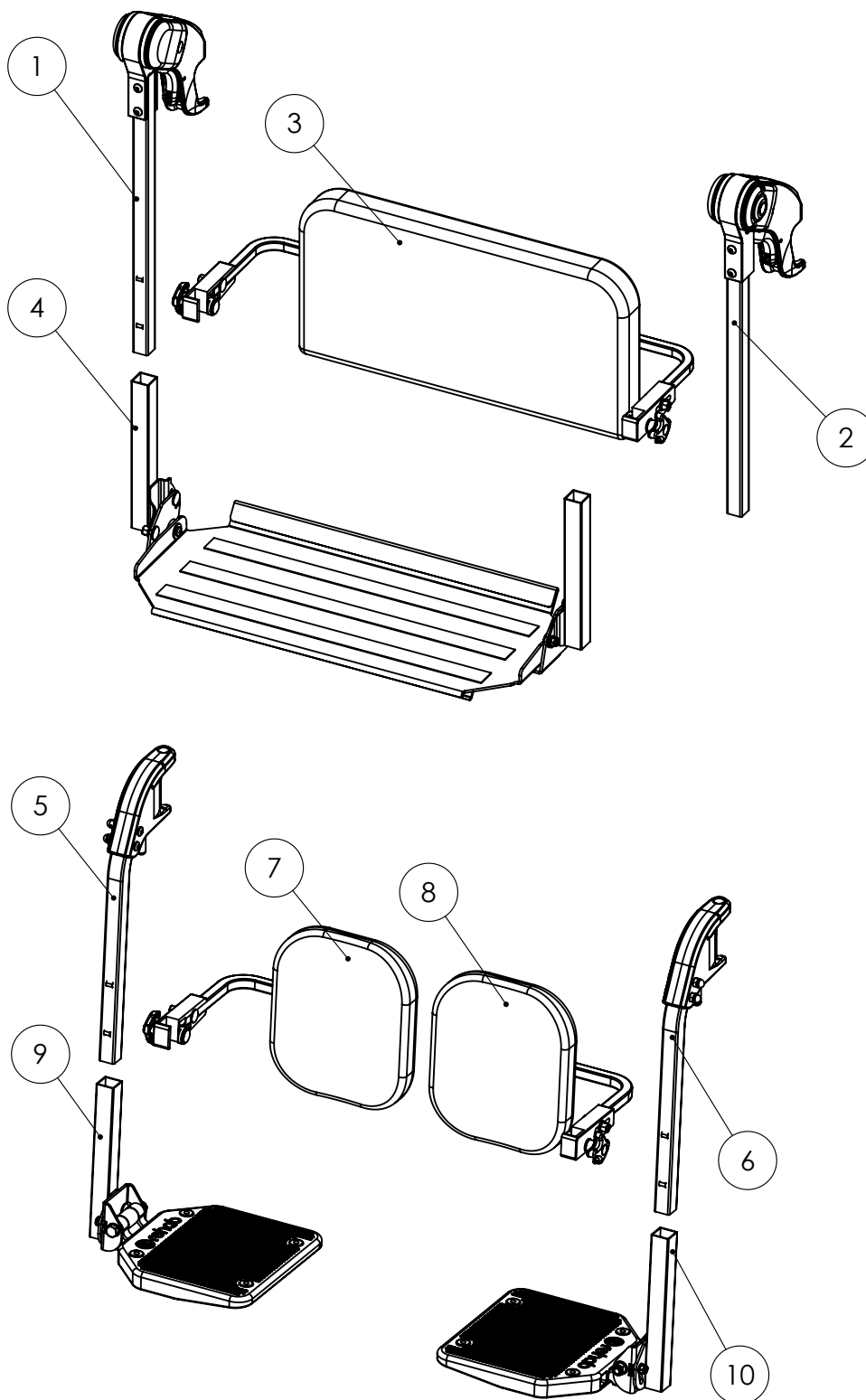

Reservdelslista HD Force**Blad D1.2**


Avser sprängskiss: D1.2 Benstöd vinkelställbart

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62720	BENSTÖD vinkelställbart standard kpl höger	1-8
	62725	BENSTÖD vinkelställbart standard kpl vänster	1-8
	62723	BENSTÖD vinkelställbart långt kpl vänster	1-8
	62724	BENSTÖD vinkelställbart långt kpl höger	1-8
	62728	BENSTÖDSRÖR standard vinkelställbart kpl	2-3
	62729	BENSTÖDSRÖR långt vinkelställbart kpl	2-3
	62731-5	KNÄLED vinkelställbar kpl vänster	4-8 Se blad D1.4
	62732-5	KNÄLED vinkelställbar kpl höger	4-8 Se blad D1.4
1	81 340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
2	10790	FJÄDERSNÄPP typ 1	
3		BENSTÖDSRÖR standard	
3		BENSTÖDSRÖR lång	
4		KNÄLED vänster	
4		KNÄLED höger	
5	62746-3	YTTERKUDDE knäled vänster	
5	62746-4	YTTERKUDDE knäled höger	
6	63745-5	INNERKUDDE knäled	
7	81152	SKRUV MRX 4x8 sv.	
8	81156	SKRUV MRX 3x6 sv.	

Benstöd vinkelställbart

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

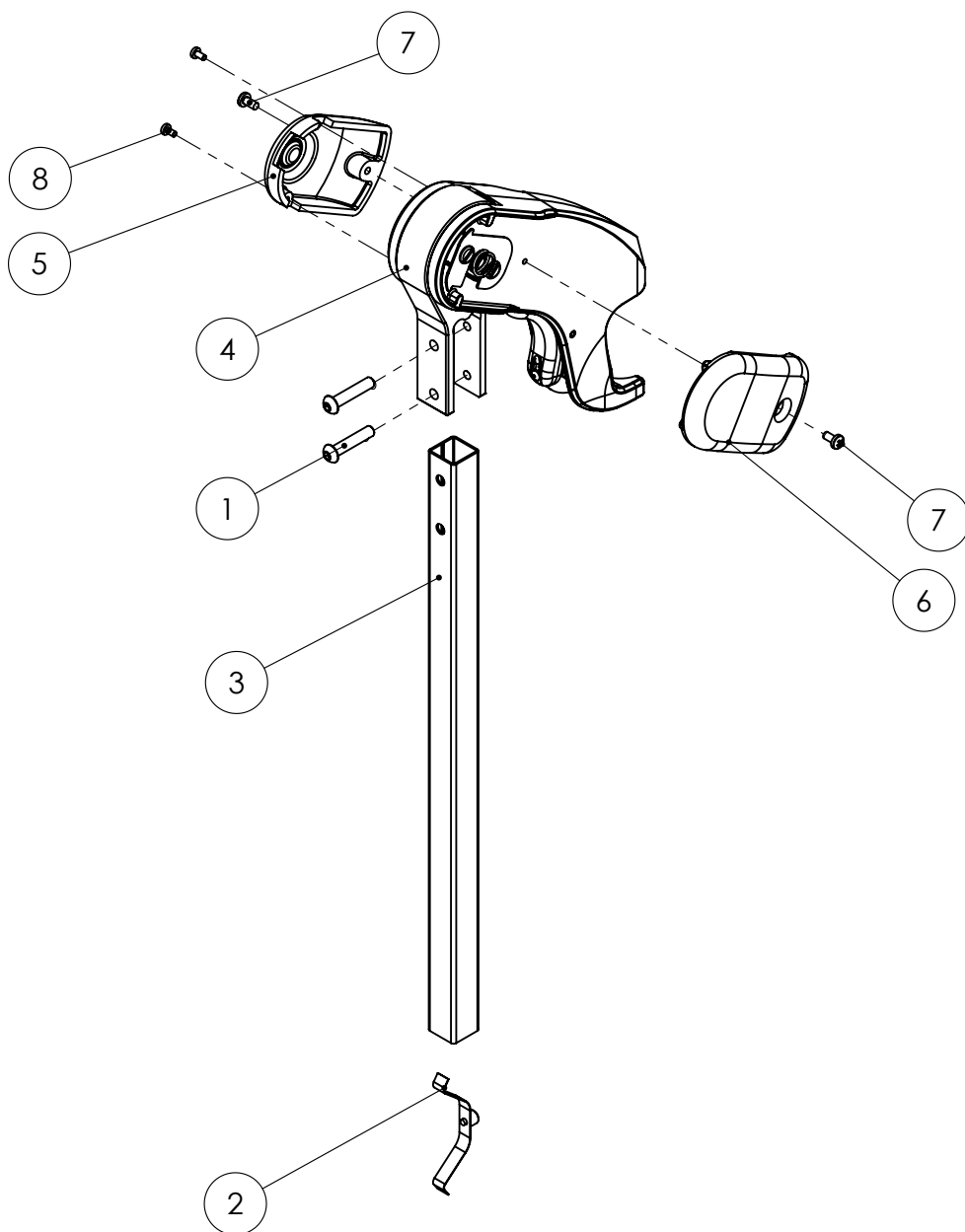

Reservdelslista HD Force**Blad D1.3**


Avser sprängskiss: D1.3 Benstöd fast vinkel 90° & 105°

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63758-1	BENSTÖD fast 90° standard vänster	1-11
	63758-2	BENSTÖD fast 90° standard höger	1-11
	63759-1	BENSTÖD fast 105° standard vänster	1-11
	63759-2	BENSTÖD fast 105° standard höger	1-11
	63759-3	BENSTÖD fast 105° långt vänster	1-11
	63759-4	BENSTÖD fast 105° långt höger	1-11
1		BENSTÖDSRÖR fast 90° standard	
1		BENSTÖDSRÖR fast 105° standard	
1		BENSTÖDSRÖR fast 105° långt	
2	10790	FJÄDERSNÄPP typ 1	
3	81344	SKRUV K6S M6x35 sv. helgängad	
4	81529	MUTTER DIN 986 M6 fz kupollåsmutter	
		FÄSTE benstöd fast kpl	5-11
		FÄSTE benstöd fast med bussningar	5-7
5		FÄSTE benstöd fast	
6		BUSSNING knäled	
7		HYLSA knäled	
8		SPAK benstöd fast	
9		LÅSTAPP benstöd fast	
10		FJÄDER benstöd 2444	
11		LEDTAPP låsarm	

Benstöd fast vinkel

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

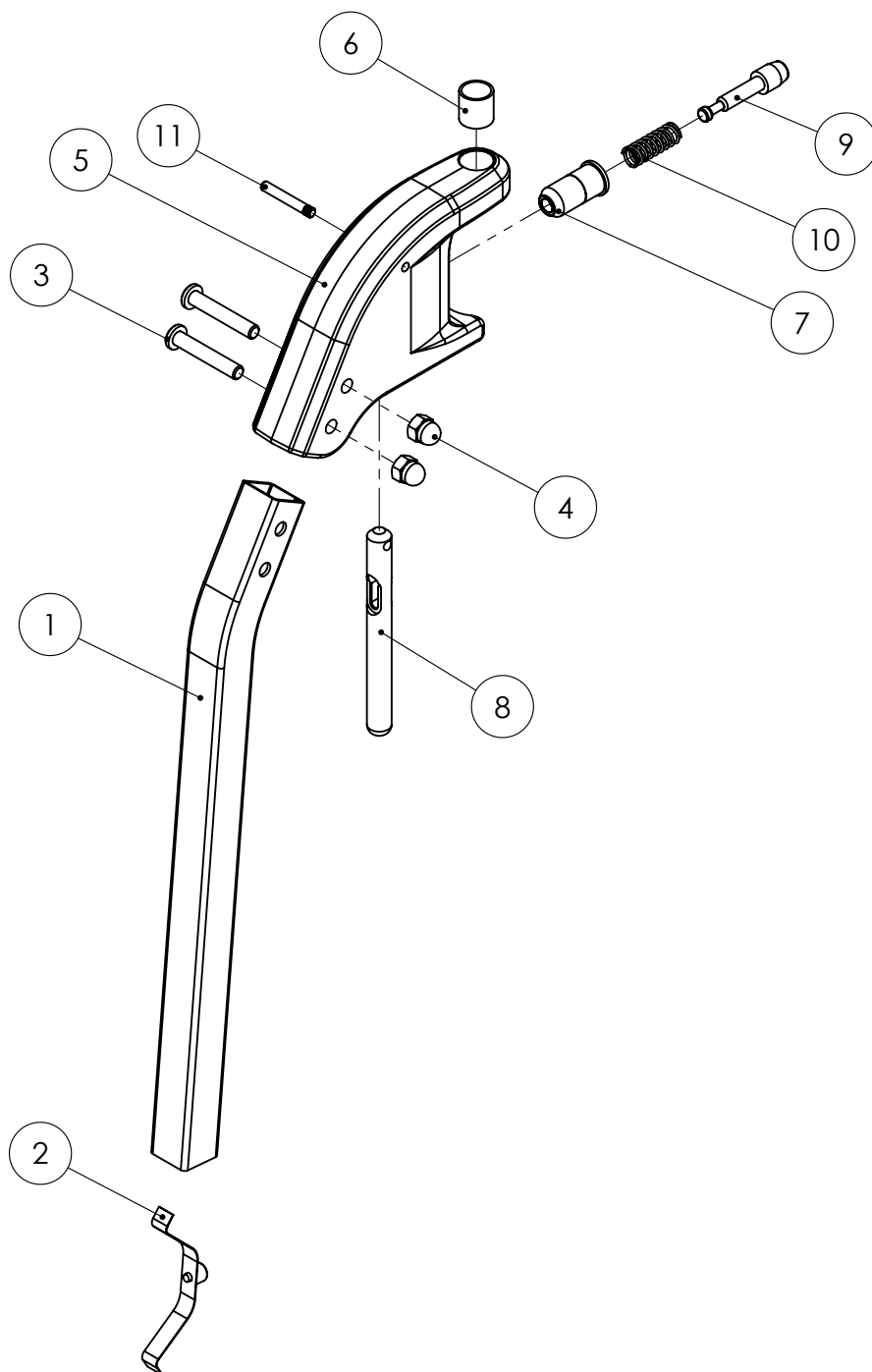

Reservdelsslista HD Force**Blad D1.4**


Avser sprängskiss: D1.4 Knäled vinkelställbar

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62731-5	KNÄLED vinkelställbar kpl vänster	1-26
	62732-5	KNÄLED vinkelställbar kpl höger	1-26
		KNÄLED vinkelställbar vänster	5-26
		KNÄLED vinkelställbar höger	5-26
1	62746-3	YTTERKUDDE knäled med tryck vänster	Se blad D1.2
1	62746-4	YTTERKUDDE knäled med tryck höger	Se blad D1.2
2	63745-5	INNERKUDDE knäled	Se blad D1.2
3	81152	SKRUV MRX 4x8 sv.	Se blad D1.2
4	81156	SKRUV MRX 3x6 sv.	Se blad D1.2
		GAFFEL knäled kpl vänster	18-20
		GAFFEL knäled kpl höger	18-20
5		LÅSTAPP knäled	
6		LÅSARM knäled	
7		LEDTAPP låsarm	
		VRIDLÄNK kpl vänster	21-24
		VRIDLÄNK kpl höger	21-24
		INNERKUGG kpl	25-26
8		DISTANS knäled	
9		LAGERBRICKA knäled	
10		LAGERBRICKA knäled	
11		SKRUV knäledsgaffel	
12		AXELTAPP knäled	
13		PLÅT knäled	
14		MUTTER låsmutter M6	
15		SPÅRRYTARE RS-5	
16		FJÄDER benstöd 2513	
17		FJÄDER benstöd 2444	
18		GAFFEL knäled vänster	
18		GAFFEL knäled höger	
19		HYLSA knäled	
20		BUSSNING knäled	
21		VRIDLÄNK vänster	
21		VRIDLÄNK höger	
22		YTTERKUGG knäled	
23		SKRUV MC6S M3x8 FZB	
24		SKRUV MC6S M6x10	
25		INNERKUGG knäled	
26		STYRHYLSA innerkugg	

Knäled vinkelställbar

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

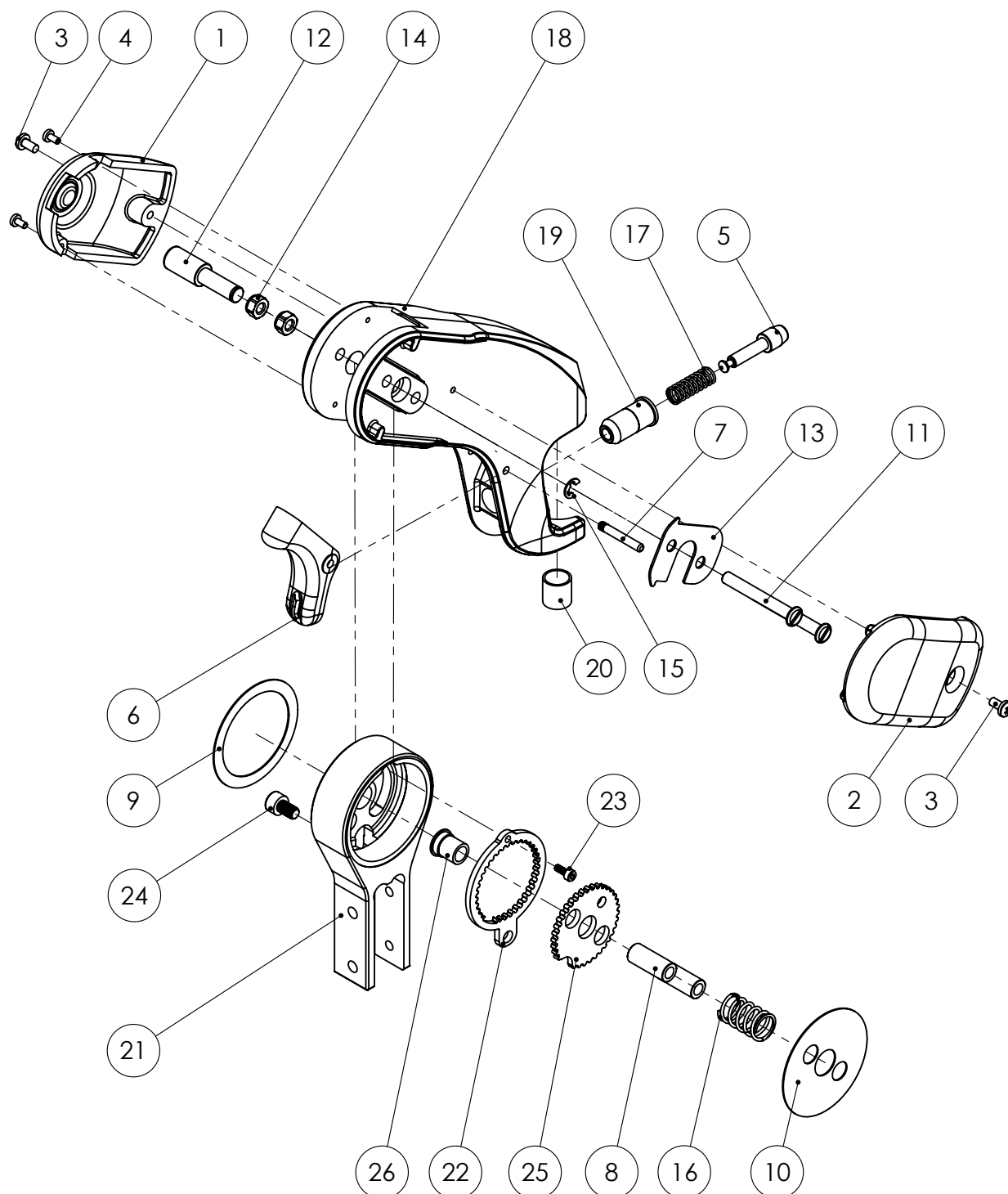

Reservdelslista HD Force**Blad D1.5**


Avser sprängskiss: D1.5 Knäled Frikopplingsbar

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62733-5	KNÄLED Frikopplingsbar vänster kpl vinkelställbar	1-7
	62734-5	KNÄLED Frikopplingsbar höger kpl vinkelställbar	1-7
1		KNÄLED vinkelställbar vänster	Se blad D1.4
1		KNÄLED vinkelställbar höger	Se blad D1.4
2		TRYCKVRIDKNAPP upplåsbar knäled	
3		SKRUV P6SS 4x8	
4		YTTERKUDDE knäled med hål vänster	
4		YTTERKUDDE knäled med hål höger	
5		PLÅT knäled upplåsbar variant	
6		AXELTAPP knäled frikopplingsreglage	
7		SKRUV MRX 3.6 SV.	
8		SKRUV MRX 4x8 SV.	

Knäled frikopplingsbar

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB

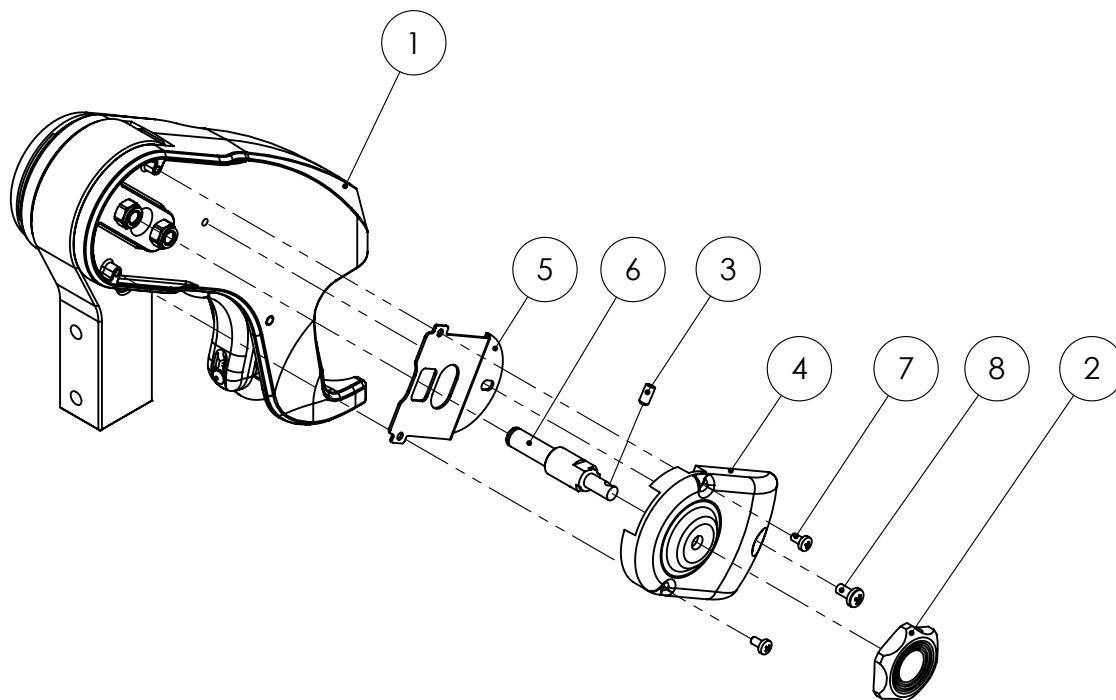


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: D2.1 **Vadstöd Helt**
Blad D2.1

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66811	VADSTÖD Helt sb54 ställbart djup	1-14
	66812	VADSTÖD Helt sb58 ställbart djup	1-14
	66813	VADSTÖD Helt sb62 ställbart djup	1-14
		VADPLATTSRÖR hel sb54	6-9
		VADPLATTSRÖR hel sb58	6-9
		VADPLATTSRÖR hel sb62	6-9
1		VADPLATTA hel sb54 Svart	
1		KLÄDSEL Vadplatta hel sb54	
1		VADPLATTA hel sb58 Svart	
1		KLÄDSEL Vadplatta hel sb58	
1		VADPLATTA hel sb62 Svart	
1		KLÄDSEL Vadplatta hel sb62	
2	62862	KLAMMER vadplatta hel	
3	81110	SKRUV MRX M5x12 SV	
4	81212	BULT MVBFB M6x30 FZB	
5	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	
6	12935	SNÄPP bordsrör	
7		VADPLATTSRÖR hel sb54	
7		VADPLATTSRÖR hel sb58	
7		VADPLATTSRÖR hel sb62	
8		VADPLATTSBOCK 12x12	
9		LÅSBRICKA IZ 6,4	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl vänster med låsning	10-14
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl höger med låsning	10-14
10		VADPLATTSFÄSTE vänster	
10		VADPLATTSFÄSTE höger	
11	63826-1	KLÄMBRICKA	
12	81352	BULT MVBFB M6x40 FZB	
13	81607	BRICKA NB 6x16x1 FZB	
14	81952-5	STJÄRNRATT M6	

Vadstöd Helt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

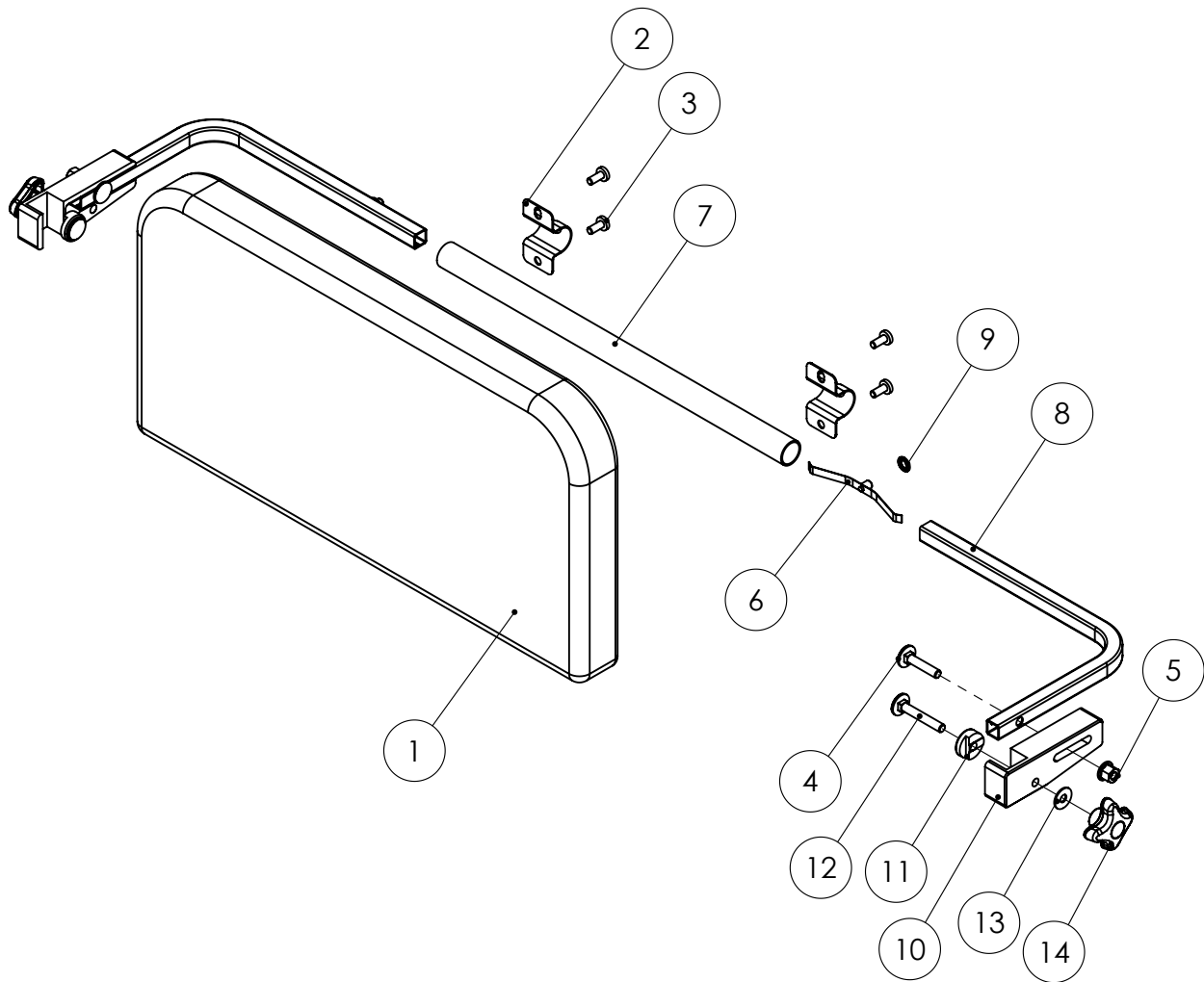


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: D2.2 Vadstöd delat
Blad D2.2

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66801	VADSTÖD vänster sb54-62 ställbart djup	1-15
	66802	VADSTÖD höger sb54-62 ställbart djup	1-15
1		Vadplatta PU integralskum delad	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl vänster	2-6
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl höger	2-6
2		VADPLATTSFÄSTE vänster	
2		VADPLATTSFÄSTE höger	
3	63826-1	KLÄMBRICKA vadplattsfäste	
4	81352	BULT MVBF M6x40 fzb	
5	81607	BRICKA NB 6x16x1 fzb	
6	81952-5	STJÄARNRATT M6 Braga 40x23	
7	81212	BULT MVBF M6x30 fzb	
8	81545	MUTTER DIN 6926 M6	
		VADPLATTSBOCK kpl med hylsa	9-12
9		VADPLATTSBOCK	
10		VADPLATTSHYLSA	
11		SVETSMUTTER M4 SMRP	
12		SKRUV MC6S M4x10 fzb	
13		VADPLATSKLAMMER	
14		SKRUV MRX 5x12 sv	
15		Distans valdplatta PU 10x3x5.5 PE	

Vadstöd delat

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

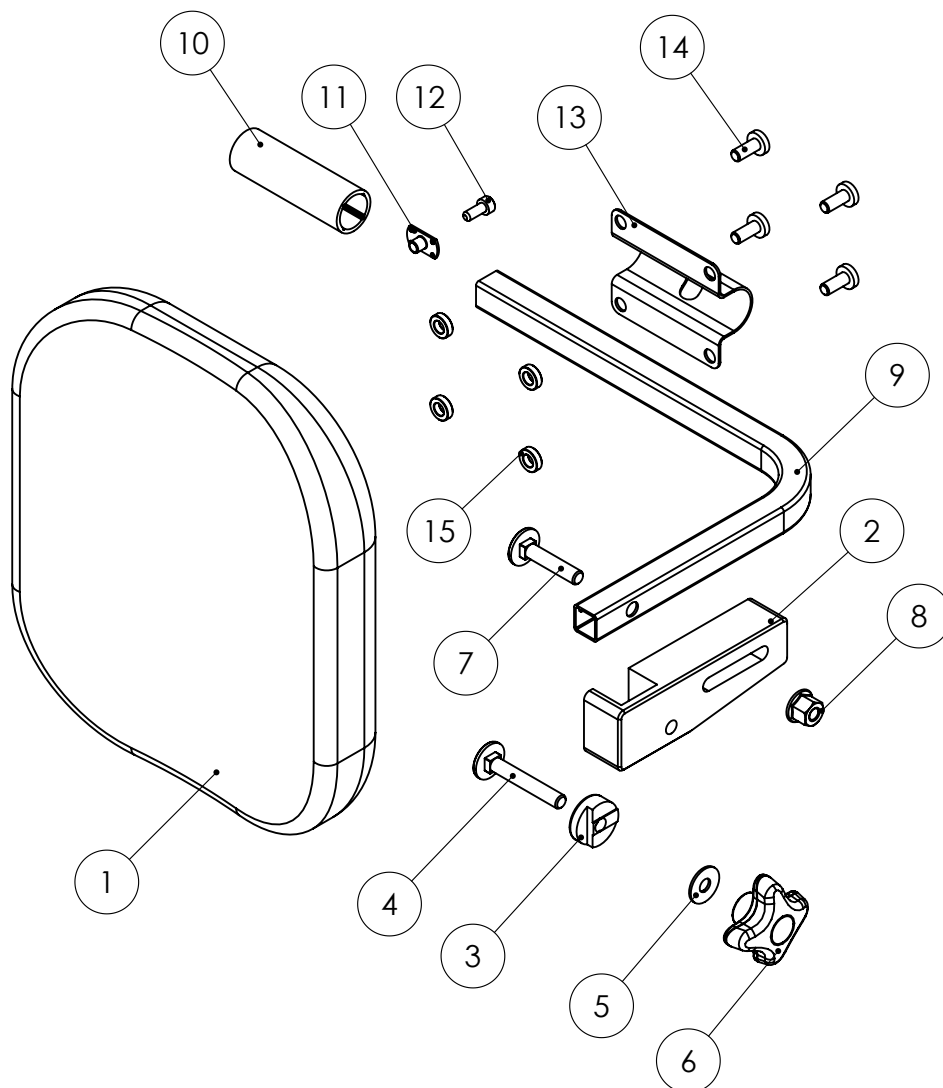

Reservdelslista HD Force**Blad D3.1**


Avser sprängskiss: D3.1 Fotstöd Helt

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66951	FOTSTÖD Helt sb54 vinkelställbart kpl	1-11
	66961	FOTSTÖD Helt sb58 vinkelställbart kpl	1-11
	66971	FOTSTÖD Helt sb62 vinkelställbart kpl	1-11
		FOTPLATTA Hel sb54 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTA Hel sb58 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTA Hel sb62 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTSHÅLLARE hö helt fotstöd	7-10
		FOTPLATTSHÅLLARE vä helt fotstöd	7-10
1	64957-1	DISTANSBRICKA till hel fotplatta	
2	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
3	81655	BRICKA M6 6,4x18x1,6 DIN 9021 Svart	
4	81522	MUTTER låsmutter M6	
5		FOTPLATTA hel sb54	
5		FOTPLATTA hel sb58	
5		FOTPLATTA hel sb62	
6	87021	HALKSKYDDSTEJP 25mm	
7		Fotplattshållare hö	
7		Fotplattshållare vä	
8		Vinkelplåt hö	
8		Vinkelplåt vä	
9	81217	BULT MVBF M6x16 FZB	
10	81545	MUTTER DIN 6926 M6	

Fotstöd helt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

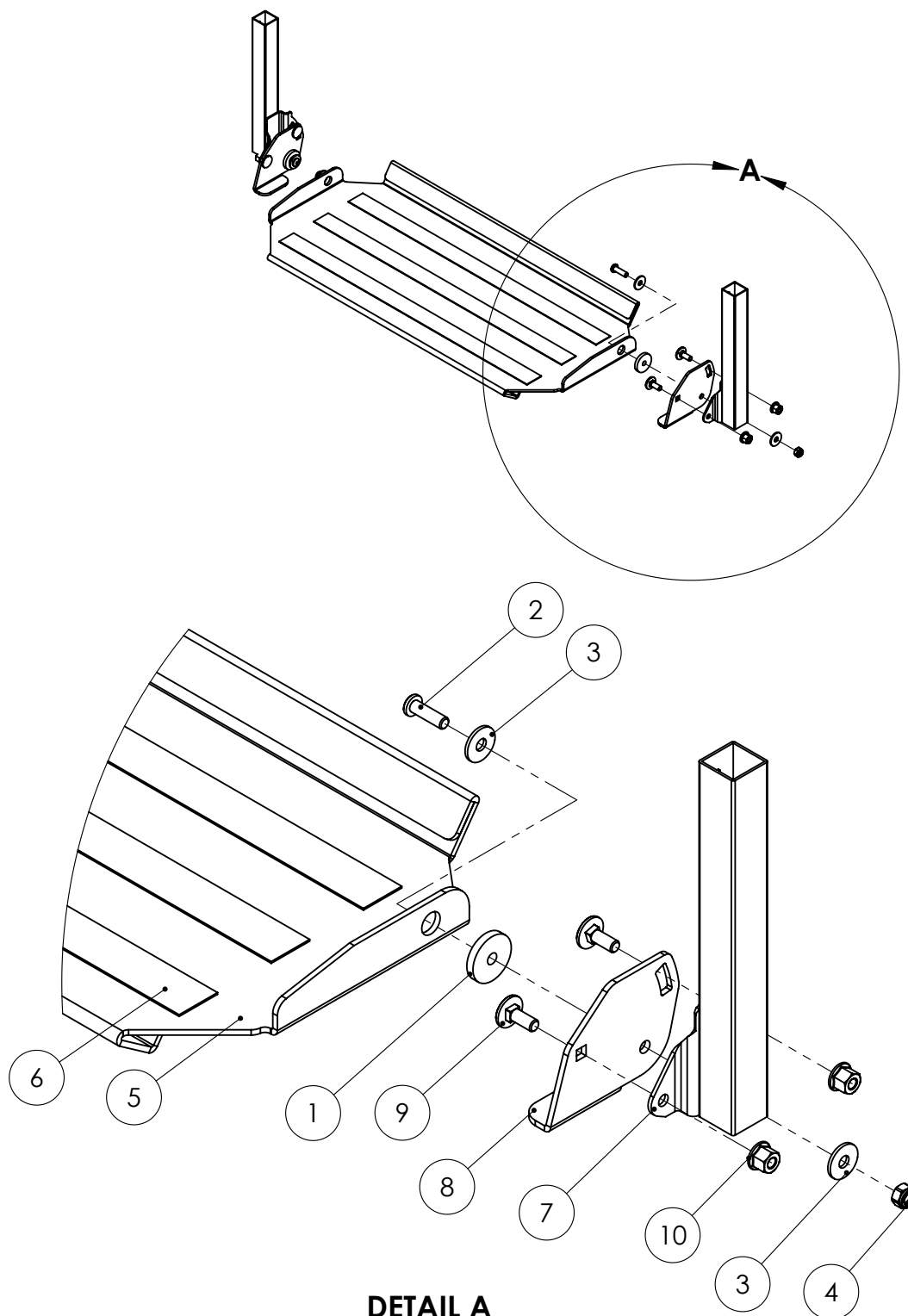


Reservdelslista HD Force
 Avser sprängskiss: D3.2 Fotstöd delat
Blad D3.2

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	66908	Fotstöd delat, standardlängd, hö	
	66909	Fotstöd delat, standardlängd, vä	
1	64923	FOTPLATTA Svart PP	
2	81354	SKRUV K6S M6x12 sv.	
3	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
		FOTPLATTSHÅLLARE hö kpl med gaffel	4-14
		FOTPLATTSHÅLLARE vä kpl med gaffel	4-14
4		Gaffelhalva kort	
5		Distans gaffel	
		Fotplattshållare hö	6-9
		Fotplattshållare vä	6-9
6		FOTPLATTSHÅLLARE standard höger	
6		FOTPLATTSHÅLLARE standard vänster	
7		LEDPLÅT fotplatta höger	
7		LEDPLÅT fotplatta vänster	
8		BULT MVBF M6x16 fzb	
9		MUTTER DIN 6926 M6	
10	81255	BULT M6S M8x75 FZM	
11	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
12	81603	BRICKA BRB8.4x16x1.5	

Fotstöd delat

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

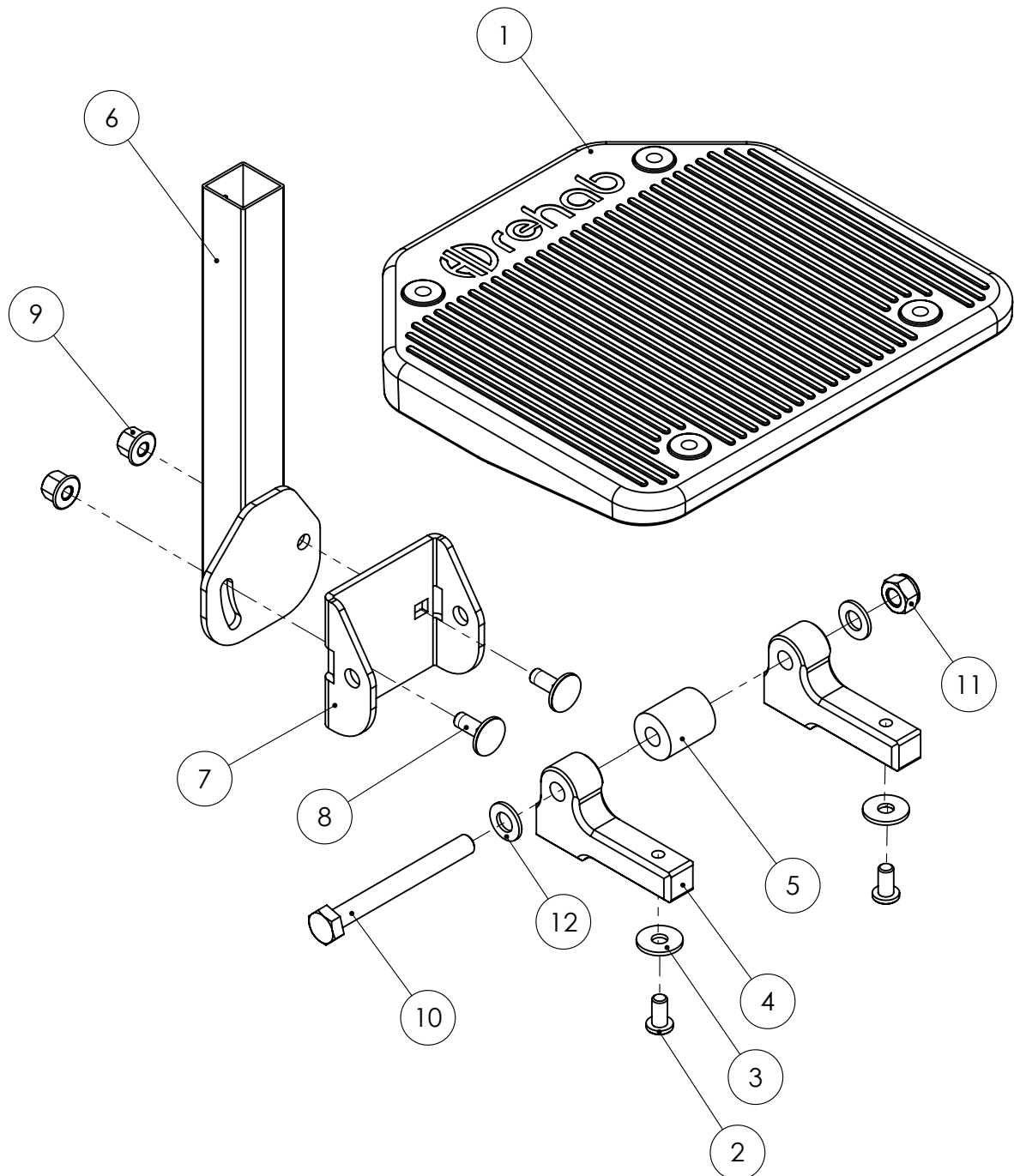

Reservdelslista HD Force**Blad E1.1**


Avser sprängskiss: E1.1 Armstöd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62401	ARMSTÖD Standard kpl svart vänster	1 & 3
	62402	ARMSTÖD Standard kpl svart höger	1 & 3
	63401	ARMSTÖD Bred kpl svart soft vänster	2 & 3
	63402	ARMSTÖD Bred kpl svart soft höger	2 & 3
1	62408-1	ARMSTÖDSENHET standard höger	se blad E2.1
1	62409-1	ARMSTÖDSENHET standard vänster	se blad E2.1
2	62442-1	SIDOSTÖDSENHET standard höger	se blad E3.1
2	62441-1	SIDOSTÖDSENHET standard vänster	se blad E3.1
3	63408-1	ARMSTÖDSENHET Bred höger	se blad E2.2
3	63409-1	ARMSTÖDSENHET Bred vänster	se blad E2.2

Armstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

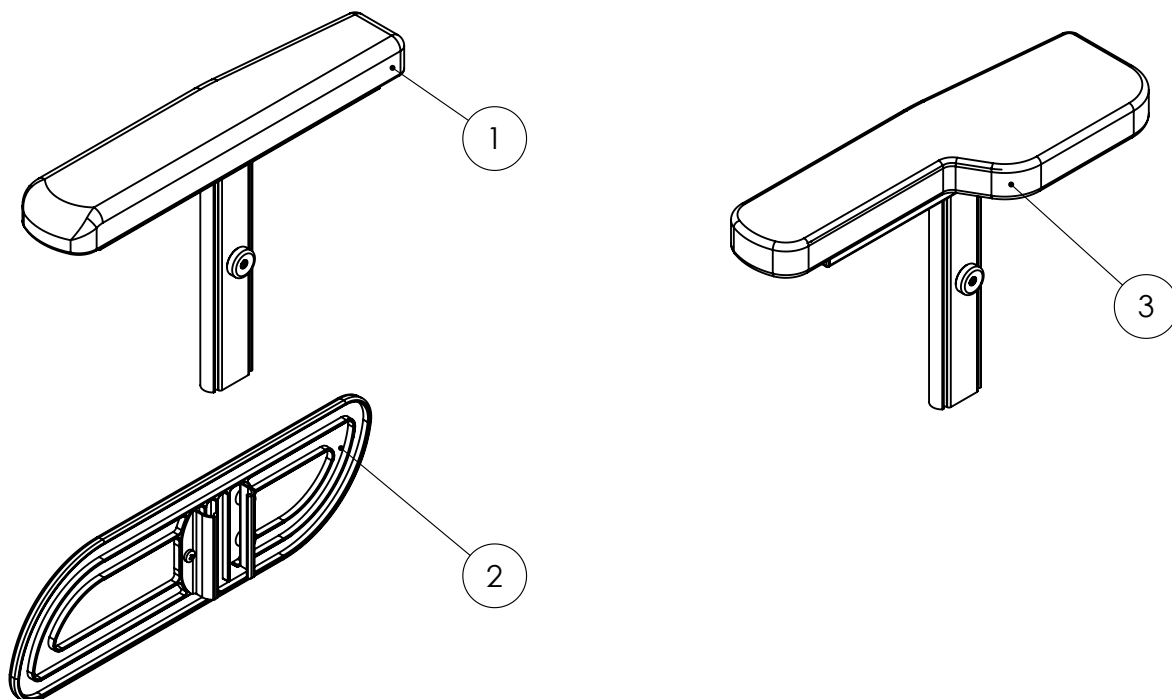

Reservdelslista**HD Force****Blad E2.1**

Avser sprängskiss: E2.1


Armstödsenhet standard

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62408-1	ARMSTÖDSENHET standard höger	1-17
	62409-1	ARMSTÖDSENHET standard vänster	1-17
		STOLPE kpl med invändig armstödsskena höger	6-17
		STOLPE kpl med invändig armstödsskena vänster	6-17
1		ARMSTÖDSSKENA utvändig	
2	62463	ARMSTÖDSPLATTA Pur svart vänster	
2	62464	ARMSTÖDSPLATTA Pur svart höger	
3	81104	Skruv MRX 5x10	
4	82143	TÄCKKÅPA armstödsskena vänster	
5	82144	TÄCKKÅPA armstödsskena höger	
		STOLPE kpl med invändig stolpe	7-12
		ARMSTÖDSKENA invändig kpl med spärr	13-17
6	81137	SKRUV MFT M6x16 fzb	
7		STOLPE utvändig	
8		STOLPE invändig	
9		SPÄRR armstöd	
10		TRYCKKNAPP armstöd	
11		BLINDNIT 3.2x9.5 MUL AL/ST	
12		FJÄDER armstöd	
13		ARMSTÖDSSKENA invändig	
		SPÄRR kpl med skydd	16-17
14		NIT FN 4x10 AL	
15	81875	FJÄDER armstöd	
16		SPÄRR armstödsskena	
17	82157	ÄNSKYDD UR2x20 svart	
17	82157-1	ÄNSKYDD UR2x20 svart Förp. 10st	

Armstödsenhet standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

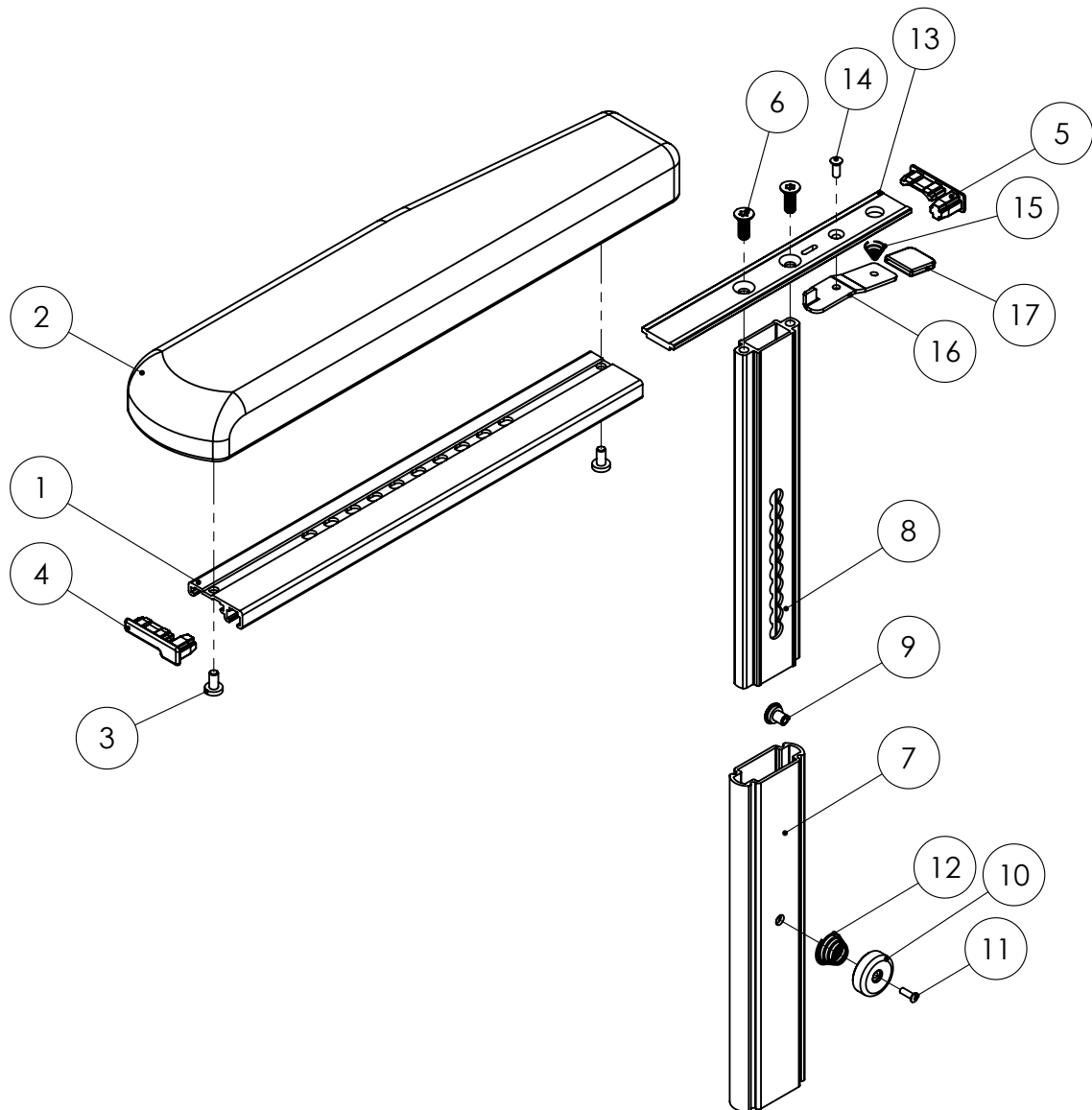

Reservdelslista HD Force**Blad E2.2**


Avser sprängskiss: E2.2 Armstödsenhet Bred standard

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63408-1	ARMSTÖDSENHET Bred standard höger	1-6
	63409-1	ARMSTÖDSENHET Bred standard vänster	1-6
1		STOLPE std kpl med invändig armstödsskena höger	se blad E2.1
1		STOLPE std kpl med invändig armstödsskena vänster	se blad E2.1
2		ARMSTÖDSSKENA utvändig	
3	62466-2	ARMSTÖDSPLATTA Bred höger	
3		KLÄDSEL armstöd höger	
3	62466-1	ARMSTÖDSPLATTA Bred vänster	
3		KLÄDSEL armstöd vänster	
4	81427	SKRUV trä 5x16 poz	
5	82143-1	TÄCKKÅPA armstödsskena vänster med hål	
6	82144-1	TÄCKKÅPA armstödsskena höger med hål	

Armstödsenhet Bred standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

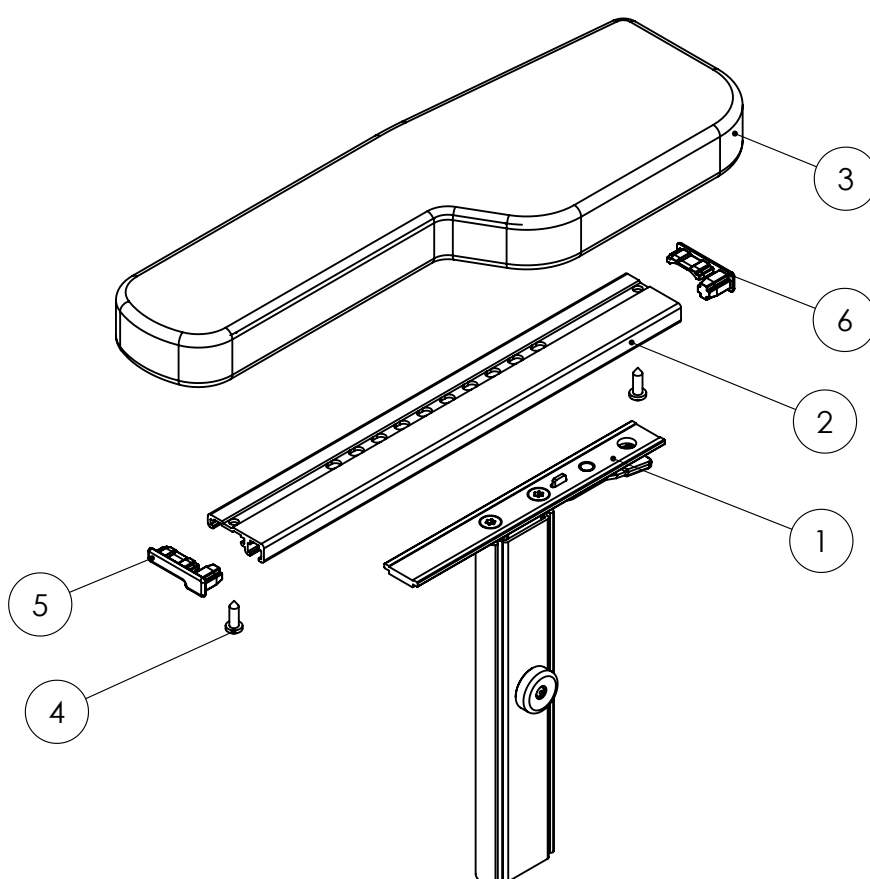

Reservdelslista HD Force**Blad E3.1**


Avser sprängskiss: E3.1 Sidostödsenhet Standard

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62482-1	SIDOSTÖDSENHET standard vänster	1-4
	62482-2	SIDOSTÖDSENHET standard höger	1-4
1		SIDOSTÖDSPLATTA ABS standard kpl vänster	
1		SIDOSTÖDSPLATTA ABS standard kpl höger	
2		KLAMMER sidostöd främre klammer	
3		KLAMMER sidostöd bakre fäste	
4	81101	SKRUV MRX 5x8	

Sidostödsenhet Standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

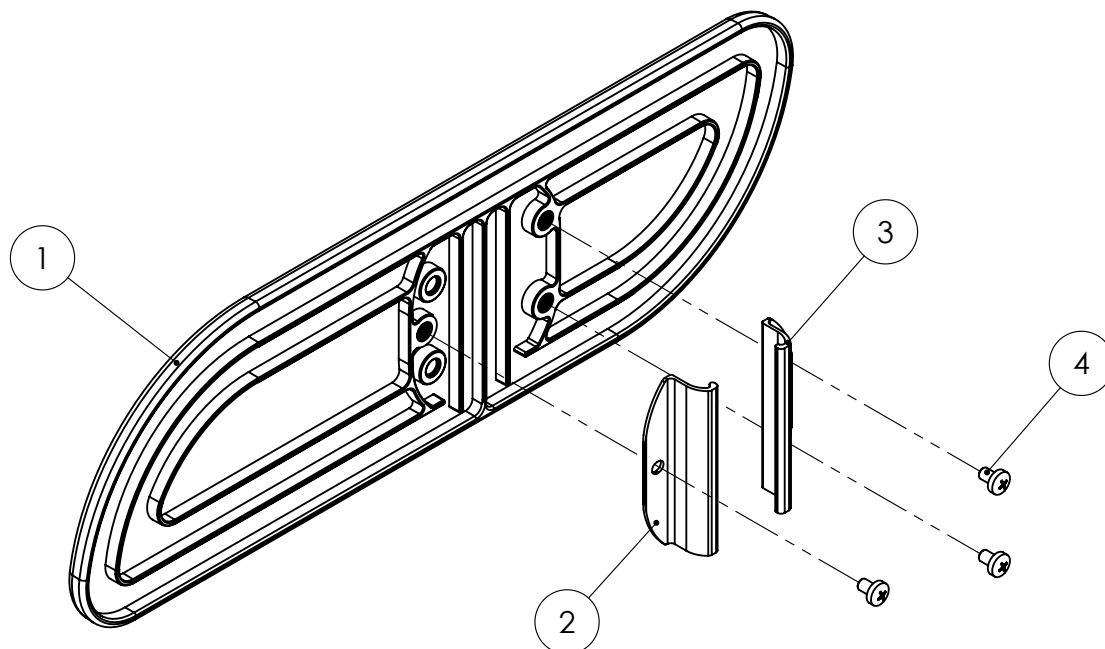

Reservdelslista HD Force**Blad F1.1**


Avser sprängskiss: F1.1 Bålstöd standard litet bred position

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69302-2	BÅLSTÖD standard litet bred pos. Hygien	1-6
	69302-3	BÅLSTÖD standard litet bred pos. Svart	1-6
1		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
1	49934	KLÄDSEL Bålstöd standard Hygien	
1	49955	KLÄDSEL Bålstöd standard Svart	
2		PLÅT bålstöd standard	
3		BYGEL bålstöd standard bred position	
4		BLINDNIT 4.8x16 ST/ST	
5		TÄCKPROPP 12.5x5.25	
6		KANTLIST F125	

Bålstöd standard litet bred pos.

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

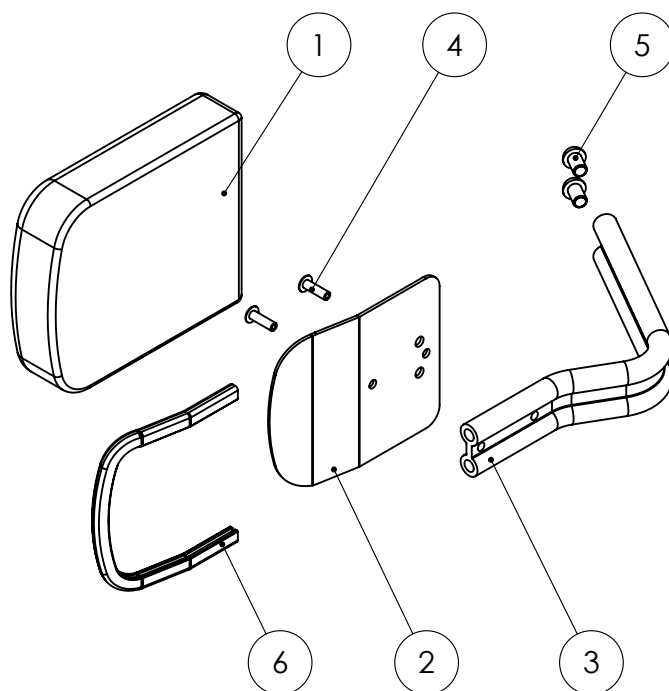

Reservdelslista**HD Force****Blad F1.2**

Avser sprängskiss: F1.2


Bålstöd ställbart långt & kort

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69311-2	BÅLSTÖD ställbart kort Hygien	1-13
	69312-2	BÅLSTÖD ställbart långt Hygien	1-13
	69311-3	BÅLSTÖD ställbart kort Svart	1-13
	69312-3	BÅLSTÖD ställbart långt Svart	1-13
1		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
1	49939	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Hygien	
1	49936	KLÄDSEL Bålstöd ställbart långt Hygien	
1	49957	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Svart	
1	49958	KLÄDSEL Bålstöd ställbart långt Svart	
		PLÅT kort ställbart kpl	6-13
		PLÅT lång ställbart kpl	6-13
2		BYGEL bålstöd ställbart bred position	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	82135	TÄCKPROPP 12.5x5.25	
5		KANTLIST F125	
6		PLÅT bakre kort	
6		PLÅT bakre långt	
7		PLÅT främre kort	
7		PLÅT främre långt	
		GÅNGJÄRN bålstöd kpl	10-13
8		STÄLLHYLSA 42mm	
9		BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
10		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvänding	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred invänding	
12	81359	SKRUV MC6S M5x55	
13	81504	MUTTER M6M 5	

Bålstöd ställbart långt & kort

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

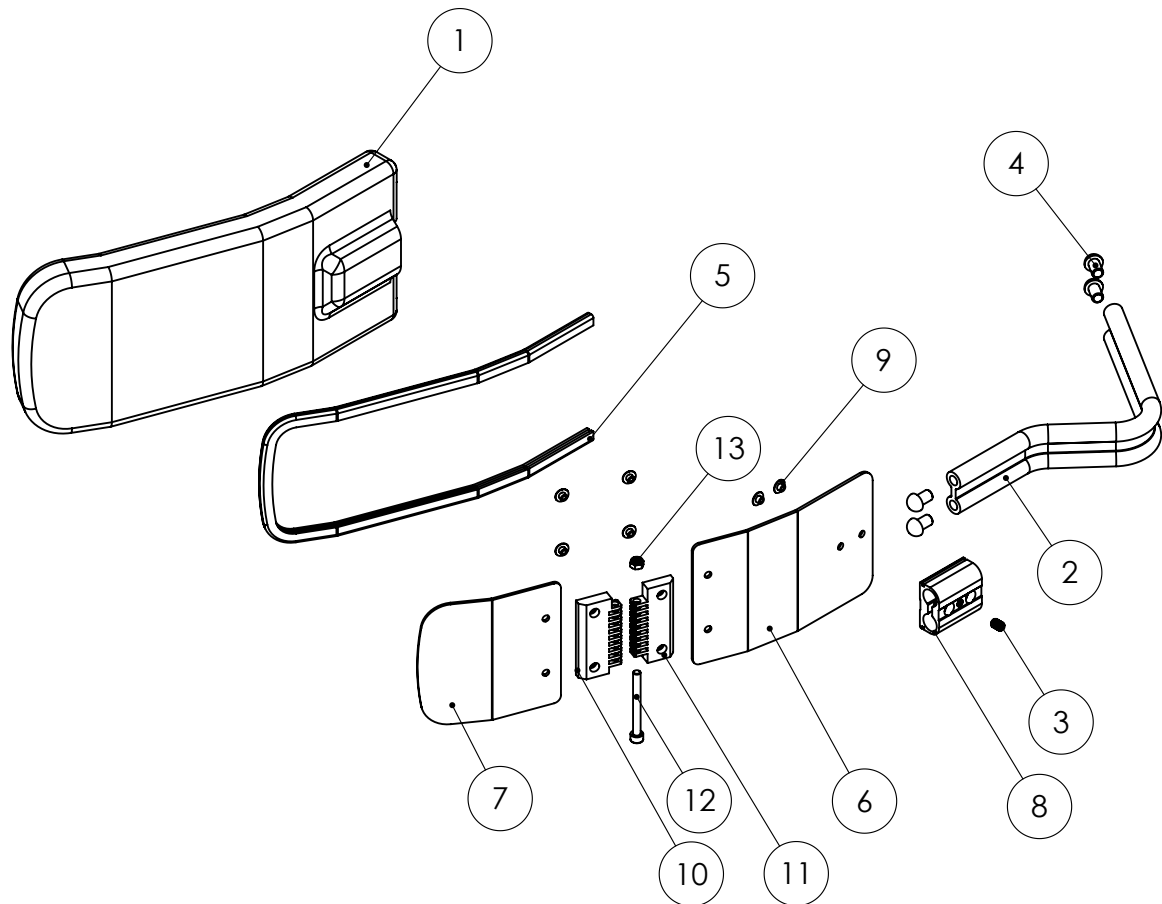

Reservdelslista HD Force**Blad F1.3**


Avser sprängskiss: F1.3 Bålstöd Swing Standard Bred position

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69307-2	SWING Standard Bred position vänster Hygien	1-7
	69307-3	SWING Standard Bred position vänster Svart	1-7
	69308-2	SWING Standard Bred position höger Hygien	1-7
	69308-3	SWING Standard Bred position höger Svart	1-7
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.7
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.7
2		SKRUV K6S M6x20 SV.	
3		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
3	49934	KLÄDSEL Bålstöd std Hygien	
3	49955	KLÄDSEL Bålstöd std Svart	
4		PLÅT bålstöd std	
5		KANTLIST F125	
6		BYGEL Bålstöd swing bred position	
7		BLINDNIT 4,8x16ST/ST	

Bålstöd Swing Standard Bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

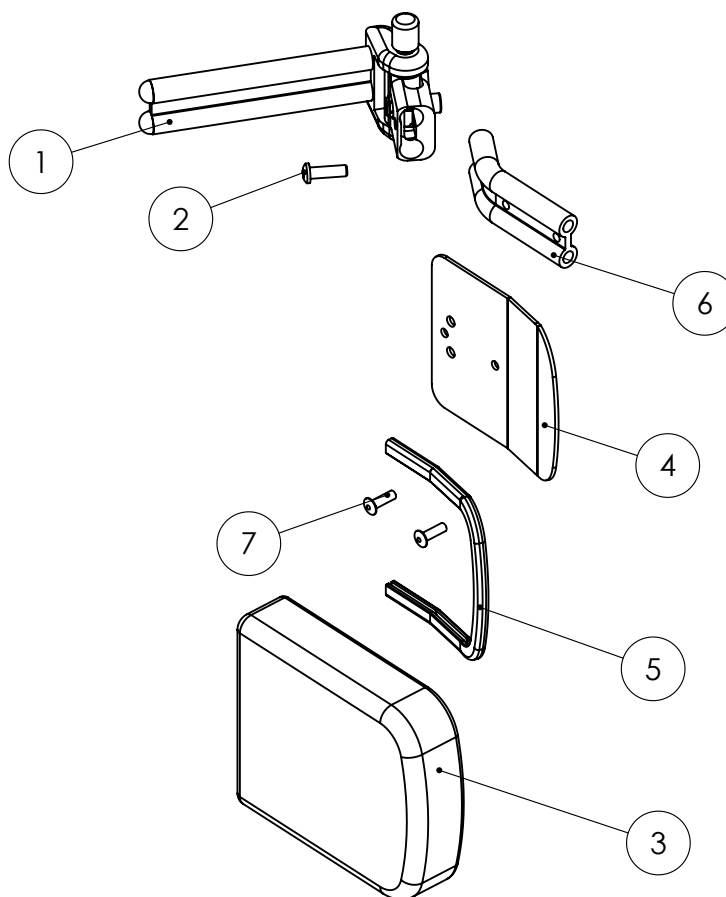

Reservdelsslista**HD Force****Blad F1.4**

Avser sprängskiss: F1.4


Bålstöd Swing Ställbart kort smal & bred position

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69315-2	SWING Ställbart kort Smal position vänster Hygien	1-15
	69315-3	SWING Ställbart kort Smal position vänster Svart	1-15
	69316-2	SWING Ställbart kort Smal position höger Datrex	1-15
	69316-3	SWING Ställbart kort Smal position höger Svart	1-15
	69317-2	SWING Ställbart kort Bred position vänster Hygien	1-14 & 16
	69317-3	SWING Ställbart kort Bred position vänster Svart	1-14 & 16
	69318-2	SWING Ställbart kort Bred position höger Hygien	1-14 & 16
	69318-3	SWING Ställbart kort Bred position höger Svart	1-14 & 16
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.6
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.6
		PLÅT kort kpl ställbart	7-11
2		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
2	49939	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Hygien	
2	49957	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Svart	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
5	82137	TÄCKPROPP 12.5x7x5	
6		KANTLIST F125	
7		PLÅT bakre	
8		PLÅT främre	
		GÅNGJÄRN bålstd kpl	11-14
9		STÄLLHYLSA 42mm	
10		BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvändig del	
12		GÅNGJÄRNSHALVA bred invändig del	
13	81359	SKRUV MC6S M5x55	
14	81504	MUTTER M6M 5	
15		BYGEL Bålstöd swing ställbar smal position	
16		BYGEL Bålstöd swing ställbar bred position	

Bålstöd Swing Ställbart kort smal & bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

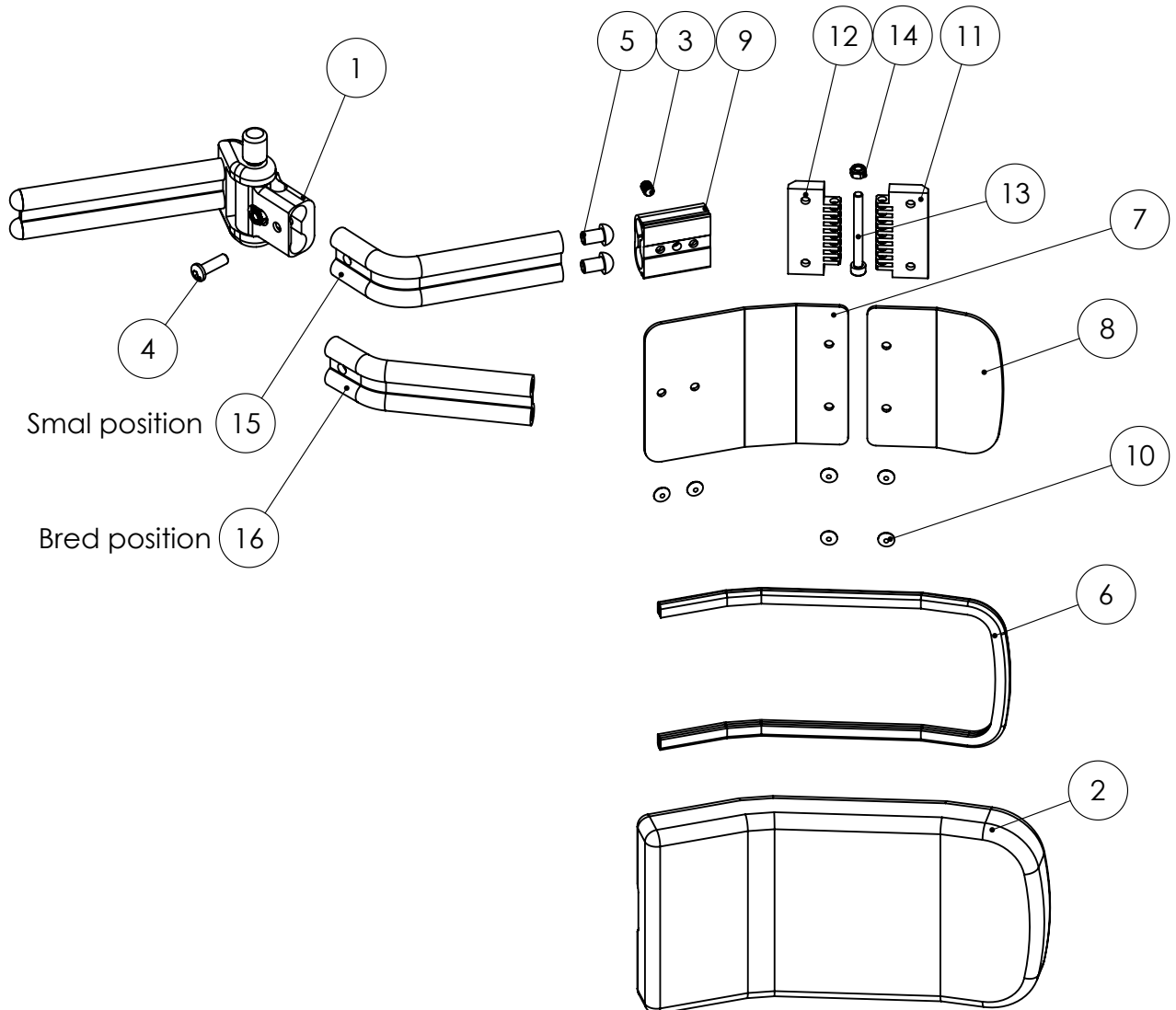

Reservdelsslista**HD Force****Blad F1.5**

Avser sprängskiss: F1.5

Bålstöd Swing Ställbart lång smal & bred position


Intern

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69325-2	SWING Ställbart lång Smal position vänster Dartex	1-15
	69325-3	SWING Ställbart lång Smal position vänster Svart	1-15
	69326-2	SWING Ställbart lång Smal position höger Dartex	1-15
	69326-3	SWING Ställbart lång Smal position höger Svart	1-15
	69327-2	SWING Ställbart lång Bred position vänster Dartex	1-14 & 16
	69327-3	SWING Ställbart lång Bred position vänster Svart	1-14 & 16
	69328-2	SWING Ställbart lång Bred position höger Dartex	1-14 & 16
	69328-3	SWING Ställbart lång Bred position höger Svart	1-14 & 16
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.6
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.6
2		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
		PLÅT lång kpl ställbart	7-10
2	49936	KLÄDSEL Bålstöd ställbart lång Dartex	
2	49958	KLÄDSEL Bålstöd ställbart lång Svart	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
5	82137	TÄCKPROPP 12.5x7x5	
6		KANTLIST F125	
7		PLÅT bakre	
8		PLÅT främre	
		GÅNGJÄRN bålstöd kpl	11-14
9		STÄLLHYLSA 42mm	
10		BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvändig del	
12		GÅNGJÄRNSHALVA bred invändig del	
13	81359	SKRUV MC6S M5x55	
14	81504	MUTTER M6M 5	
15		BYGEL Bålstöd swing ställbar smal position	
16		BYGEL Bålstöd swing ställbar bred position	

Bålstöd Swing Ställbart lång smal & bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

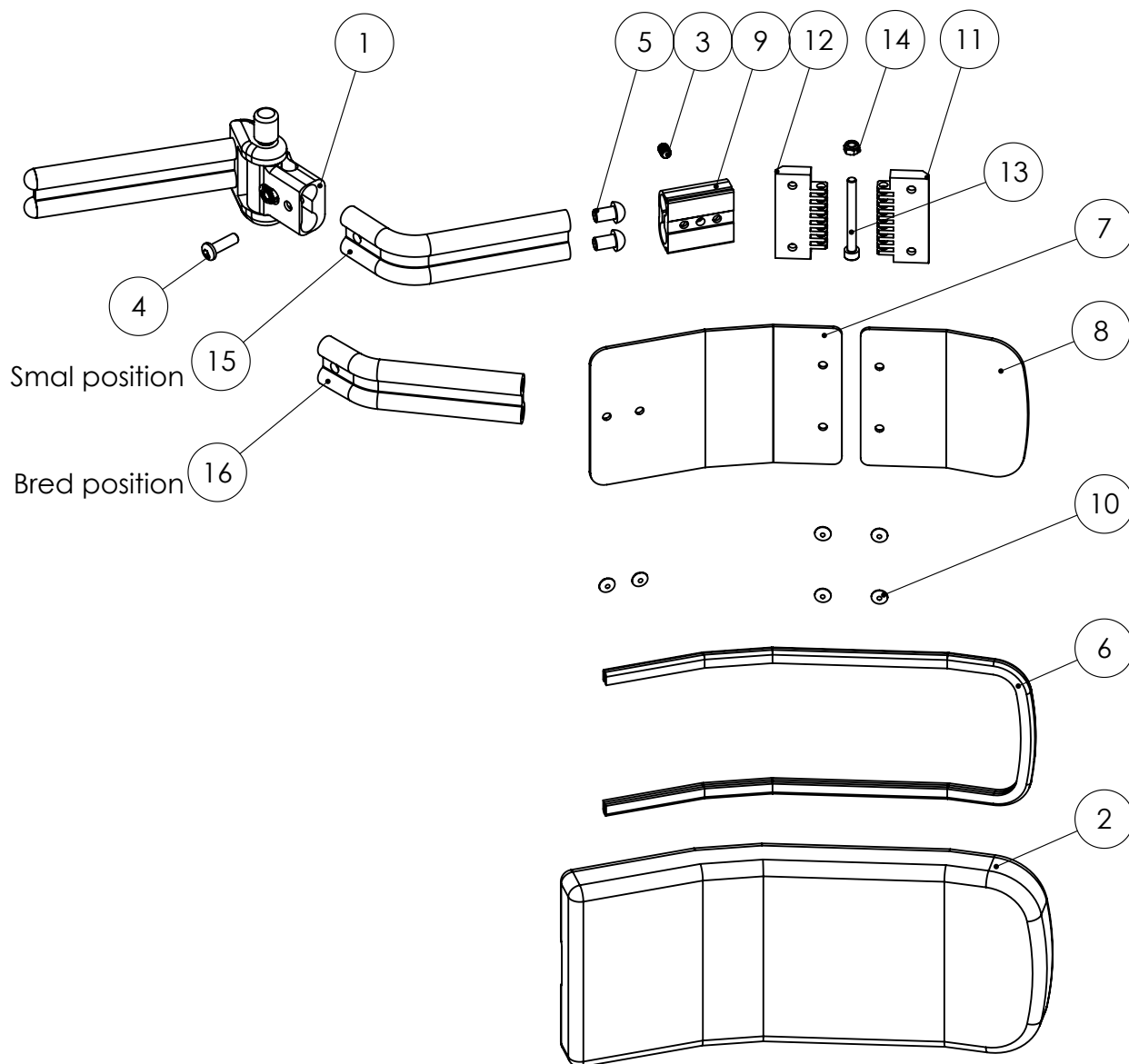

Reservdelsslista**HD Force****Blad F1.6**

Avser sprängskiss: 1.6


Led Bålstöd Swing

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	1-11
	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	1-11
1		STÄLLPROFIL Bålstöd Swing	
		LED Bålstöd Swing vänster kpl	4-11
		LED Bålstöd Swing höger kpl	4-11
2	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
3	82135	TÄCKPROPP 12,5x5	
4		LEDGAFFEL vänster	
4		LEDGAFFEL höger	
5		INNERLED	
6		BUSSNING	
7		LEDTAPP	
8		TRYCKKNAPP Swing	
9	81396	SKRUV MC6S M6x22 FZB	
10	81522	MUTTER Låsmutter M6	
11		FJÄDER bålstöd 2450	

Led Bålstöd Swing

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

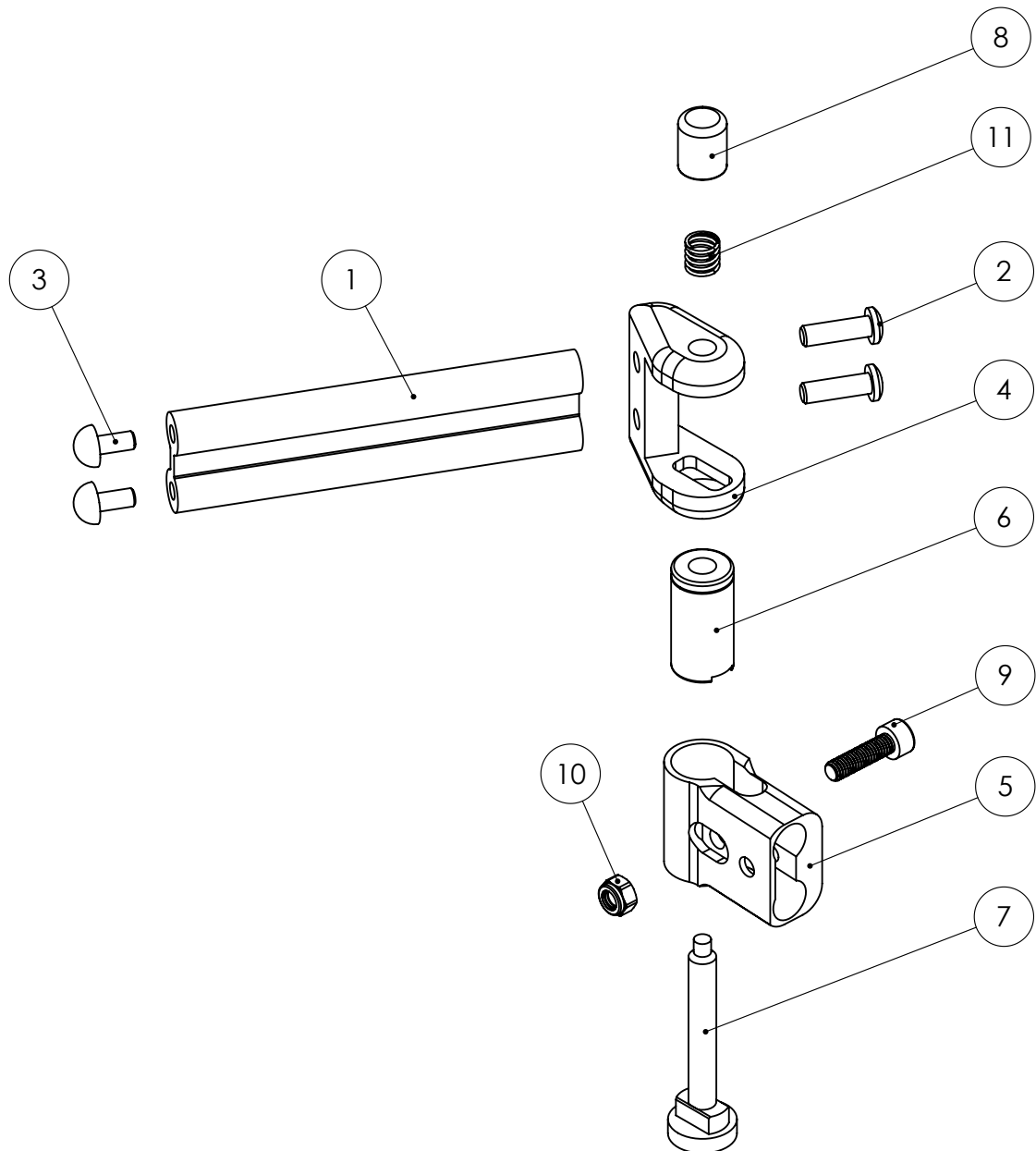


Reservdelslista HD Force**Blad F2.1**Avser sprängskiss: F2.1 **Bord**

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69571	Bord Ek sb54 kpl med beslag std	1-5
	69572	Bord Ek sb58 kpl med beslag std	1-5
	69573	Bord Ek sb62 kpl med beslag std	1-5
1		Bordsskiva Ek sb54 MDF ekfanerad 9 mm	
1		Bordsskiva Ek sb58 MDF ekfanerad 9 mm	
1		Bordsskiva Ek sb62 MDF ekfanerad 9 mm	
2		Bordsbeslag vä std bord	
2		Bordsbeslag hö std bord	
3	69577-9	Skruv till bord	
4	81522	Låsmutter M6	
5	81602	Bricka BRB 6,4x12x1,5	
	69579-1	Fäste bord kpl med tappar	6-8
6		Fäste bord	
7		Tapp bordsfäste	
8		Skruv MLC6S M6x16	
9	81294	Skruv K6S M6x16	
10	81505	Mutter M6M 6	

Bord

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

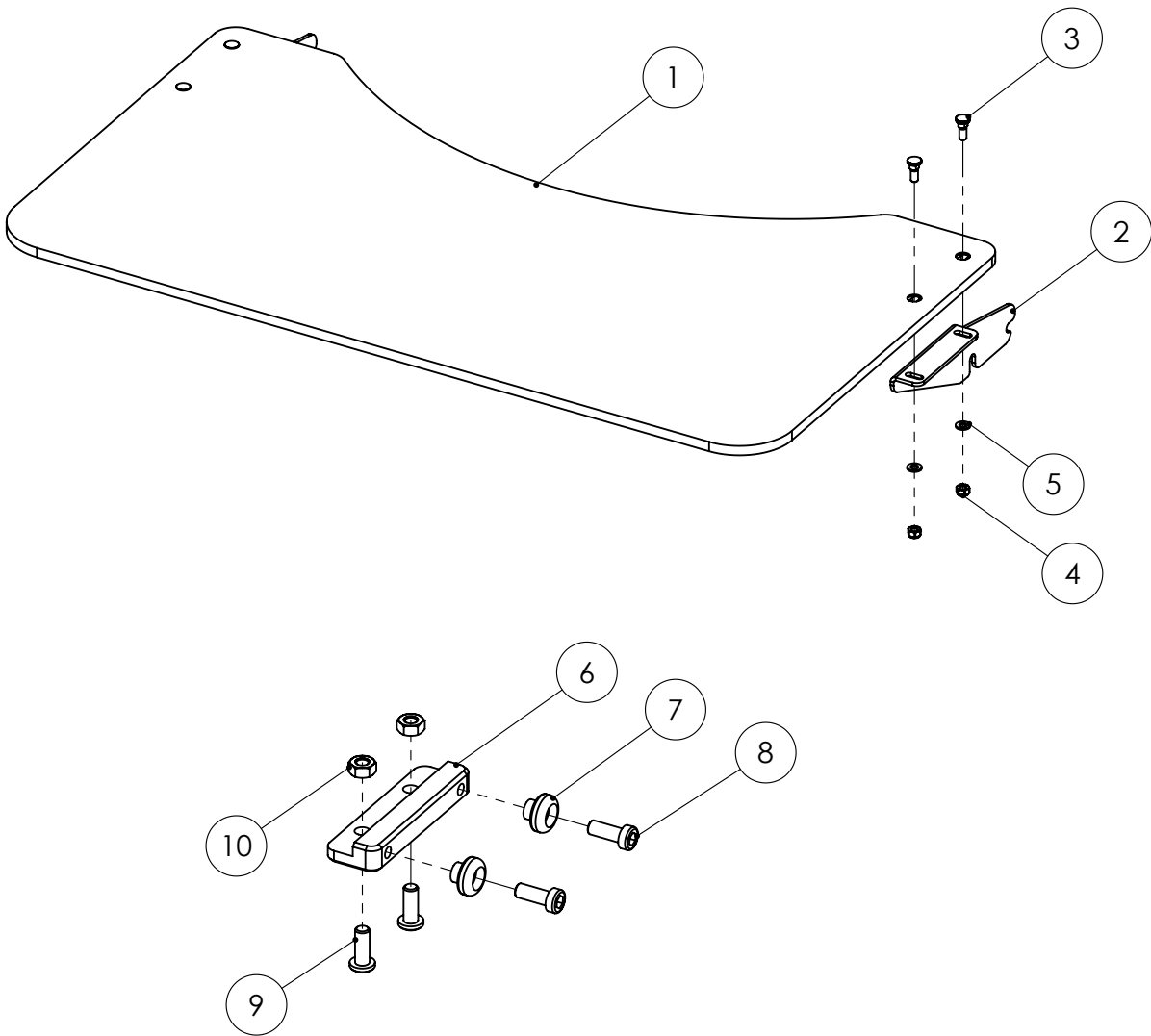

Reservdelslista HD Force**Blad F3.1**


Avser sprängskiss: F3.1 Nackstöd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69111-2	NACKSTÖD Side sidoställbart kpl Dartex	1-15
	69111-3	NACKSTÖD Side sidoställbart kpl Svart Trevira	1-15
	69114-2	NACKSTÖD Side+ sidoställ. m. hylsor kpl Dartex	1-16
	69114-3	NACKSTÖD Side+ sidost.. m. hylsor kpl Svart Trevira	1-16
1		NACKSTÖDSSSTOPPNING	
1	49927	KLÄDSEL nackstöd side Dartex	
1	49953	KLÄDSEL nackstöd side Svart Trevira	
2		PLÅT nackstöd	
3		STÖDPROFIL nackstöd	
4		BRICKA plast huvudstöd	
5	81194	SKRUV M6SF M6x16 fzb	
6	81522	MUTTER låsmutter M6	
7		KARDBORRBAND 20mm	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag	8-14
	12783	HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	11-14
8		KLAMMER huvudstödsrör	
9	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
10	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
11		HUVUDSTÖDSRÖR alu	
12		LEDSTYCKE huvudstödsrör	
13	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
14	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	
15	69141	STÄLLRÖR kpl huvudstöd/nackstöd	se blad F3.6
16	69118-1	FÄSTE sidostöd nackstöd kpl	se blad F3.2

Nackstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

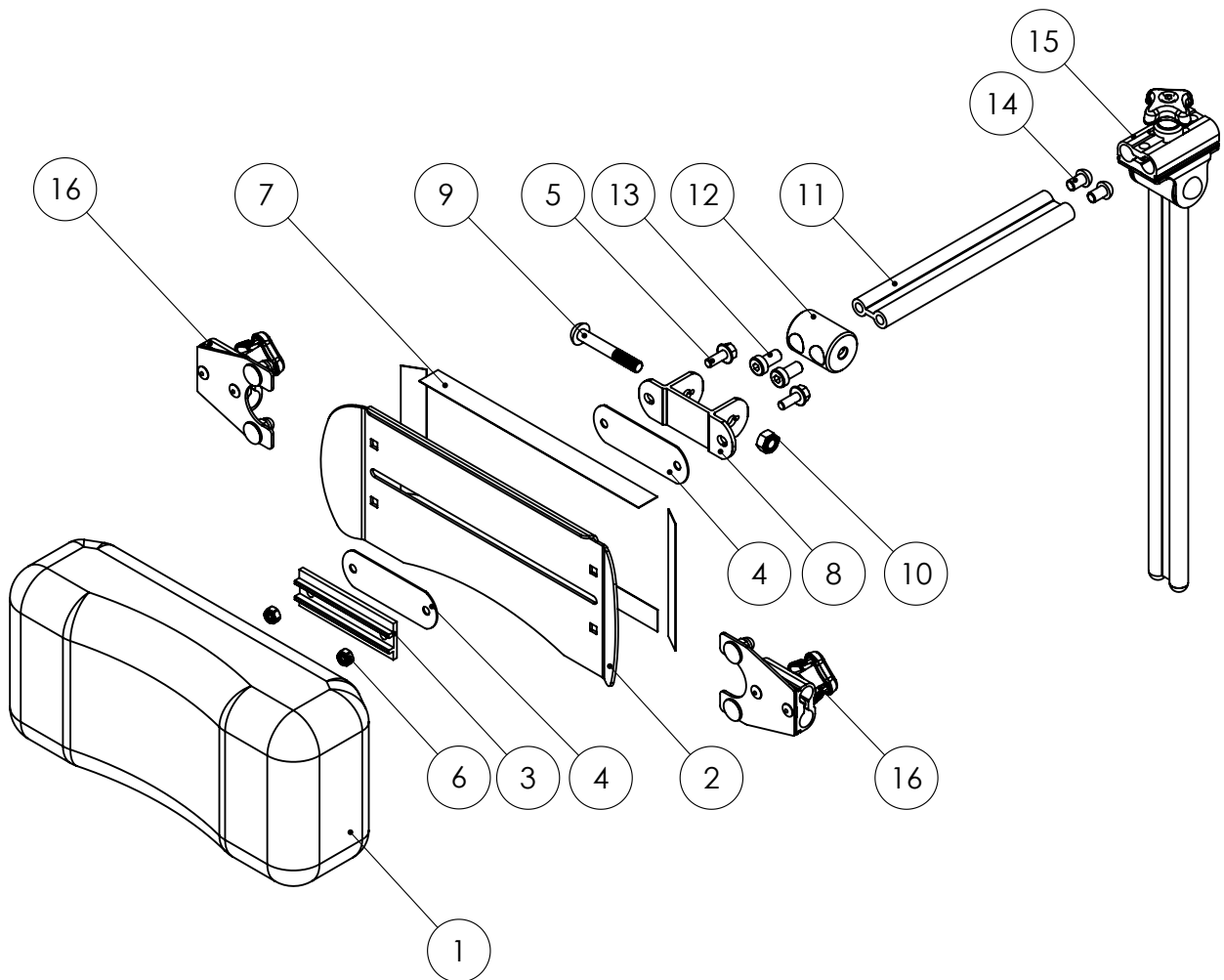

Reservdelslista**HD Force****Blad F3.2**

Avser sprängskiss: F3.2



Sidostöd & fäste till nackstöd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69118-1	FÄSTE sidostöd nackstöd kpl	
1		FÄSTPLÅT sidostöd nackstöd	
		STÄLLHYLSA sidostöd kpl	3-7
2		BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
3		STÄLLHYLSA sidostöd	
4		KLÄMBRICKA profil	
5		SKRUV K6S M6x35 sv.	
6		FJÄDER klämbicka	
7		STJÄRNRATT M6	
	69191-2	SIDOSTÖD nackstöd Dartex	8-20
	69191-3	SIDOSTÖD nackstöd Svart Trevira	8-20
		BYGEL sidostöd nackstöd kpl med klammer	14-20
8		PLÅT sidostöd nackstöd	
9		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
9	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd/nackstöd Dartex	
9	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd/nackstöd Svart Trevira	
10	81342	SKRUV K6S M5x10 sv.	
11	81521	MUTTER låsmutter M5	
12	81630	BRICKA NB 5x13x1	
13		KANTLIST F125	
		BYGEL sidostöd nackstöd kpl	17-20
14		KLAMMER huvudstödsrör	
15	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
16	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
17		BYGEL sidostöd nackstöd	
18		LEDSTYCKE huvudstöd/nackstöd	
19	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
20	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Sidostöd och fäste till nackstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

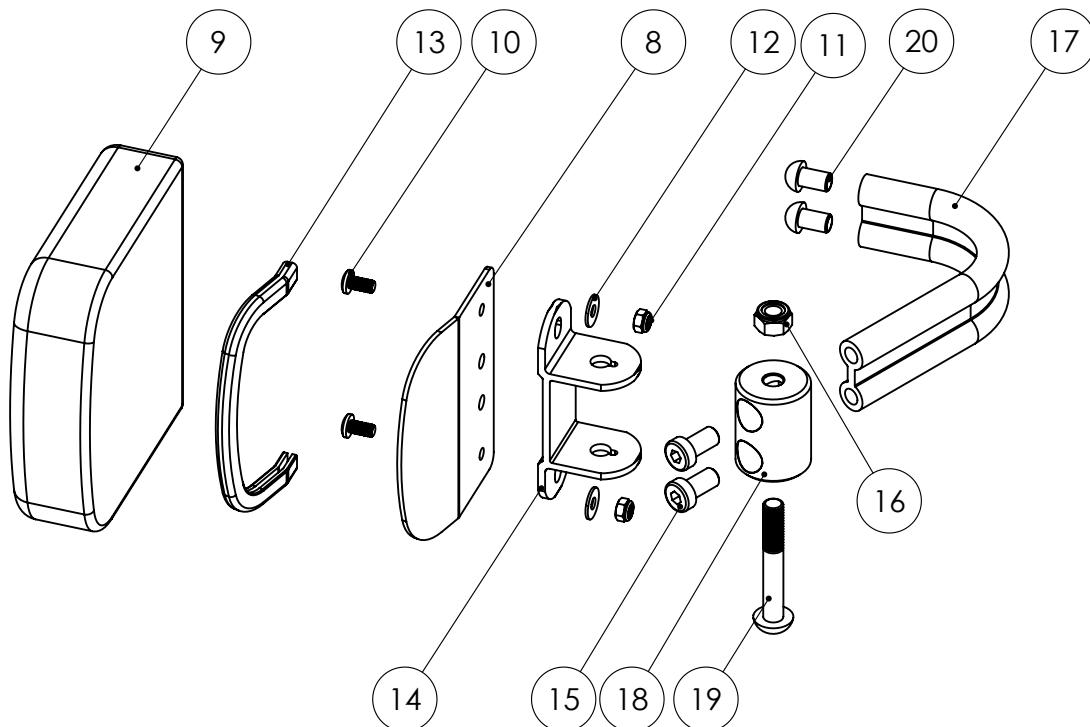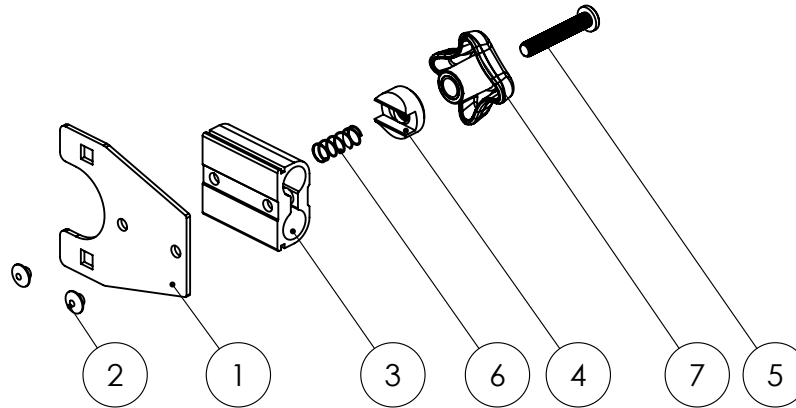

Reservdelslista HD Force**Blad F3.3**


Avser sprängskiss: F3.3 Huvudstöd Side & Side+

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69101-2	HUVUDSTÖD Side Dartex	1-16
	69101-3	HUVUDSTÖD Side Svart Trevira	1-16
	69104-2	HUVUDSTÖD Side+ kpl med hylsor Dartex	1-17
	69104-3	HUVUDSTÖD Side+ kpl med hylsor Svart Trevira	1-17
1		HUVUDSTÖDSSTOPPNING kallskum	
1	49923	KLÄDSEL huvudstöd Side Dartex	
1	49951	KLÄDSEL huvudstöd Side Svart Trevira	
2		STÖDPROFIL nackstöd	
3		BRICKA plast huvudstöd	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag med klammer	10-16
4		PLÅT huvudstöd	
5	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	se blad F3.6
6	81194	SKRUV M6SF M6x16 fzb	
7		BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
8	81522	MUTTER låsmutter M6	
9		KARDBORRBAND 20mm	
	12783	HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	13-16
10		KLAMMER huvudstödsrör	
11	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
12	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
13		HUVUDSTÖDSPROFIL alu	
14		LEDSTYCKE huvudstöd	
15	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
16	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	
17	69119-1	STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd kpl	se blad F3.4

Huvudstöd Side & Side+

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

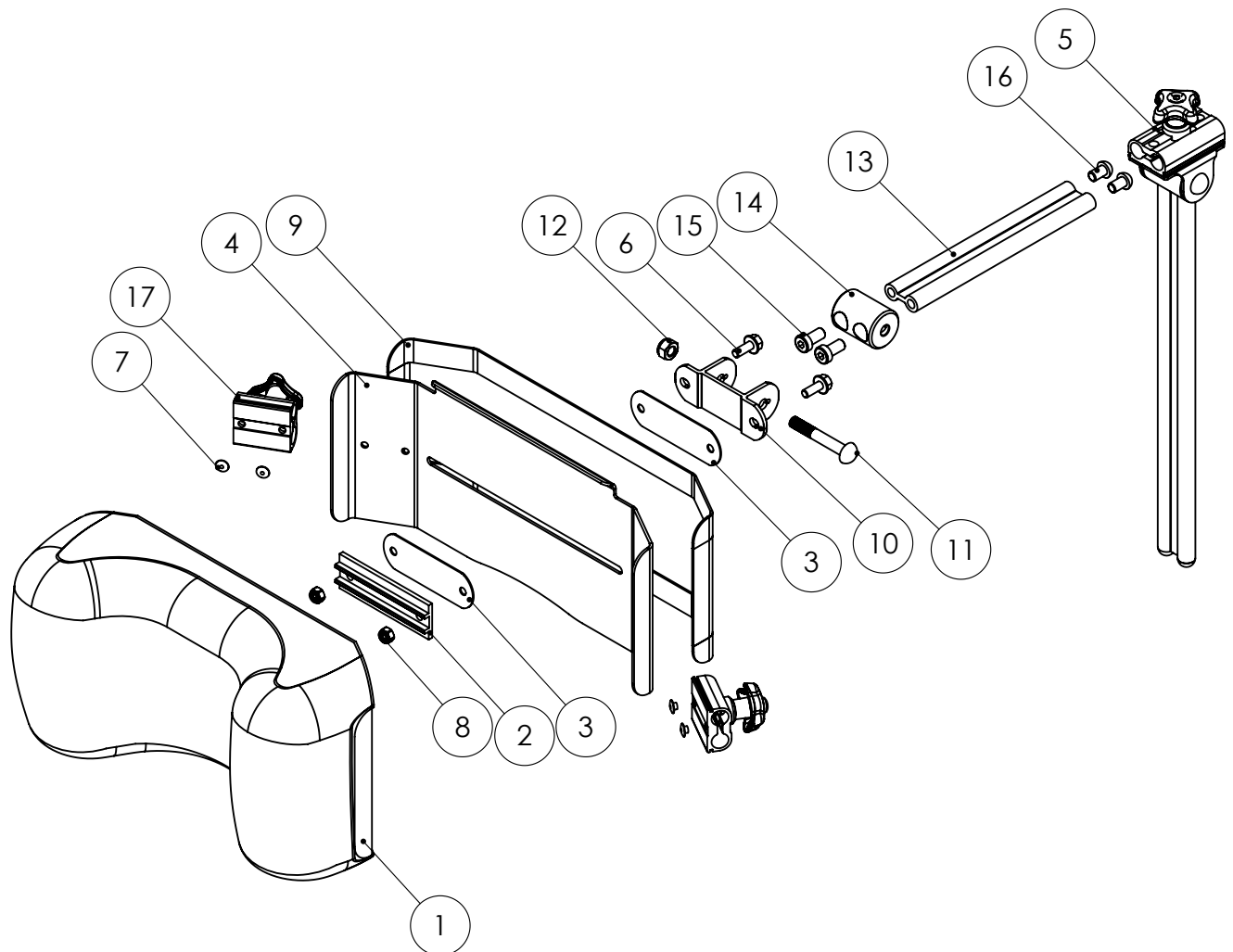

Reservdelsslista**HD Force****Blad F3.4**

Avser sprängskiss: F3.4


Sidostöd & fäste till huvudstöd

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69119-1	STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd kpl	1-5
1		STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd	
2		KLÄMBRICKA profil	
3		SKRUV K6S M6x35 sv helgängad	
4		FJÄDER klämbricka	
5		STJÄARNRATT M6 Braga 40x23	
	69181-2	SIDOSTÖD huvudstöd fast vinkel Fix Dartex	
	69181-3	SIDOSTÖD huvudstöd fast vinkel Fix Svart Trevira	
6		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
6	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Dartex	
6	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Svart Trevira	
	69183-5	BYGEL med plåt sidostöd huvudstöd	7-11
7		PLÅT sidostöd	
8		BYGEL sidostöd	
9	81293	SKRUV K6S M6x10 sv.	
10	82135	TÄCKPROPP 12.5x5	
11		KANTLIST F125	
	69182-2	SIDOSTÖD huvud. ställ. vinkel Vario Dartex	12-24
	69182-3	SIDOSTÖD huvud. ställ. vinkel Vario Svart Trevira	12-24
12		PLÅT sidostöd	
13		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
13	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Dartex	
13	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Svart Trevira	
		BYGEL sidostöd huvudstöd kpl med klammer	18-24
14	81342	SKRUV K6S M5x10 sv.	
15	81521	MUTTER låsmutter M5	
16	81630	BRICKA NB 5x13x1	
17		KANTLIST F125	
18		KLAMMER huvudstödsrör	
		BYGEL sidostöd kpl	21-24
19	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
20	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
21		LEDSTYCKE huvudstöd	
22		BYGEL sidostöd huvudstöd	
23	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
24	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Sidostöd och fäste till huvudstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

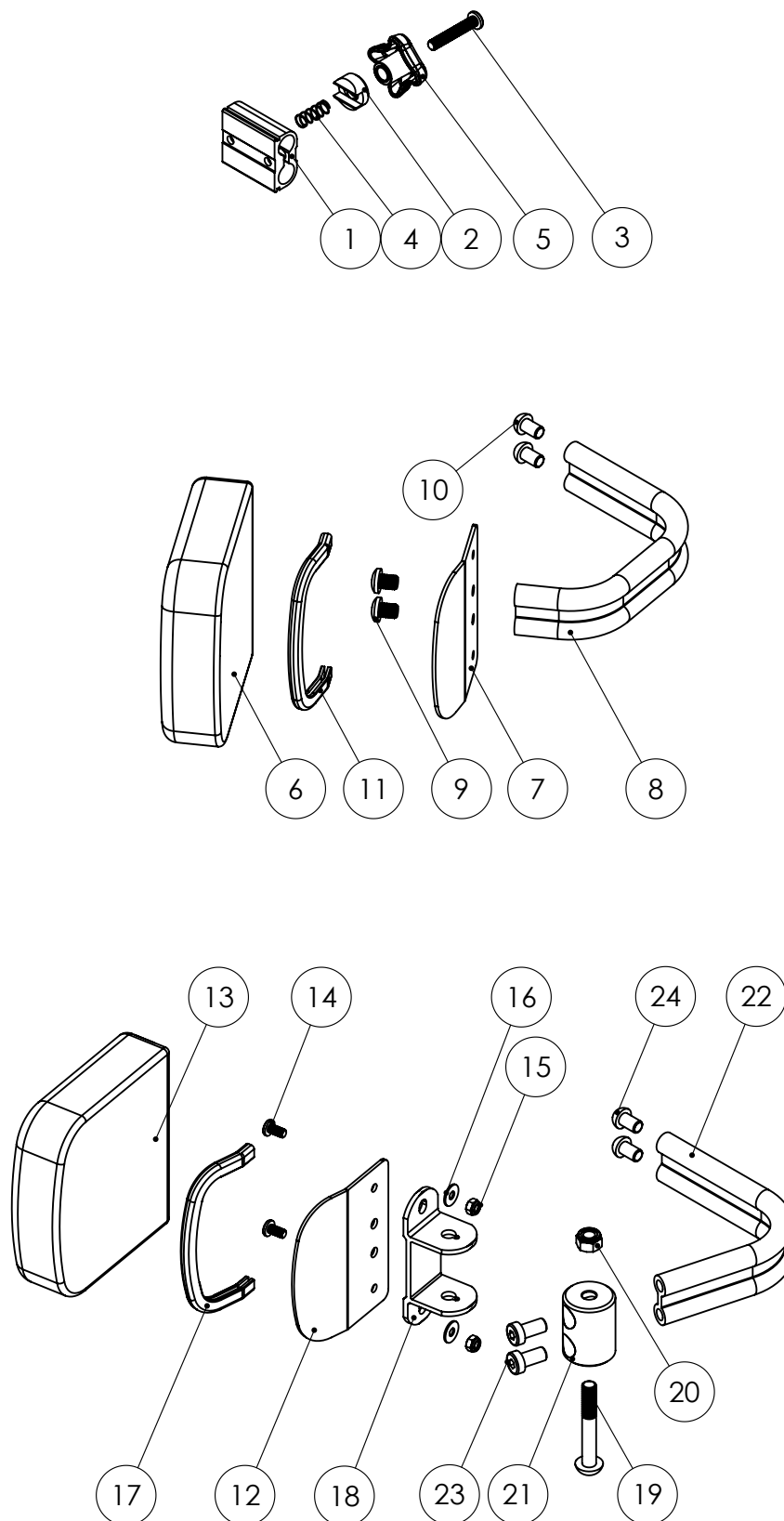

Reservdelslista**HD Force****Blad F3.5**

Avser sprängskiss: F3.5


Huvudstöd Basic

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69108-2	HUVUDSTÖD Basic Dartex	1-13
	69108-3	HUVUDSTÖD Basic Svart Trevira	1-13
1		HUVUDSTÖDSSTOPPNING kallskum	
1		KLÄDSEL huvudstöd Basic Dartex	
1		KLÄDSEL huvudstöd Basic Svart Trevira	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag med klammer	7-13
2		PLÅT huvudstöd enkel	
3	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	se blad F3.6
4	81195	SKRUV M6SF M6x12 fzb	
5	81522	MUTTER låsmutter M6	
6		KARDBORRBAND 20mm	
		HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	10-13
7		KLAMMER huvudstödsrör	
8	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
9	81523	MUTTER låsmutter fzb	
10		HUVUDSTÖDSPROFIL alu	
11		LEDSTYCKE huvudstöd	
12	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
13	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Huvudstöd Basic

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

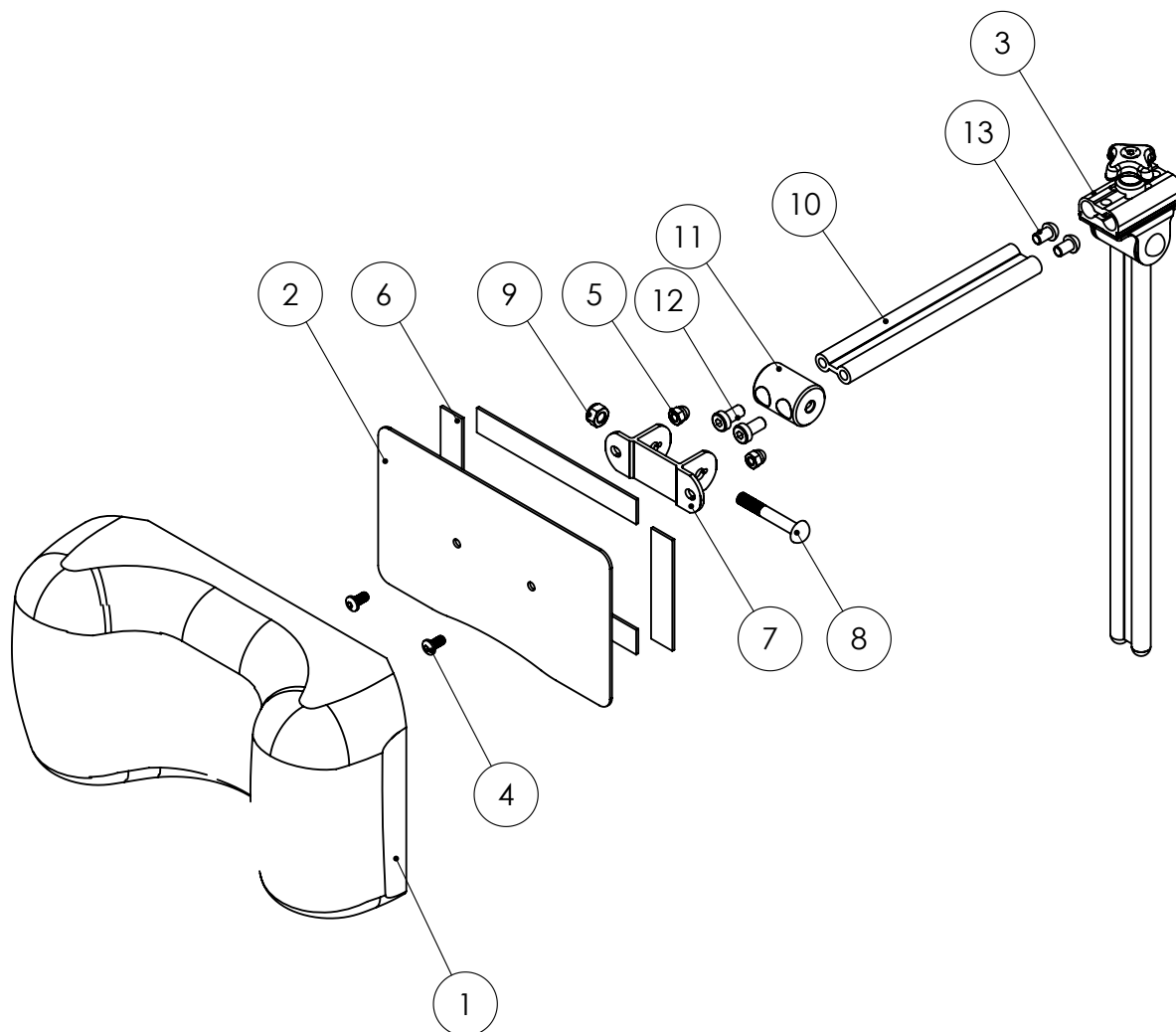

Reservdelslista HD Force**Blad F3.6**


Avser sprängskiss: F3.6 Ställrör huvudstöd/nackstöd kpl

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	1-14
		STÄLLRÖRSPROFIL typ 2	4-7
		STÄLLRÖRSBESLAG kpl	8-14
1	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
2	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
3	81603	BRICKA BRB8.4x16x1.5	
4		STÄLLRÖRSPROFIL 320	
5		LEDSTYCKE huvudstöd	
6	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
7		TÄCKPROPP 12.5x7.5	
	69146-1	HYLSA ställrör kpl	10-14
8		PLÅTVINKEL ställrörsbeslag	
9		BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
10		KLÄMBRICKA profil	
11		HYLSA ställrör huvudstöd	
12		SKRUV K6S M6x35 sv.	
13		FJÄDER klämbrička	
14		STJÄRNRATT M6 Braga 40x23	

Ställrör huvudstöd/nackstöd kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

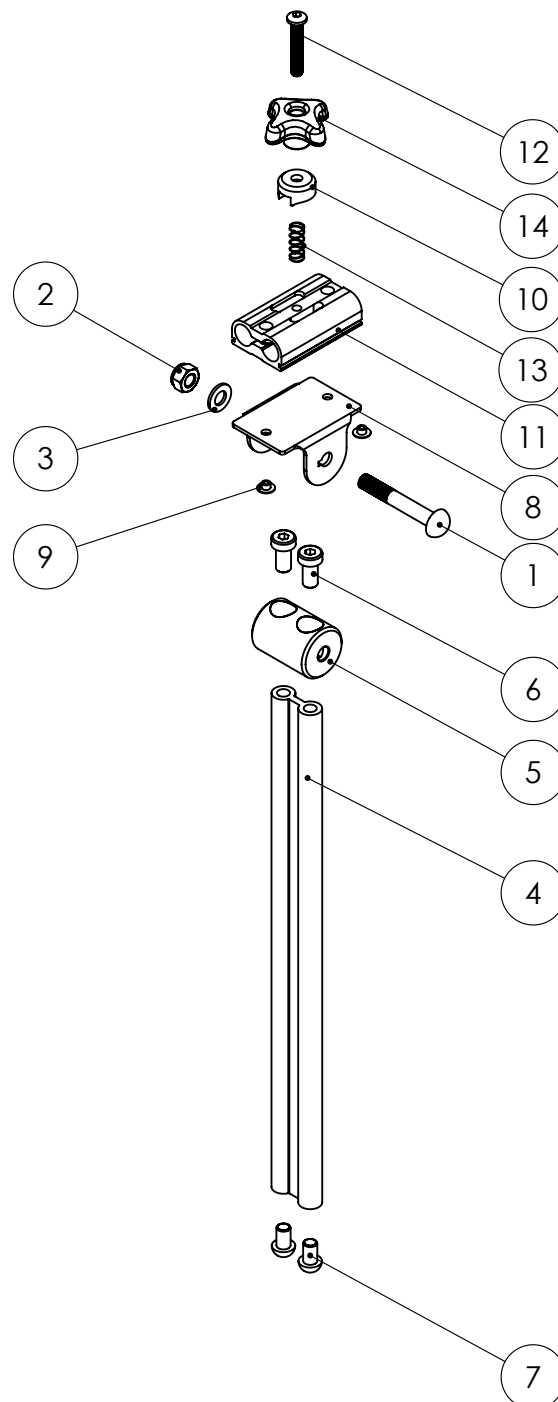

Reservdelsslista**HD Force****Blad F4.1**

Avser sprängskiss: F4.1


Fäste bälte, väskkrok & profilstopp

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69710-1	FÄSTE BÄLTE kpl sats 2st	1-4
		FÄSTE BÄLTE kpl	1-4
1		KLAMMER yttre	
2		KLAMMER inre	
3	81116	SKRUV MRX 5x14	
4	81539	STANSMUTTER M5	
	13605-1	VÄSKKROK , par	5-8
		VÄSKKROK	5-8
5		BYGEL väskkrok	
6		KLAMMER väskkrok	
7	81116	SKRUV MRX 5x14	
8	81539	STANSMUTTER M5	
	12799-1	PROFILSTOPP förp. 10st	9-10
	12799	PROFILSTOPP med skruv	9-10
9		PROFILSTOPP	
10	81331	SKRUV P6SS M6x6	

Fäste bälte, Väskkrok, Profilstopp

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

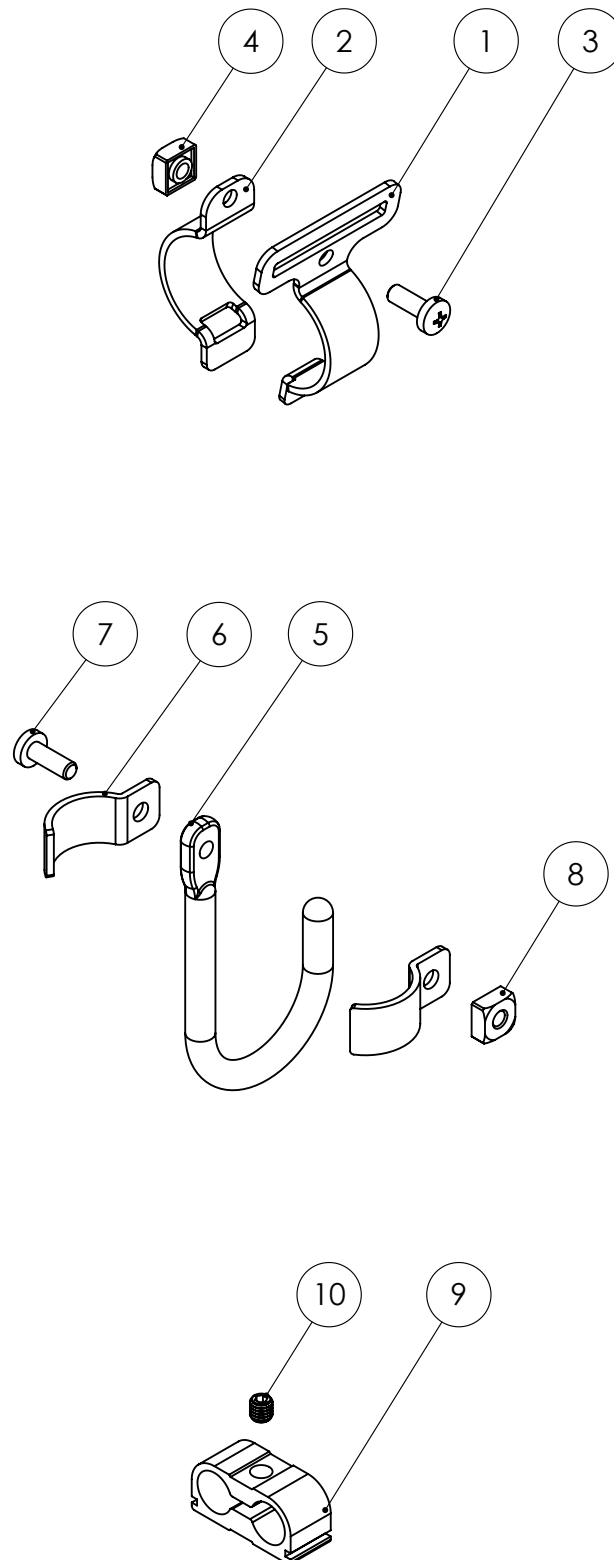

Reservdelslista HD Force**Blad G1.1**

Avser sprängskiss: G1.1


Sittdynor

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68711	SITTDYNA sb54 Fast Svart	
	68712	SITTDYNA sb54 Mjuk Svart	
	68721	SITTDYNA sb58 Fast Svart	
	68722	SITTDYNA sb58 Mjuk Svart	
	68731	SITTDYNA sb62 Fast Svart	
	68732	SITTDYNA sb62 Mjuk Svart	
		Stoppning sits sb54 Fast	
		Stoppning sits sb54 Mjuk	
	49711	Klädsel sits sb54 Svart (Fast)	
	49712	Klädsel sits sb54 Svart (Mjuk)	
	49715	Sitsöverdrag sb54 Inkontinens	
		Stoppning sits sb58 Fast	
		Stoppning sits sb58 Mjuk	
	49721	Klädsel sits sb58 Svart (Fast)	
	49722	Klädsel sits sb58 Svart (Mjuk)	
	49725	Sitsöverdrag sb58 Inkontinens	
		Stoppning sits sb62 Fast	
		Stoppning sits sb62 Mjuk	
	49731	Klädsel sits sb62 Svart (Fast)	
	49732	Klädsel sits sb62 Svart (Mjuk)	
	49735	Sitsöverdrag sb62 Inkontinens	

Sittdynor

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB

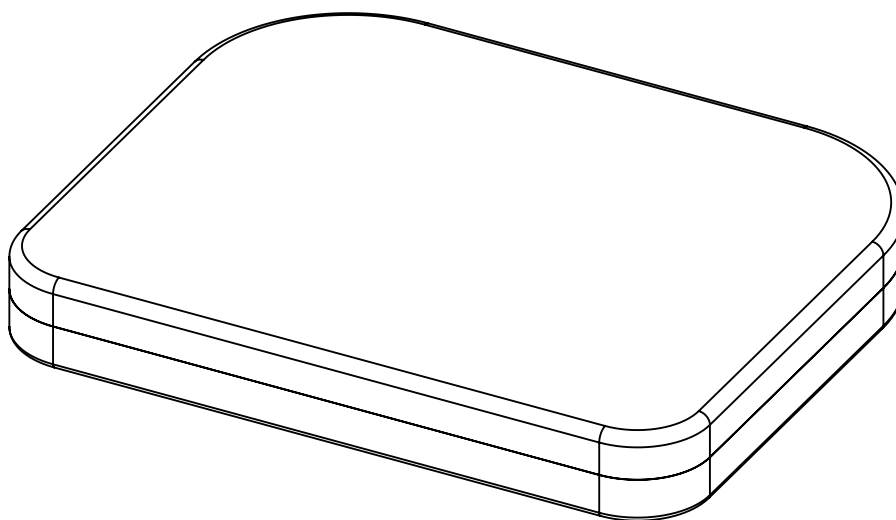

Reservdelslista HD Force**Blad G2.1**

Avser sprängskiss: G2.1

Ryggdynor

rev. 2025-05-20

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68751	RYGGDYNA sb54 Plan Svart	
	68755	RYGGDYNA sb54 Plan Lång Svart	
	68761	RYGGDYNA sb58 Plan Svart	
	68765	RYGGDYNA sb58 Plan Lång Svart	
	68771	RYGGDYNA sb62 Plan Svart	
	68775	RYGGDYNA sb62 Plan Lång Svart	
		Stoppning rygg sb54 std	
		Stoppning rygg sb54 lång	
	49751	Klädsel ryggdyna sb54 Svart	
	49755	Klädsel ryggdyna sb54 +10 Svart	
		Stoppning rygg sb58 std	
		Stoppning rygg sb58 lång	
	49761	Klädsel ryggdyna sb58 Svart	
	49765	Klädsel ryggdyna sb58 +10 Svart	
		Stoppning rygg sb62 std	
		Stoppning rygg sb62 lång	
	49771	Klädsel ryggdyna sb62 Svart	
	49775	Klädsel ryggdyna sb62 +10 Svart	

Ryggdynor

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

