

HD Force finns i två modeller, HD Force 24 med 24" drivhjul (A) och HD Force 16 med 16" drivhjul (B). Sittenhetsen, som innefattar sits, rygg, benstöd och armstöd, är densamma för båda dessa modeller. Det som skiljer modellerna åt är drivhjulens storlek och hjulramens utformning.



Modell 24

HD Force 24 är framtagen för brukare som helt eller delvis kan köra rullstolen själv med hjälp av drivringar på hjulen. Även om förmåga att köra rullstolen själv saknas, ges brukaren möjlighet att med hjälp av drivringarna vrida sig runt i rummet. 24-modellen går också, tack vare den större hjulstorleken, något lättare att vika upp när man går över hinder som t.ex. trottoarkanter.

Modell 16



HD Force 16 är en transportmodell för brukare som inte kör själv. 16"-hjulen möjliggör också att vårdaren kan komma närmare brukaren. Även glidförflyttningar i och ur rullstol i sidled underlättas.

Sittbredd

HD Force finns i tre fasta sittbredder, 54, 58 och 62 cm. Sittbredden mäts mellan armstödens sidostöd (C).

För att ytterligare anpassa sittbredden efter brukaren finns utfyllnadskuddar (D) som fästs på insidan av armstödens sidostöd och gör sittbredden 2 cm smalare (1 cm per sida).

Alternativt kan sittbredden minskas 2 cm med hjälp av Distanser till sidostöden (E).

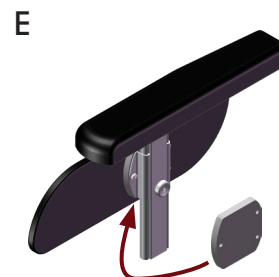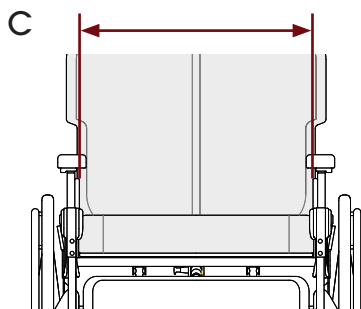

Sittdjup


Sittdjupet mäts från mitten av ryggdyna till sittdynans framkant. Det finns två inställningar som påverkar sittdjupet: sittbrickans position och inställningen av Flexiryggens remmar.

Sittbrickans position ställas in steglöst 10 cm med rattar under sitsen (F).

Flexiryggens (G) band slackas ordentligt innan brukaren sätter sig i stolen för första gång, sedan justeras banden med brukaren på plats för att åstadkomma ett optimalt stöd för brukarens rygg. Skillnaden från helt spänd till maximal längd på Flexiryggens band är ungefär 10 cm (H).

Minsta teoretiska sittdjup är 38 cm, med sittbrickan längst in och Flexiryggens band helt spänd.

Maximal sittdjup är ungefär 58 cm, med sittbrickan längst ut och Flexiryggens band i maximal längd.

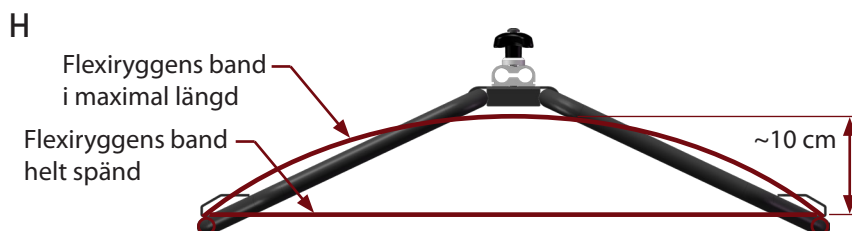

Tänk på

- Information om yttermått och totalbredd se Måttabell, dokument nummer 97719.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.