

## ...och kanske dags för lite ledighet

Varje årstid har ju som bekant sin charm. Vi hade en ovanligt varm sommar i år men nu är temperaturen betydligt lägre och det är skönt att krypa in i värmen och tända några ljus. Julen ligger bra till i år så många av er kommer kanske att njuta av en extra lång julleddighet.

HD Rehab håller julstängt den 27-28 december.

Det är väl ingen som har missat GDPR-"kalabaliken"? GDPR är vår nya EU-lag som ska skydda våra personuppgifter. Även vi på HD Rehab har tittat igenom våra rutiner när det gäller detta. På vår hemsida hittar du vår integritetspolicy med mer information. Naturligtvis är du mer än välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar runt detta. Och glöm inte att du längst ner i detta nyhetsbrev, om du önskar, kan avanmäla dig från framtida nyhetsbrev från oss.

Vi på HD Rehab önskar er alla en riktigt


**God jul- och nyårshelg!!!**



### AXELSTÖD

Nu finns ett helt nytt Axelstöd till HD Balance. Axelstödet kan användas för att ge stöd och förbättra brukarens hållning/balans samt förhindra lutning åt något håll.

[Läs mer](#)

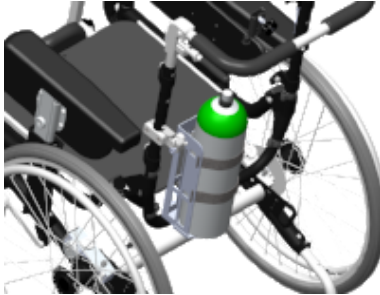


## SYRGASHÅLLARE

Ytterligare ett nytt och efterlängtat tillbehör har tagits fram till HD Balance - syrgashållare.

Syrgashållaren placeras i ett fäste som monteras på rullstolens ryggram.


[Läs mer](#)

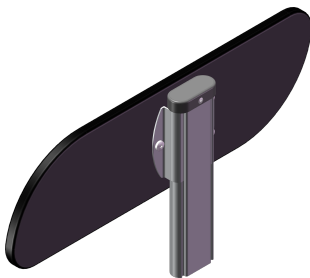

## Sidostöd med stolpe

På allmän förfrågan har vi nu tagit fram ett sidostöd med stolpe. Detta kan vara användbart när rullstolen är utrustad med sittskal eller när det är svårt att nå drivringarna när man kör rullstolen.

[Läs mer](#)

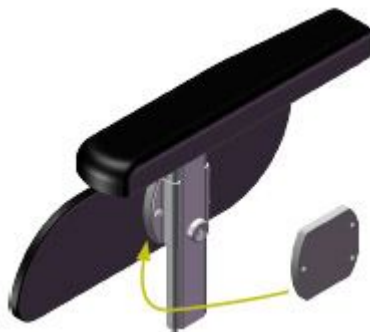

## Distans sidostöd

Nu finns distanser som flyttar in armstödssidostöden närmare brukaren. Dessa kan användas som ett komplement till utfyllnadskuddar då en ännu smalare sittbredd än 38 önskas. Sittbredd 34 kan på detta sätt då uppnås.

De kan även användas i stället för utfyllnadskuddar, t ex då kilformade sidostöd används.

[Läs mer](#)

# Vi har mycket bra information på vår hemsida!

## Har du tittat i vår Förskrivarinformation?

Här får du en bra överblick över HD Balance och dess möjligheter. Fördjupad information kan du sedan läsa i bl. a. Infobladen.

I Förskrivarinformationen finns också Problemlösaren, som ger förslag på lösningar för att ge brukaren en så god sittställning som möjligt och tillgodose de behov som finns.

<b>BRUKARENS KROPP</b>
<b>SITTPROBLEM SOM KAN UPPSTÅ</b>
<b>BRUKARENS BEHOV / ANVÄNDNING AV RULLSTOLEN</b>
<b>VÅRDARENS BEHOV</b>

<b>BRUKAREN ÄR LÅNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FÖRLÅNGT SITSDJUP</li><li>• FÖRHÖJD RYGG</li><li>• LÅNGA BENSTÖDSRÖR</li><li>• FÖRHÖJD SITSENHET</li></ul>
<b>BRUKAREN ÄR KORT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• KORTA BENSTÖDRÖR/AVKORTADE FOTSTÖDSHÅLLARE</li><li>• AVKORTAT SITTDJUP (RYGGDISTANSER)</li><li>• SÅNKT SITSENHET (T EX FÖR STÅENDE FÖRFLYTTNING)</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR SMALA HÖFTER OCH BRETT SKULDERPARTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UTFYLLNADSKUDDAR</li><li>• BREDARE RYGGSYSTEM, +4 ELLER +8 CM</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR BREDA HÖFTER OCH SMALT SKULDERPARTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMALARE RYGGSYSTEM, -4 CM</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR TYNGDPUNKTEN LÅNGT FRAM, T EX BUKFETMA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MER SKÅLAD FLEXIRYGG</li><li>• BAKÅTFLYTTAD SITSENHET</li><li>• BEGRÄNSNING AV TILTVINKELN FRAMÅT</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR TYNGDPUNKTEN LÅNGT BAK, T EX AMPUTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAKÅTFLYTTADE DRIVHJUL</li><li>• FRAMFLYTTAD SITSENHET</li><li>• BEGRÄNSNING AV TILTVINKELN BAKÅT</li><li>• TIPPSKYDD I YTTERSTA LÅGET</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR STOR STJÄRT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FLEXI RYGGSYSTEM</li><li>• SLACKNING AV FLEXIRYGGREMMARNA FÖR ATT GÖRA PLATS FÖR STJÄRTEN</li><li>• HÖJNING AV RYGGSYSTEMET FÖR ATT GÖRA PLATS FÖR STJÄRTEN</li></ul>
<b>BRUKAREN HAR UTÖKAD BRÖSTKYFOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SLACKNING AV FLEXIRYGGREMMARNA FÖR ATT GÖRA PLATS FÖR KYFOSEN</li><li>• EV. NÅGOT ÖPPNAD RYGGVINKEL FÖR ATT FÅ UPP BRUKARENS BLICK</li><li>• STÖDBORD</li></ul>
<b>BRUKAREN GLIDER FRAM PÅ SITSEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RÄTT INSTÄLLT SITTDJUP, RYGG-, ARMSTÖDS- OCH BENSTÖDSHÖJD</li><li>• RÄTT INSTÄLLD TILT- OCH RYGGVINKEL</li><li>• EV. MINSKAD VINKEL PÅ BENSTÖDEN</li><li>• EV. FRAMÅTTILTNING AV BRUKARENS BÄCKEN MED HJÄLP AV FLEXIRYGGREMMARNA</li><li>• 2-PUNKTS- ELLER 4-PUNKTS POSITIONERINGSBÄLTE</li></ul>
<b>BRUKAREN LUTAR ÅT SIDAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SLACKNING AV FLEXIRYGGREMMARNA FÖR ATT GE STÖD I SIDLED</li><li>• FLEXIRYGGDYNA MED SIDOSTÖDSVINGAR</li><li>• BÅLSTÖD, STANDARD ELLER VINKELSTÄLLBARA</li><li>• ARMSTÖD BRED</li><li>• HEMIPLEGIARMSTÖD</li><li>• 2-PUNKTS- ELLER 4-PUNKTS POSITIONERINGSBÄLTE</li><li>• BRICKBORD/STÖDBORD</li><li>• ARMSTÖDSSARG</li></ul>
<b>BRUKARENS ARM/ARMAR FALLER UTANFÖR ARMSTÖDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARMSTÖDSSARG/SARGER</li><li>• ARMSTÖD BRED</li></ul>

<b>BRUKARENS HUVUD HÄNGER FRAMÅT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LÄMPLIGA FLEXIRYGGINSTÄLLNINGAR BEROENDE PÅ ORSAK</li> <li>• BRÖSTSELE + POSITIONERINGSBÄLTE</li> <li>• BRICKBORD/STÖDBORD</li> <li>• FÖRLÄNGT HUVUDSTÖDSRÖR</li> </ul>
<b>BRUKAREN TRYCKER MED SITT/SINA KNÄ MOT BENSTÖDETS KNÄLED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KILFORMAT SIDOSTÖD</li> </ul>
<b>BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER I MELLAN VADSTÖDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIDLEDSJUSTERING AV SEPARATA VADPLATTOR</li> <li>• HELT VADSTÖD</li> <li>• FOTLÅDA</li> <li>• VADMATTA</li> <li>• VADBAND</li> </ul>
<b>BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER I MELLAN FOTSTÖDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HELT FOTSTÖD</li> <li>• FOTLÅDA</li> </ul>
<b>BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER UTANFÖR BENSTÖDEN I SIDLED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOTLÅDA</li> <li>• FOTSTÖDSSIDOR</li> </ul>
<b>BRUKAREN SPARKAR SIG FRAM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SÅNKT SITSENHET</li> <li>• EV. NÅGOT KORTARE SITSDJUP</li> </ul>
<b>BRUKAREN GÖR STÅENDE FÖRFLYTTNINGAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPPLÅST SITSTILT FRAMÅT -5°</li> <li>• RÄTT HÖJD PÅ SITSENHETEN</li> <li>• ARMSTÖDSPLATTORNA I ETT FRÄMRE LÄGE (UPPRESNINGSSTÖD)</li> </ul>
<b>BRUKAREN BEHÖVER ETT MER TILLBAKALUTAT LÄGE I RULLSTOLEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UTÖKAD SITSTILT 30°</li> <li>• UTÖKAD RYGGFÄLLNING 135°</li> </ul>
<b>BRUKAREN KAN ELLER FÅR INTE ÄNDRA LÄGE I HÖFTLEDERNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FAST RYGGVINKEL</li> <li>• INAKTIVERING AV RYGGFÄLLNINGSREGLAGET</li> </ul>
<b>BRUKAREN BEHÖVER MJUK ANPASSNING PÅ RYGGSTÖDET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLANRYGG ATT BYGGA DEN MJUKA ANPASSNINGEN PÅ (SPECIALANPASSNING)</li> </ul>
<b>RULLSTOLEN ÄR FÖR BRED FÖR T EX EN DÖRRÖPPNING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFLYTTADE DRIVRINGAR I KOMBINATION MED SMALA LÄNKHJULSTAPPAR</li> </ul>
<b>BRUKAREN HAR ETT KRÄVANDE RÖRELSEMÖNSTER SOM STÄLLER ÖKADE KRAV PÅ RULLSTOLENS HÅLLBARHET.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAMFÖRSTÄRKT RULLSTOL</li> <li>• FJÄDRANDE RYGG</li> <li>• VINKELFASTA BENSTÖD</li> <li>• HELT VADSTÖD</li> <li>• HELT FOTSTÖD</li> <li>• FOTLÅDA</li> <li>• KÖRBYGEL I STÄLLET FÖR KÖRHANDTAG</li> </ul>
<b>RULLSTOLEN ANVÄNDS I EN HÅRD OCH KRÄVANDE MILJÖ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAMFÖRSTÄRKT RULLSTOL</li> <li>• VINKELFASTA BENSTÖD</li> <li>• HELT VADSTÖD</li> <li>• HELT FOTSTÖD</li> <li>• FOTLÅDA</li> <li>• KÖRBYGEL I STÄLLET FÖR KÖRHANDTAG</li> <li>• DRIVHJUL FLEXEL</li> <li>• ROSTFRI DRIVRING</li> </ul>
<b>KÖRBYGELN ÄR FÖR LÅG FÖR VÅRDAREN, ÄVEN I HÖGSTA MÖJLIGA LÄGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KÖRBYGEL FÖRHÖJD</li> <li>• VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL</li> </ul>
<b>KÖRBYGELN ÄR FÖR LÅG EFTERSOM RULLSTOLEN KÖRS I BAKÅTTILTAT LÄGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KÖRBYGEL FÖRHÖJD BOCKAD</li> <li>• VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL</li> </ul>
<b>VÅRDAREN SLÅR I TÅRNA I DRIVAGGREGAT SOM MONTERATS UNDER RULLSTOLEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KÖRBYGEL EXTRA DJUP</li> </ul>
<b>RULLSTOLENS KÖRBYGEL HINDRAR ANVÄNDNING AV TRAPPKLÄTTRARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPARATA KÖRHANDTAG</li> </ul>

Nyfiken på hur resten av vår Förskrivarinformation ser ut? Följ länken!

[Förskrivarinformation](#)



# HD 500/600/650

 **HUMLAN**



Humlan HD 650 16" hjul



Humlan HD 500 24" hjul

## Humlan finns kvar

Våra HD-rullstolar har utgått ur HD Rehabs sortiment.

Men Humlan 500/650 kan fortfarande beställas!

Humlan har sittbredd 52 cm och kan breddas upp till 62 cm. Max brukarvikt är 160 kg.

Vid frågor, kontakta oss gärna.

---

re}spine<sup>®</sup>



## Kommer du i kontakt med personer som har smärtproblematik från nacke/rygg?

Och som har svårigheter att fungera i olika miljöer?

Då kanske du kan tipsa om Respine som är ett rygg- och nackstöd som fungerar i olika stolar och som man lätt kan bära med sig.

Priset på Respine är endast 1500:- (frakt tillkommer).

[Läs mer](#)

## Kommande mässor

**Fokus Hjälpmedel**  
22-23 Januari 2019  
Serneke Arena, Göteborg  
Monter A:03



**Leva & Fungera**  
26-28 Mars 2019  
Svenska Mässan, Göteborg  
Monter C04:30



HD Rehab AB

Telefon: 08-767 04 80  
E-post: [info@hdrehab.se](mailto:info@hdrehab.se)

Fax: 08-767 50 00  
Hemsida: [www.hdrehab.se](http://www.hdrehab.se)



*HD Rehab nyhetsbrev utkommer några gånger per år när vi har nyheter, förändringar eller något annat viktigt att förmedla till er som arbetar med våra produkter. Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet, vänd dig till [henrik@hdrehab.se](mailto:henrik@hdrehab.se). Har du kollegor eller andra som vill ha vårt nyhetsbrev så kan de gå in på [hdrehab.se/newsletter](http://hdrehab.se/newsletter) och anmäla sig. Här kan du även avanmäla nyhetsbrevet.*